


**Удовольствие
в заботе!**

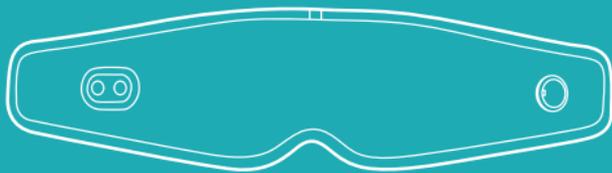

**Массажер для глаз
КТ-5934**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство массажера для глаз.....	6
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание	13
Уход и хранение.....	13
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	15
Меры предосторожности.....	16

Общие сведения

Массажер для глаз КТ-5934 помогает избавиться от неприятных ощущений после повышенной зрительной нагрузки, снять усталость и способствует расслаблению мышц вокруг глаз. Также массажер способствует снятию отеков и тонизированию кожи вокруг глаз. Массажер придает зоне вокруг глаз свежий и отдохнувший вид.

Прибор воздействует двумя способами: вибрацией и нагревом. Вибрационный массаж способствует расслаблению глазных мышц и снятию спазмов и зажимов в мышечной ткани, а также уменьшению отеков под глазами. Нагрев усиливает эффект от массажа, а также способствует улучшению кровообращения и обменных процессов. Данный массажер имеет два уровня нагрева: на первом уровне нагрева температура равна 40 °С, на втором — 42 °С.

Массажер оказывает стимулирующее воздействие на кровоток и лимфоток, ускоряя тем самым доставку питательных веществ и кислорода к глазным мышцам, окологлазным тканям и нервам, в результате чего нормализуется тонус мышц.

Массажер выполнен в форме очков, которые нужно надеть на глаза и зафиксировать ремешком на голове. Управление массажером осуществляется с помощью всего двух кнопок, которые расположены на корпусе. У массажера четыре режима работы: «Бодрящий массаж», подходящий для полноценного массажа, режим «Расслабляющий массаж», который подойдет для мягкого расслабления, режим «Сон», который подойдет для плавного расслабления перед сном, и режим «Музыка». В режиме «Музыка» прибор проигрывает музыкальные композиции (установленные в прибор по умолчанию или выбранные вами) с помощью костной проводимости. Костная проводимость более безопасна, чем обычная, воздушная, потому что она не задействует барабанные перепонки и слуховые косточки (которые являются очень чувствительными). Музыка передается напрямую к внутреннему уху через кости и ткани черепа.

Массажер оснащен голосовым сопровождением: при подключении устройства по Bluetooth, включении и выключении музыки, при выборе режима и уровня нагрева, при низком уровне заряда массажера и отключении массажер подает звуковые команды.

Прибор можно использовать в любом удобном для вас месте и брать с собой в поездки. Режим «Сон» поможет вам настроиться на сон, однако спать с надетым прибором запрещено.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для глаз КТ-5934 не является медицинским прибором и используется только в профилактических и косметологических целях.

Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для глаз

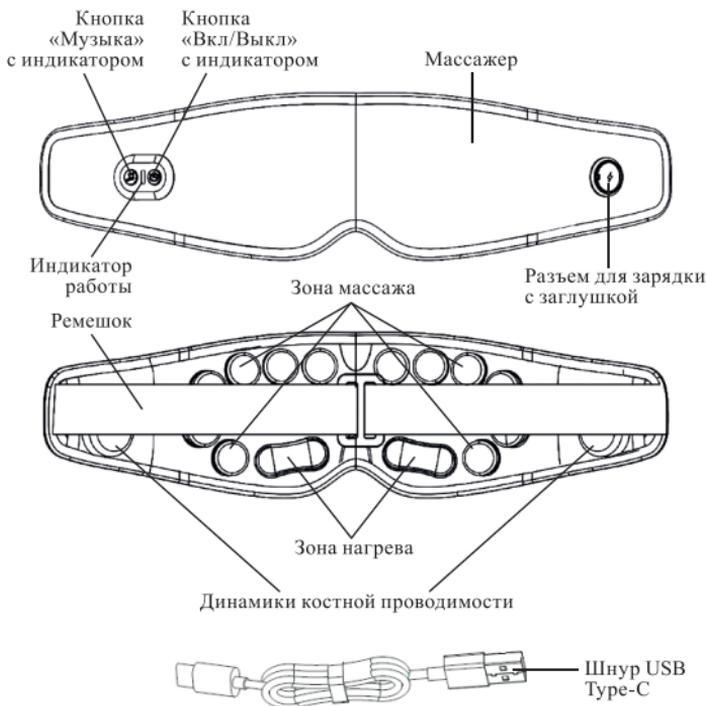

Чтобы включить и выключить массажер, нажмите и удерживайте **кнопку «Вкл/Выкл»** в течение 3 секунд. Прибор начнет работать в режиме «Бодрящий массаж». Чтобы переключить режим, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», режимы переключаются последовательно: «Бодрящий массаж», «Расслабляющий массаж», «Сон» и «Музыка». Режим «Бодрящий массаж» подходит для полноценного активного массажа, режим «Расслабляющий массаж»

подойдет для мягкого расслабления, режим «Сон» характеризуется более спокойным массажем, чем в режиме «Расслабляющий массаж», поэтому подойдет для расслабления перед сном, и режим «Музыка», в котором отсутствует массаж, только нагрев и музыка.

Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» отображает выбранный режим:

Режим «Бодрящий массаж» — индикатор медленно загорается синим цветом и гаснет;

Режим «Расслабляющий массаж» — индикатор медленно загорается зеленым и гаснет;

Режим «Сон» — индикатор медленно загорается голубым и гаснет;

Режим «Музыка» — индикатор непрерывно горит голубым.

Нагрев имеет два уровня: первый 40 °С и второй 42 °С. Чтобы включить, выключить и изменить уровень нагрева, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл» по два раза, уровни нагрева переключаются циклически. **Индикатор работы** горит красным, когда нагрев включен, и синим, когда нагрев отключен.

Примечание. По умолчанию включен первый уровень нагрева.

При низком уровне заряда индикатор работы горит красным. Во время зарядки индикатор работы медленно загорается оранжевым цветом и затем гаснет. При полной зарядке индикатор работы горит синим.

Фоновая музыка включена по умолчанию, встроенный плейлист состоит из 4 треков. Чтобы включить и выключить проигрывание музыки, нажмите два раза на **кнопку «Музыка»**. Чтобы переключить на следующую песню, нажмите на кнопку «Музыка» один раз. Длительное нажатие на данную кнопку в течение 3 секунд включает и выключает поиск устройства для сопряжения по Bluetooth. **Индикатор кнопки «Музыка»** мигает синим цветом после включения массажера. Когда массажер подключен к вашему устройству, индикатор медленно загорается голубым и гаснет.

Примечания. По умолчанию проигрывание музыки и поиск Bluetooth включены. Поиск Bluetooth автоматически выключится через 1 минуту без подключения к устройству.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью. Проздезинфицируйте массажер: его можно протереть ватным диском, слегка смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Не допускайте попадания жидкости в корпус массажера, на органы управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием откройте заглушку разъема для зарядки, подключите шнур USB Type-C к прибору, а затем к источнику питания и полностью зарядите массажер. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ± 5 В, 1 А (в комплект не входит).

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 2,5 часа. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор работы будет гореть непрерывно синим. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки вы не можете использовать устройство.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Когда прибор полностью разряжен, индикатор работы будет гореть красным цветом, а также прозвучит голосовая команда о необходимости зарядить массажер. Во время зарядки данный индикатор медленно загорается оранжевым и гаснет.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от устройства. Плотно закройте заглушку разъема для зарядки.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности и при наличии глазных заболеваний. Не используйте прибор при наличии воспалений глаз или кожи вокруг глаз. Если вы делали инъекции в зоне вокруг глаз или вводили филлеры, прибором пользоваться нельзя. Если у вас хрупкие сосуды, перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
 2. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Проводите массаж только сидя или лежа.
 3. Перед началом процедуры обязательно очистите кожу и удалите макияж. Если вы носите контактные линзы или очки, снимите их.
 4. Наденьте массажер на голову, закрепив ремешком. Массажер должен плотно сидеть на лице и не сползать, но при этом не должно быть сильного давления на глаза или переносицу.
 5. Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Прибор начнет работать в режиме «Бодрящий массаж». По умолчанию включены нагрев и фоновая музыка.
 6. Чтобы сменить режим, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл». Голосовые команды сообщают, какой режим включен.
- Примечание.** В режиме «Музыка» вибромассаж отсутствует.
7. Чтобы выключить или включить нагрев и изменить его уровень, нажимайте по два раза на кнопку «Вкл/Выкл». Голосовые команды сообщают, выключен ли нагрев, а если нагрев включен, то какой уровень нагрева выбран.



- Примечание.** По умолчанию включен низкий уровень нагрева.
8. Чтобы выключить или включить воспроизведение музыки, дважды нажмите на кнопку «Музыка». Голосовые команды сообщают, включено или выключено воспроизведение музыки.
 9. Чтобы переключить песню на следующую, один раз нажмите на кнопку «Музыка».
 10. Чтобы включить музыку из своего плейлиста, вам необходимо установить сопряжение с устройством. Включите Bluetooth на вашем устройстве. Когда устройство будет сопряжено, индикатор кнопки «Музыка» начнет медленно загораться голубым и гаснуть. Голосовая команда сообщает, когда будет установлено соединение с вашим мобильным устройством.
 11. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Голосовая команда сообщит о том, что массаж окончен. Снимите массажер.

Примечание. Массажер автоматически отключается через 15 минут работы в одном режиме.

12. После каждого использования очищайте и дезинфицируйте внутреннюю сторону массажера, как описано в разделе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Рекомендуется использовать прибор не более 2–3 раз в неделю по 10–15 минут на сеанс. Не используйте массажер дольше 15 минут. При выборе времени и частоты использования массажера руководствуйтесь своими ощущениями. Массаж не должен доставлять дискомфорт.

Если во время использования массажера вы почувствовали боль или какой-либо дискомфорт, сразу прекратите процедуру и снимите массажер. Если неприятные ощущения не прошли через 15 минут после прекращения массажа, появилась и не сошла краснота, обратитесь к врачу.

В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора и времени проведения процедур. Настоятельно рекомендуется перед использованием

прибора проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, как часто можно использовать массажер в вашем случае. Режим «Сон» поможет вам настроиться на сон, однако спать с надетым прибором запрещено.

Сопряжение

Чтобы начать поиск устройства для сопряжения, включите массажер, индикатор кнопки «Музыка» будет мигать синим цветом. Чтобы установить сопряжение с мобильным устройством, включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве. В списке подключенных устройств появится название массажера «КТ-5934». Выберите это устройство для подключения. Когда устройство будет сопряжено, индикатор кнопки «Музыка» начнет медленно загораться голубым и гаснуть. Голосовая команда сообщит о том, что соединение установлено.

Чтобы отключить поиск Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку «Музыка» в течение 3 секунд, индикатор кнопки «Музыка» будет непрерывно гореть голубым.

Примечание. Поиск Bluetooth автоматически выключится через 1 минуту не подключения к устройству.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским устройством и используется только в профилактических целях.
3. Детям младше 14 лет прибором пользоваться запрещено. Подросткам старше 14 лет можно пользоваться прибором только после разрешения врача и под присмотром взрослых.
4. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - онкология;
 - наличие глазных заболеваний;
 - перенесенная операция на глаза;
 - сильно развитая дальнозоркость или близорукость;



- воспаление глаз или кожи вокруг глаз;
- конъюнктивит и другие глазные инфекции;
- инфекционные заболевания кожи;
- недавний ввод инъекций и филлеров;
- кожа, склонная к аллергическим реакциям;
- наличие имплантов;
- нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
- тяжелая форма акне;
- хрупкие сосуды;
- воспаления на коже лица;
- купероз 3–4 степени;
- парез лицевого нерва;
- невралгия тройничного нерва;
- варикозное расширение вен, тромбофлебит;
- нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
- остеопороз;
- наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
- хроническая мигрень;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- почечная недостаточность;
- повышенная температура, грипп, ОРВИ;
- сахарный диабет;
- наличие каких-либо заболеваний в острой форме;
- нечувствительность к теплу;
- гипогликемия;
- гипертония;
- слабость, нервозность и страх боли;
- переутомление.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки выключайте массажер, проверяйте, чтобы заглушка разъема для зарядки была плотно закрыта. Протирайте устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Дезинфицируйте внутреннюю сторону массажера до и после использования: ее можно протереть ватным диском, слегка смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине.

Не допускайте попадания жидкости в массажер, на органы управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C. Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки.

Уход и хранение

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать прибор на хранение, очистите его, как указано в разделе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряджайте его примерно 1 час.

При длительном хранении заряжайте аппарат наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С.

Устранение неполадок

Прибор не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите аккумулятор

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Не до конца подключен шнур USB Type-C к разъему для зарядки или источнику питания	Плотно подсоедините шнур к прибору и источнику питания
Слабый ток источника питания	Используйте источник питания с параметрами: ≈ 5 В, 1 А
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Массажер перестал работать

Возможная причина	Решение
По истечении 15 минут работы в одном режиме сработало автоотключение устройства	Включите массажер, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд
Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети питания, дайте массажеру полностью остыть, затем немного зарядите и попробуйте включить снова

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеofайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 1 А
2. Мощность: 4 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,2 А*ч (4,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Версия Bluetooth: 3.0 + EDR
6. Стандарт Bluetooth: IEEE 802.15
7. Профили Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP, SPP
8. Частота Bluetooth: 2,4 ГГц
9. Время зарядки: 2,5 ч
10. Время работы: 75 мин
11. Количество режимов работы: 4
12. Автоотключение: через 15 мин
13. Тип массажера: вибрационный
14. Длина шнура USB Type-C: 0,5 м
15. Уровень шума: ≤45 дБ
16. Размер устройства: 310 × 82 × 90 мм
17. Размер упаковки: 365 × 120 × 85 мм
18. Вес нетто: 0,22 кг
19. Вес брутто: 0,52 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Июэ Хэлс Тэк Ко., Лтд. Рум 711, №282, №288 Чэнбо Стрит, №668 Лиюань Норс Роуд, Хайшу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на органы управления, в разъем для зарядки или на шнур USB Type-C не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер для глаз только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руковод-

стве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор или шнур USB Type-C повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Держите прибор только сухими руками.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на органы управления, в разъем для зарядки или на шнур USB Type-C.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, наличии электронных устройств при заболевании сердца, при наличии глазных, неврологических заболеваний, а также филлеров и инъекций в зоне вокруг глаз, прибором пользоваться запрещено.
17. В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, как часто можно проводить процедуры в вашем случае.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг массажера.
20. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от массажера.
21. Не используйте прибор при ходьбе. Используйте массажер только сидя или лежа. Не засыпайте с надетым прибором.
22. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.

IM-4





Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru