


sertsa®
КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ

Порядок снятия мерок и определения размеров

Снять анатомические мерки в указанных точках ноги, сопоставить их с приложенной таблицей размеров и определить маркировку изделия. Это делает консультант медтехники, врач, либо пациент самостоятельно.


При определении размера, пожалуйста, уделите должное **внимание снятию мерок**. От правильного определения размера зависит правильное функционирование чулка/гольфы. Снятие мерок необходимо проводить утром, так как в течение дня конечности отекают. Измерьте все точки, показанные в таблице размеров для данного изделия. Как изделие должно одеваться на конечность, показано на рисунках.

РАЗМЕР. Чулки компрессионные sertsa®

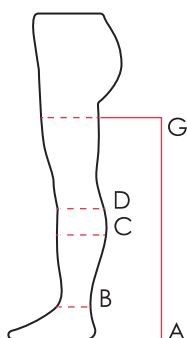


РАЗМЕР (см)	S	M	L	XL	XXL
AG – длина от пятки до уровня G	69-75	69-75	69-75	69-75	69-75
G – окружность бедра на 5 см ниже паха	44-52	48-56	52-60	56-64	60-68
D – окружность под коленом	28-34	31-37	34-40	37-43	40-46
C – окружность икры	30-36	33-39	36-42	39-45	42-48
B – окружность щиколотки	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31

РАЗМЕР. Гольфы компрессионные sertsa®

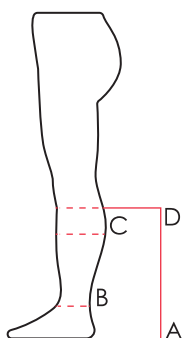


РАЗМЕР (см)	S	M	L	XL	XXL
AD – длина от пятки до уровня D	36-42	36-42	36-42	36-42	36-42
D – окружность под коленом	28-34	31-37	34-40	37-43	40-46
C – окружность икры	30-36	33-39	36-42	39-45	42-48
B – окружность щиколотки	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31

РАЗМЕР. Чулки антиэмболические sertsa®

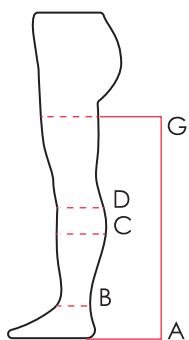

ПАМЕР (см)	S	M	L	XL	XXL
AG – длина от пятки до уровня G	71-77	71-77	71-77	71-77	71-77
G – окружность бедра на 5 см ниже паха	52-58	57-63	61-67	64-70	67-73
D – окружность под коленом	31-35	34-38	37-41	39-43	41-45
C – окружность икры	32-36	35-39	38-42	40-44	42-46
B – окружность щиколотки	19.5-22.5	22.5-25.5	25.5-28.5	27.5-30.5	29.5-32.5

РАЗМЕР. Гольфы антиэмболические sertsa®

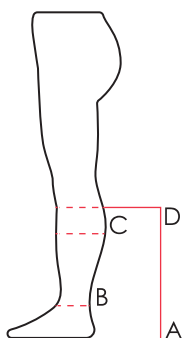

РАЗМЕР (см)	S	M	L	XL	XXL
AD – длина от пятки до уровня D	36-42	36-42	36-42	36-42	36-42
D – окружность под коленом	28-34	31-37	34-40	37-43	40-46
C – окружность икры	30-36	33-39	36-42	39-45	42-48
B – окружность щиколотки	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31

Показания к применению компрессионного трикотажа sertsa®

1-й класс компрессии (от 15 до 21 мм. рт. ст.)

- Функциональные флебопатии (синдром «тяжелых ног»)
- Ретикулярный варикоз, телеангиэктазии (сосудистые «звездочки»)
- Профилактика варикозной болезни ног во время беременности и после родов
- Профилактика варикозной болезни ног при наличии факторов риска
- Отдаленный период реабилитации (> 3 месяцев) после хирургического лечения варикозной болезни

2-й класс компрессии (от 23 до 32 мм. рт. ст.)

- Профилактика тромбоза глубоких вен у пациентов группы риска
- Профилактика тромбоэмболических осложнений у пациентов после хирургических, травматологических, гинекологических операций, с длительным постельным режимом
- Ранний период реабилитации после хирургического или инъекционного лечения варикозной болезни (флебэктомии, склерооблитерации)
- Варикозная болезнь вен нижних конечностей без трофических нарушений (единичные расширенные вены до 5 см)
- Острый и хронический тромбофлебит поверхностных вен

Факторы риска развития варикозной болезни



Работа на ногах



Наследственная
предрасположенность



Малоподвижный
образ жизни



Избыточная
масса тела



Частые перелеты на
самолетах и постоянное
использование автомобиля



Беременные женщины
и молодые мамы



Возрастные
изменения



Длительный прием
гормональных
препаратов