



**KIT
FORT**



**Молокоотсос
КТ-2319**

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство молокоотсоса	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание молокоотсоса	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	8
Другие товары «Китфорт».....	10



Общие сведения

Грудное молоко является полноценным источником питания для новорожденного. Кроме того, что материнское молоко полностью удовлетворяет потребности ребенка в витаминах и микроэлементах, оно содержит антитела, которые защищают малыша от инфекций и аллергических заболеваний.


Молокоотсос уберезет вас от застойных явлений в груди (лактостаза), а также поможет собрать грудное молоко, если вы не находитесь рядом с ребенком, например, на работе. Также молокоотсос полезен для поддержания выработки грудного молока, если необходимо временно прекратить грудное вскармливание. Без индивидуальной рекомендации врача пользоваться молокоотсосом рекомендуется, когда функция грудного вскармливания полностью установится. Это бывает примерно через 4 недели после начала вскармливания.

Компактный и портативный молокоотсос КТ-2319 имеет мягкий лепестковый массажер, а также он прост в использовании. Прибор легко разбирать и мыть.

Комплектация

1. Молокоотсос в сборе — 1 шт.
2. Соска с кольцом и крышкой — 1 шт.
3. Дополнительный клапан насоса — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Гарантийный талон — 1 шт.

Устройство молокоотсоса

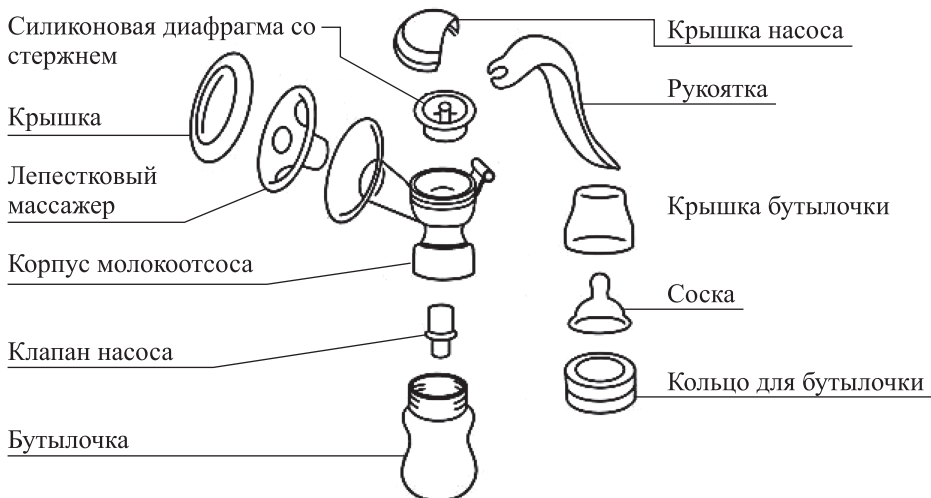


Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием очистите и простерилизуйте все детали молокоотсоса. Очищайте все детали после каждого использования и стерилизуйте все детали перед использованием.

Сборка молокоотсоса

Перед сборкой молокоотсоса вымойте руки с мылом.

1. Установите клапан в корпус насоса снизу. Убедитесь, что клапан установлен плотно.
2. Установите корпус молокоотсоса на бутылочку.
3. Поверните корпус молокоотсоса по часовой стрелке до упора.
4. Поместите силиконовую диафрагму со стержнем в корпус насоса. Прижмите ее пальцами.
5. Соедините рукоятку со стержнем диафрагмы. Нажмите на рукоятку, чтобы она встала на место со щелчком.
6. Вставьте лепестковый массажер в воронку и убедитесь, что он плотно прилегает по всему краю воронки.
7. Наденьте крышку на корпус насоса. Молокоотсос готов к использованию.

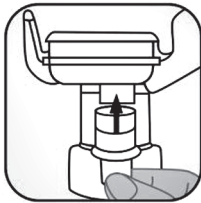

1



2



3



4



5



6



7

Использование

1. Тщательно вымойте руки и грудь.
2. Простерилизуйте все части молокоотсоса и соберите его согласно рисункам выше.
3. Сядьте удобно и расслабьтесь. Подложите подушку для поддержки спины.
4. Плотно прижмите молокоотсос лепестковым массажером к груди, чтобы внутрь не попадал воздух. Лепестковый массажер должен присосаться.



**KIT
FORT**

Молокоотсос
КТ-2319

5. Осторожно нажмите на рукоятку молокоотсоса и вы почувствуете усилие, которое молокоотсос прикладывает к груди. Его величина зависит от того, насколько сильно вы нажимаете на рукоятку. Постарайтесь подобрать для себя оптимальный уровень усилия.
6. В начале сцеживания быстро нажмите и отпустите рукоятку 5-6 раз, чтобы стимулировать выделение молока. После этого нажмите на рукоятку и удерживайте ее в таком положении 2-3 секунды, затем осторожно отпустите ее. Такой цикл длительностью 2-3 секунды имитирует естественный ритм сосания ребенка, а в интервалах между нажатиями рукоятки молоко течет в бутылочку.
7. Если сцедить молоко не удалось после 5 минут использования молокоотсоса, прекратите попытки. Попробуйте сделать это в другое время в течение дня.
Внимание! Если сцеживание причиняет неприятные ощущения или боль, прекратите пользование молокоотсосом и обратитесь к врачу.
8. Вы можете пользоваться молокоотсосом без лепесткового массажера, однако, массирующее воздействие лепестков на зону вокруг ареолы стимулирует выделение молока.

Советы

Не беспокойтесь, если молоко не появится сразу, расслабьтесь и продолжайте процесс сцеживания. Если у вас появилась боль в груди во время сцеживания, остановите процесс и обратитесь к врачу.

Не продолжайте сцеживание, если более 5 минут нет результата. Пейте больше жидкости, чтобы стимулировать производство молока.

Сначала вы должны сцедить молоко из одной груди, а затем из другой. Однако процесс сцеживания не должен превышать 7 минут для каждой груди.

Не переполняйте бутылочку.

После сцеживания ваша грудь должна быть мягкой, в ней не должно быть твердых областей. Если в груди присутствуют уплотнения, это означает, что вы не полностью сцедили молоко.

Для улучшения лактации перед использованием молокоотсоса положите на грудь на несколько минут теплую ткань или примите теплый душ.

Вы также можете сцеживать молоко во время кормления малыша, из свободной груди или использовать молокоотсос сразу после кормления ребенка.

Выработайте собственную технику сцеживания, которая наиболее удобна и эффективна для вас.

Хранение грудного молока

Температура хранения	Рекомендуемая продолжительность хранения
25 °С (комнатная температура)	до 4 часов
4 °С	до 24 часов
-18 °С (морозильная камера)	около 3–6 месяцев

Замороженное грудное молоко следует сначала разморозить в холодильнике. Для срочного размораживания поместите бутылочку с молоком в теплую воду. После размораживания молоко можно хранить в холодильнике в течение 24 часов.

Никогда не замораживайте молоко повторно.

Для разогрева молока удобно пользоваться подогревателем детских бутылочек.

Не нагревайте молоко в микроволновой печи, так как это может разрушить ценные питательные вещества и антитела, а неравномерное нагревание может привести к «горячим зонам» внутри жидкости, которые могут обжечь горло малыша. Никогда не погружайте замороженное молоко в кипящую воду, так как бутылочка может деформироваться.

Чистка и обслуживание молокоотсоса

Стерилизуйте все части молокоотсоса после каждого применения.

Уход и хранение

Храните молокоотсос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Молокоотсос не всасывает

Возможная причина	Решение
Молокоотсос собран неправильно	Убедитесь, что детали молокоотсоса плотно соединены друг с другом. Проверьте, что лепестковый массажер плотно соединен с грудью

Молоко не поступает

Возможная причина	Решение
Вами выбран слишком высокий режим сцеживания	Отрегулируйте режим сцеживания. Если это не помогает, проконсультируйтесь с врачом



**KIT
FORT**

Молокоотсос
КТ-2319

Технические характеристики

1. Емкость бутылочки: 250 мл
2. Размер устройства: 228 × 86 × 233 мм
3. Размер упаковки: 230 × 93 × 157 мм
4. Вес нетто: 0,20 кг
5. Вес брутто: 0,29 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Производитель: Производитель: Фошань Шуньдэ Лонсан
Илектрикал Эплаинс Ко., Лтд. 2-1 ХуаньШань Вест Роуд, Наньпу, Джуньвань Таун,
Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная
ул., д. 3, лит. X, оф. 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3,
лит. X, оф. 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по мо-
сковскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на
сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде
необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наи-
более безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а
также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей про-
дукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите осо-
бое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может
применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и
других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте молокоотсос только по назначению и в соответствии с указания-
ми, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства
будет считаться нарушением условий надлежущей эксплуатации.

3. Людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
4. Не оставляйте и не храните молокоотсос во влажной среде.
5. Не используйте молокоотсос во время сна или в сонном состоянии.
6. Молокоотсос – индивидуальный прибор. Использование молокоотсоса несколькими людьми представляет риск для здоровья.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1

Другие товары «Китфорт»

Планетарный миксер КТ-1330

- планетарная система вращения
- мощность 800 Вт
- емкость чаши 4,5 л
- 3 металлические насадки



Духовка КТ-1706

- электронное управление
- мощность: 1650 Вт
- объем: 26 л
- 9 программ управления

Вертикальный пылесос КТ-524

- 2 в 1, съемный ручной пылесос
- мощность: 600 Вт
- пылесборник: 0,8 л
- проводной



Парогенератор КТ-1003

- мощность: 1500 Вт
- емкость резервуара: 0,45 л
- длина шнура: 5 м

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

