




**Инструкция по подключению тонометра
UA-911BT-C
к мобильному приложению **A&D Connect**
на платформе **iOS**
и сайту **telemedicine-and.ru****




1. Поиск и установка мобильного приложения A&D Connect (App Store).....	3
2. Включение Bluetooth	4
3. Начало работы с A&D Connect.....	5
4. Регистрация в мобильном приложении.....	6
5. Подключение устройства (Тонометр UA-911BT-C).....	7
6. Результаты работы прибора и приложения после измерений.....	8
7. Главное окно приложения A&D Connect.....	9
8. Установка напоминаний и экспорт данных.....	10
9. Как найти сайт telemedicine-and.ru в интернете?.....	11
10. Карта сайта telemedicine-and.ru.....	12
11. Как зарегистрироваться на сайте.....	13
12. Медкарта.....	14

1. Поиск и установка мобильного приложения A&D Connect (App Store)

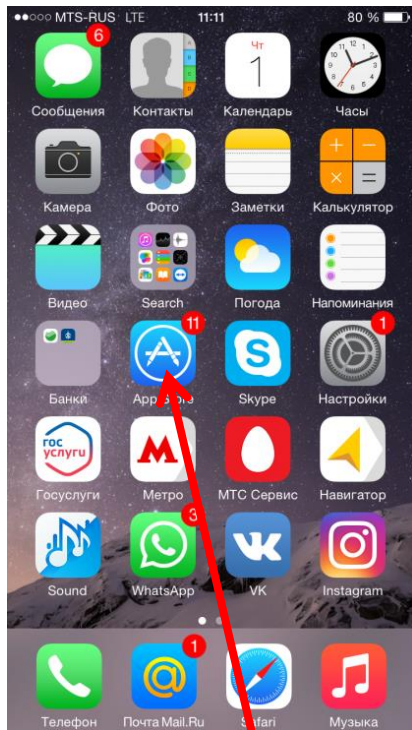


Открываем приложение
App Store

1

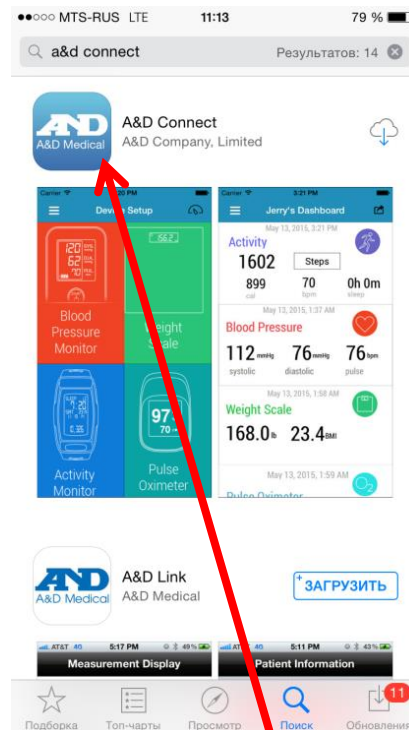

В поисковой строке набираем название программы A&D Connect. Нажимаем на иконку приложения A&D Connect
Важно! Если приложение не отображается в поиске, значит Ваше устройство не поддерживает его. Вы можете написать о данной проблеме в форму обратной связи <https://telemedicine-and.ru/contacts/>


2

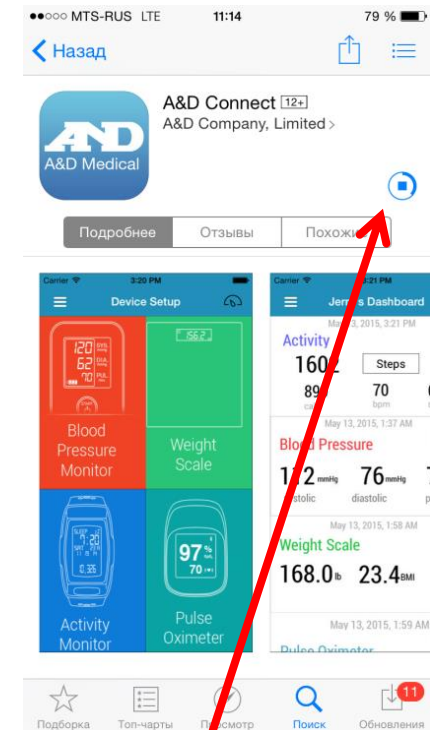

В окне приложения нажимаем кнопку «Загрузить» и «Установить» и ожидаем скачивание и установку программы пока не появится кнопка «Открыть». После установки нажимаем кнопку «Домой»


3

2. Включение Bluetooth

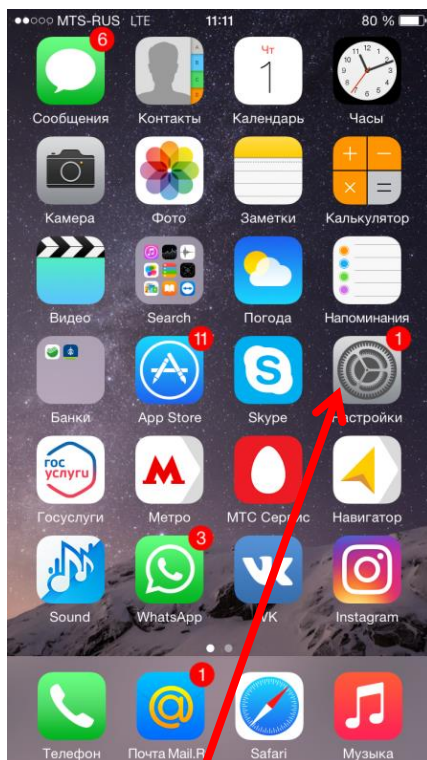


Заходим в раздел
«Настройки»

1

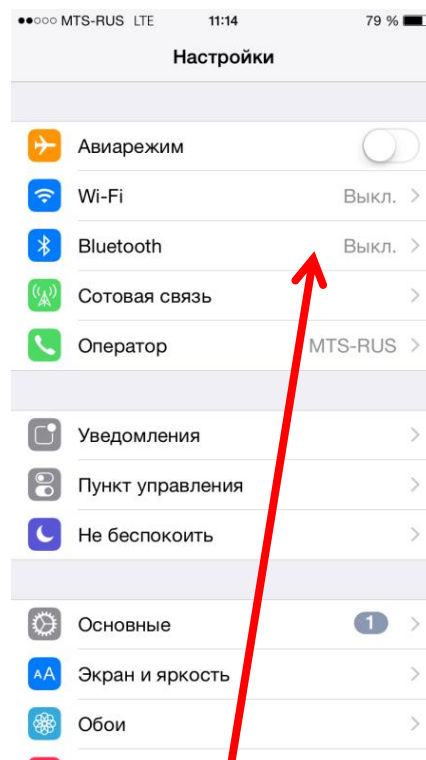


Выбираем пункт
Bluetooth

2

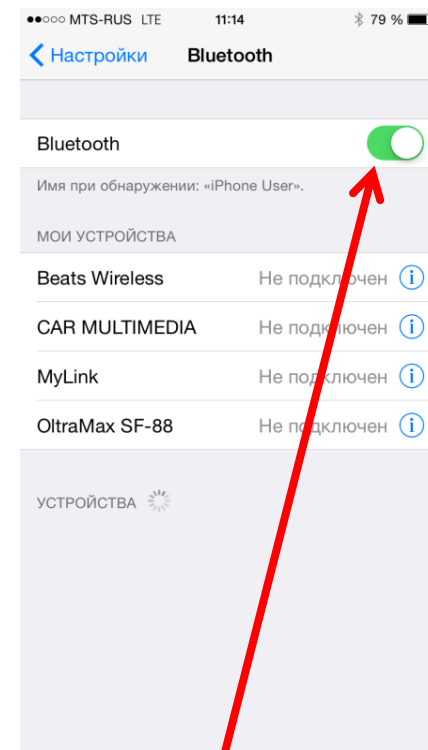


Делаем индикатор Bluetooth
активным. После установки
нажимаем кнопку «Домой»

3

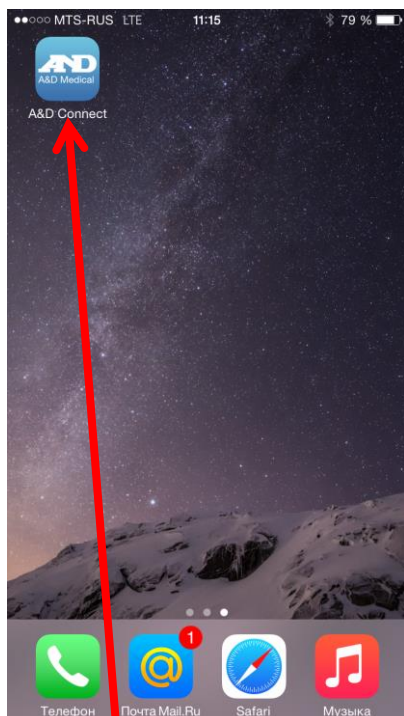


Открываем приложение A&D Connect

1

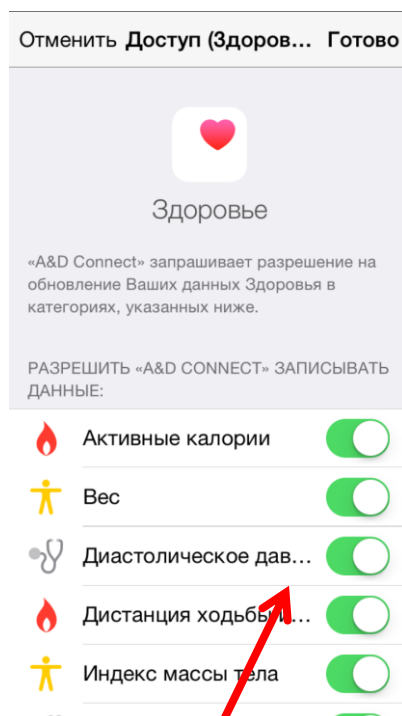

Приложение «Здоровье» (только на версиях iOS 8 и выше) запросит Вас о возможности синхронизации данных с приложением A&D Connect. Отметьте необходимые Вам данные (данное окно открывается при первом запуске программы) и нажмите «Готово»


2

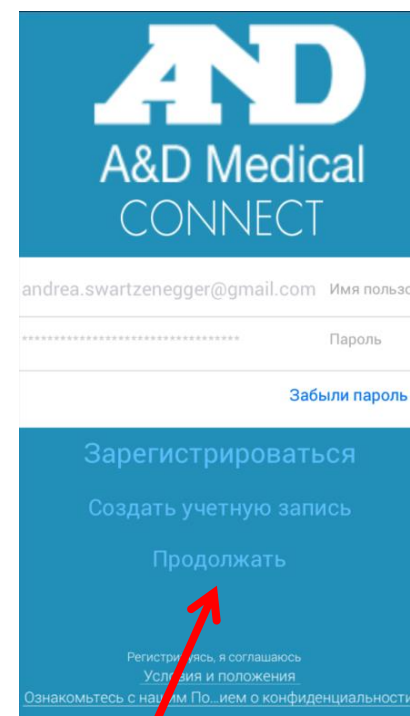

После совершенных шагов Вы окажетесь на главном окне приложения


3

4. Регистрация в мобильном приложении

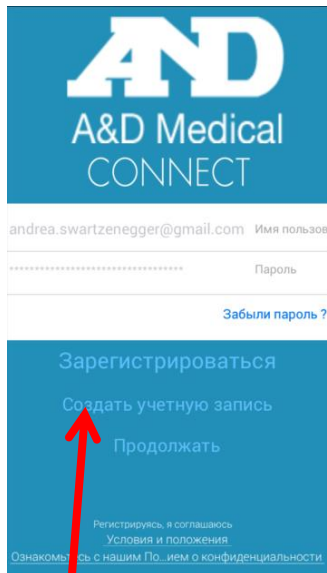


1

Если у Вас нет учетной записи, нажмите «Создать учетную запись». Также можно использовать приложение без учетной записи нажав кнопку «Продолжить»

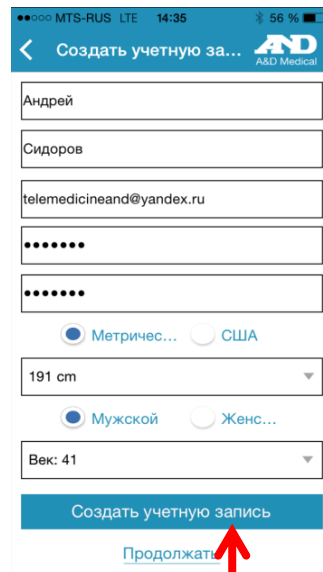


2

Заполните все необходимые поля и нажмите внизу экрана «Создать учетную запись»

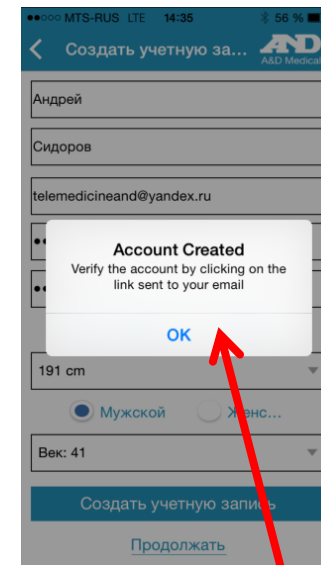


3

В случае успешного заполнения полей на Ваш почтовый адрес будет отправлено письмо для подтверждения Вашего аккаунта

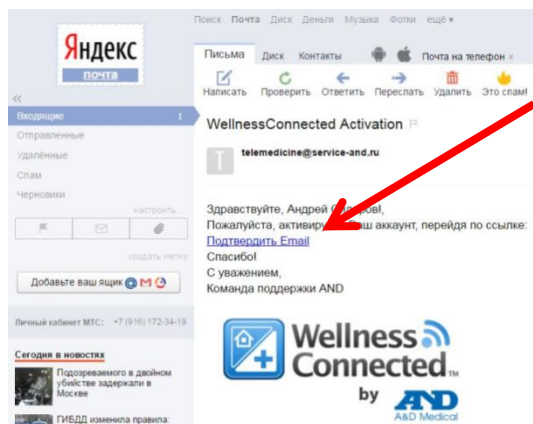


На Ваш почтовый ящик придет письмо от telemedicine@service-and.ru с подтверждением Вашего аккаунта. Нажмите на «Подтвердить Email» Важно! В случае если после нажатия на ссылку появится ошибка в символах, нужно будет нажать на Back to A&D Medical. Ваш аккаунт будет подтвержден

4

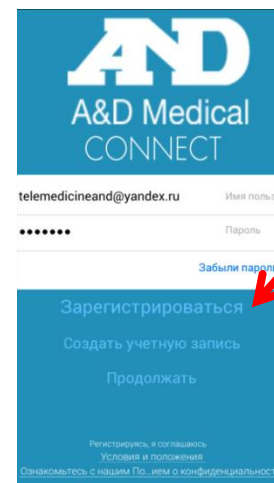

После успешной активации Вашего аккаунта Вы сможете использовать Ваше Имя пользователя (e-mail) и пароль для входа в учетную запись в мобильном приложении (кнопка Зарегистрироваться) и на сайте <http://telemedicine-and.ru/> Важно! Если Ваш аккаунт не зарегистрировался, Вы можете написать о данной проблеме в форму обратной связи <https://telemedicine-and.ru/contacts/>. С Вами свяжется наша служба поддержки


5

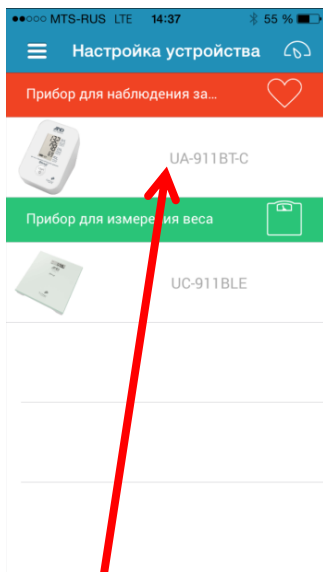


1 Подготовьте тонометр UA-911BT-C. Нажмите в приложении на кнопку «Прибор для измерения АД UA-911BT-C»




2 Убедитесь что Bluetooth включен на Вашем устройстве.

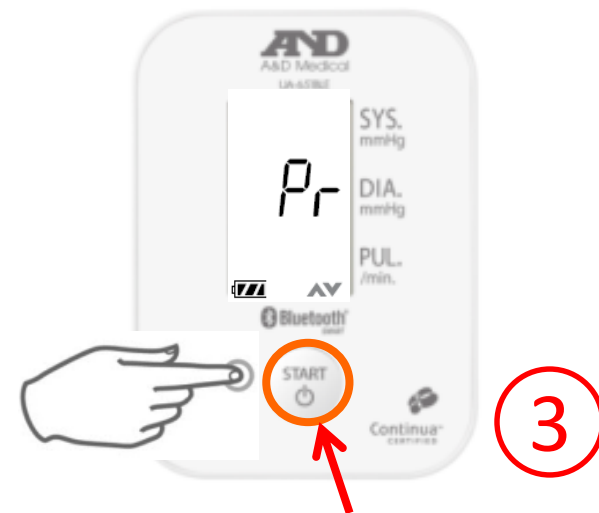

3 Нажмите и удерживайте кнопку «Старт» пока не увидите Pr на экране тонометра.

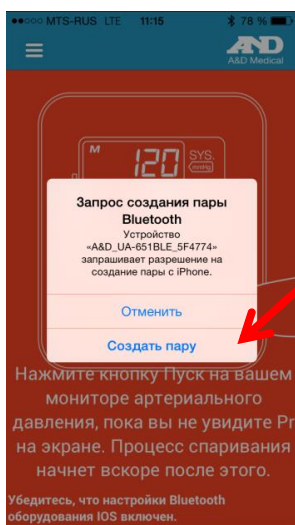


4 После соединения с тонометром появится окно «Запрос на соединение пары Bluetooth». Нажимаем кнопку «Создать пару»

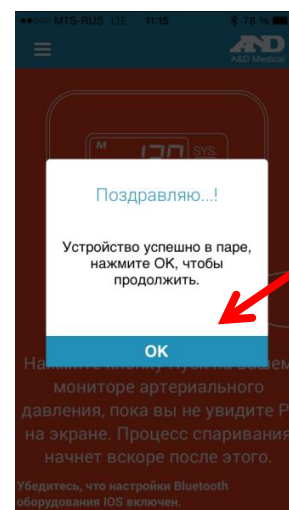

5 Устройство успешно подключено. Нажимаем ОК и переходим в «Панель управления». Дождитесь пока на экране тонометра появится символ «End» Важно! После первого подключения устройства таким способом, необходимо просто делать измерения на тонометре. Данные будут передаваться автоматически. Повторно проходить процедуру подключения не нужно


6. Результаты работы прибора и приложения после измерений

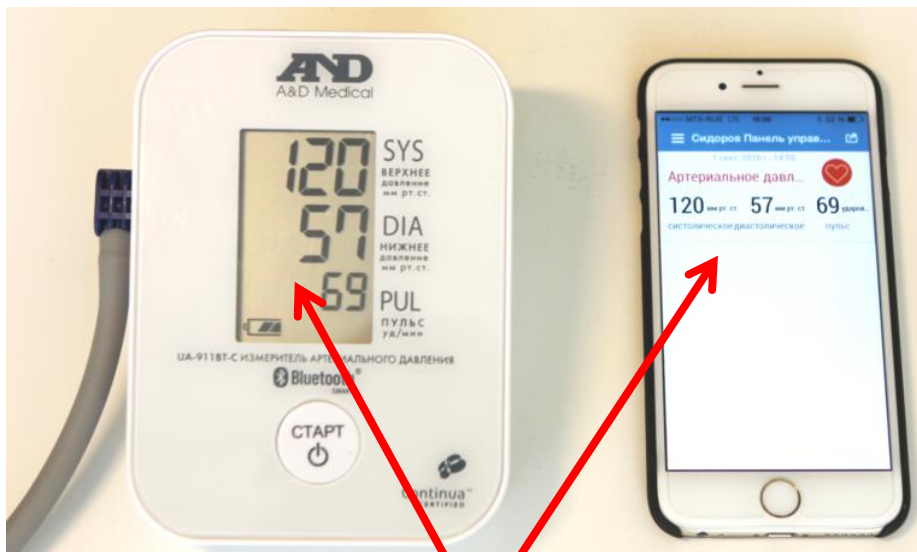

Откройте «Панель управления» на своем устройстве и сделайте измерение на тонометре. Данные передадутся на смартфон автоматически.


Если Вы зашли под своей учетной записью, то после измерения и передачи данных на смартфон Вы сможете посмотреть свои результаты в медкарте на сайте **telemedicine-and.ru**

Важно: данные передаются только при открытом окне приложения «Панель управления»

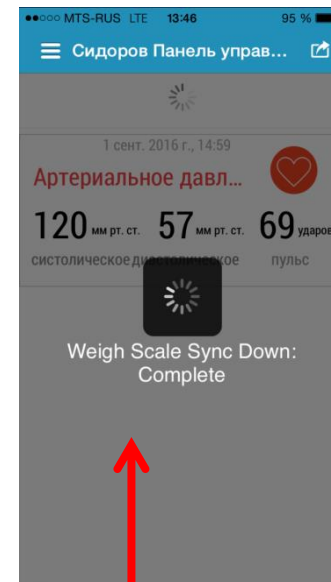

Для отправки данных в медкарту на панели управление необходимо смахнуть экран вниз, пока экран не потемнеет и начнет мигать круг. Через 1 минуту данные отобразятся в Вашей медкарте

7. Главное окно приложения A&D Connect

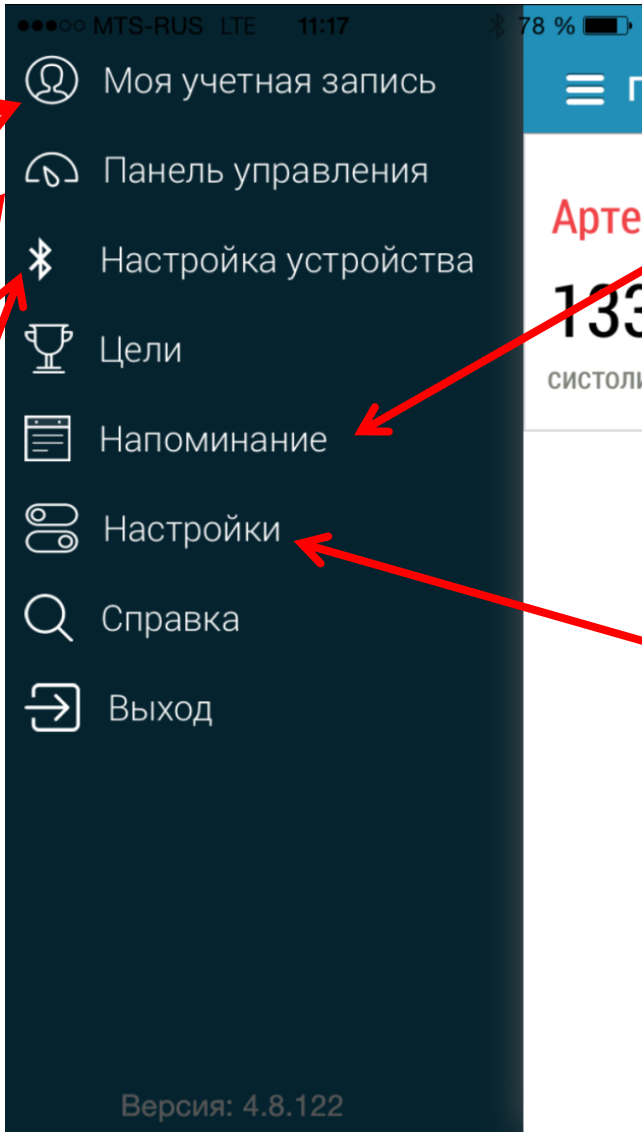

Учетная запись. Вы можете изменить свои данные.

Панель управления

Настройка устройства

Цели

Напоминание

Настройки

Справка

Выход

Версия: 4.8.122


Установка напоминаний поможет Вам не забывать совершать измерения (более подробно на следующей странице)

В панели управления Вы можете получать данные с прибора, смотреть графики, статистику, формировать отчеты и экспортировать данные.


В Настройке устройства Вы можете подключить тонометр к своему смартфону

В пункте Настройки Вы сможете подключить учетную запись Microsoft Health Vault и синхронизировать свои данные с личной страницей на портале.


8. Установка напоминаний и экспорт данных

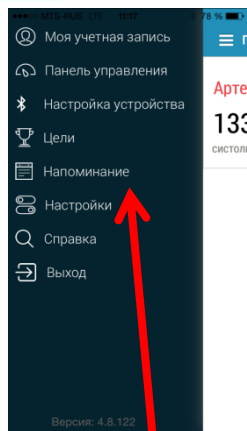


Нажмите в главном окне «Напоминания»

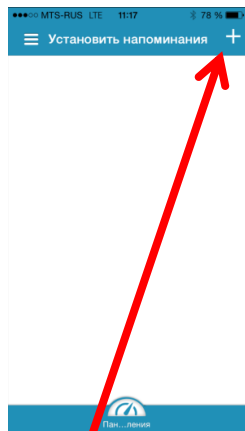


Чтобы добавить напоминание нажмите «+»

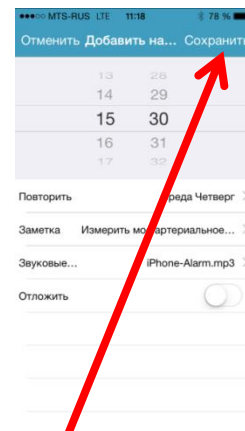


Настройте необходимые параметры и нажмите «Сохранить»

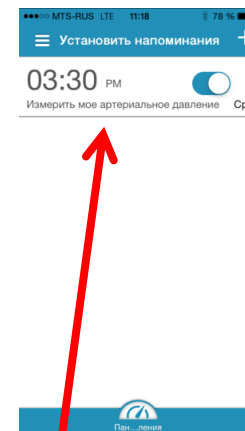


Напоминание добавлено

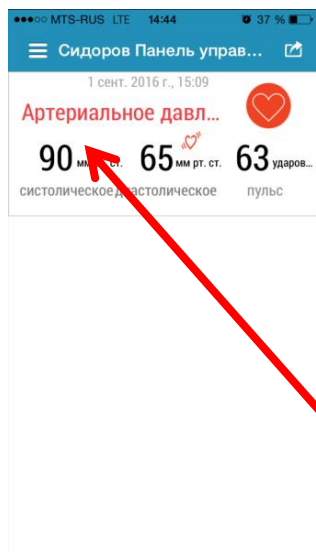

После измерения в «Панели управления» нажмите на красное сердце или надпись «Артериальное давление»

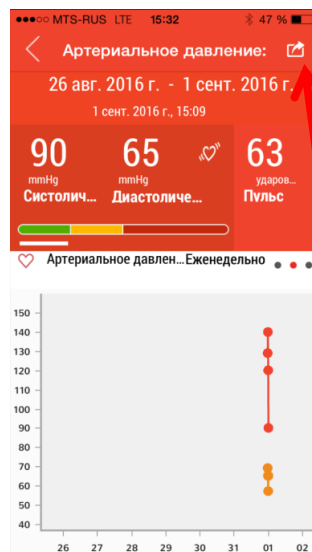


Для экспорта данных нажмите на значок в правом верхнем углу экрана

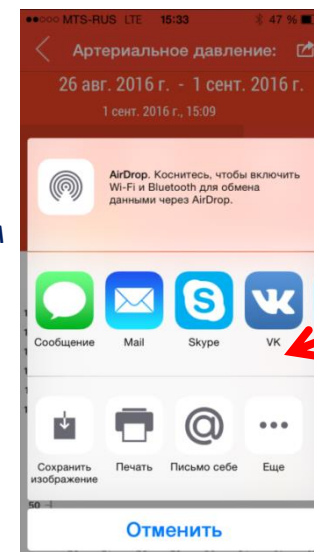

Выберите подходящий для Вас способ экспорта Ваших данных

9. Как найти сайт в интернете?

Чтобы найти сайт по Телемедицине в интернете необходимо набрать в поисковой строке браузера – **telemedicine-and.ru**

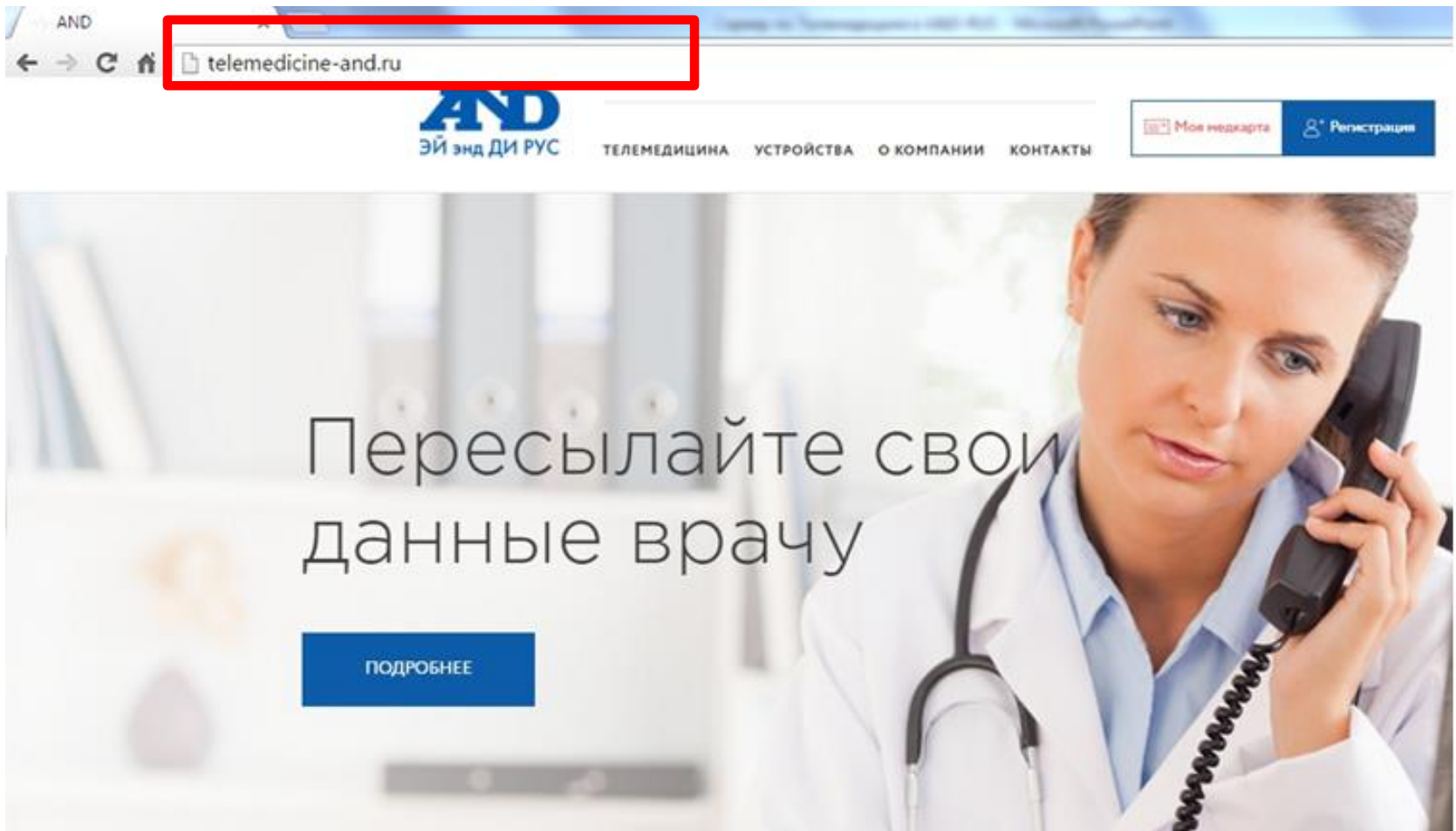


Информация о проекте
Телемедицина

Телемедицинские
устройства A&D

Информация о
компании A&D-RUS

Контактная
информация и
форма «Задать
вопрос»


Главная
страница

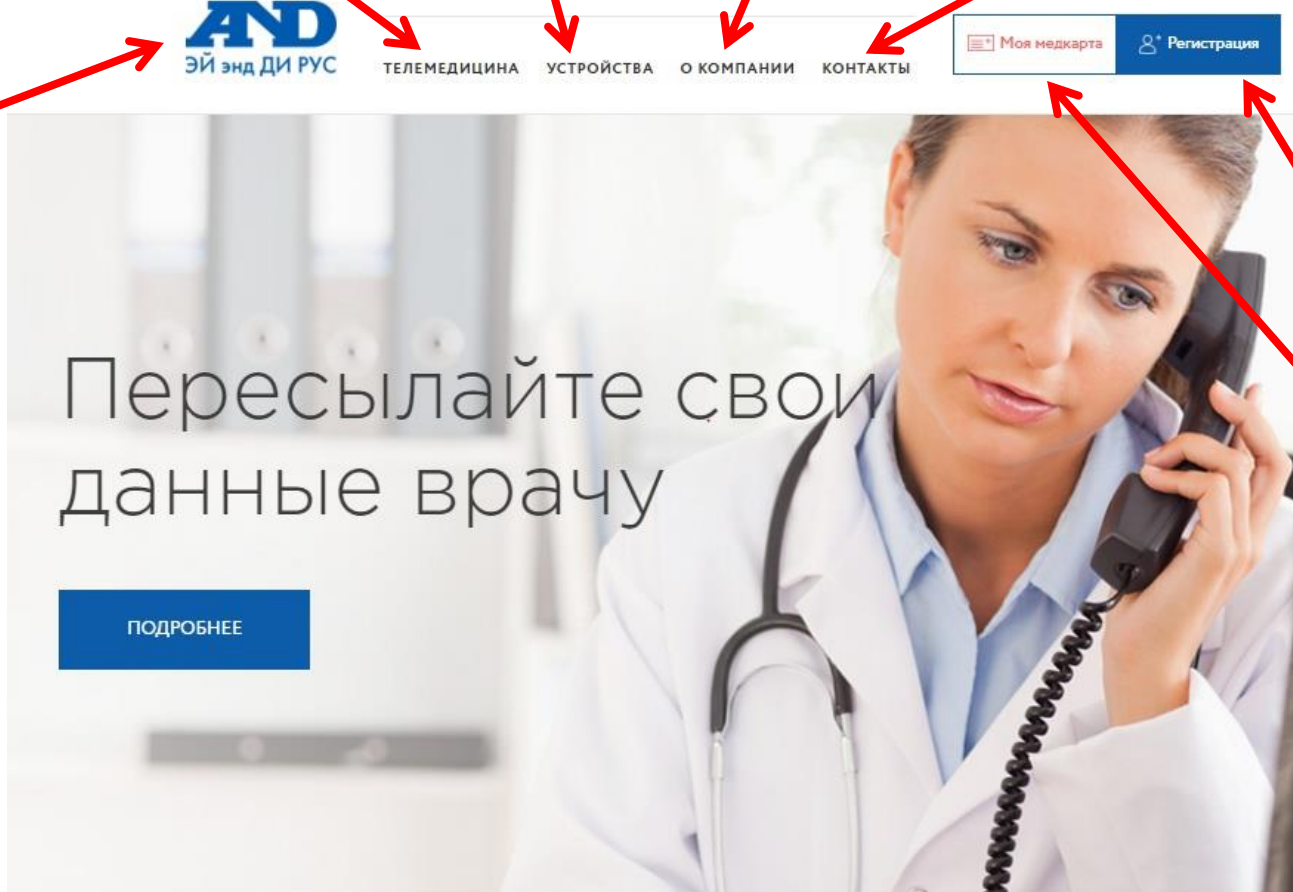

Регистрация
в Медкарте


Вход в
Медкарту

11. Как зарегистрироваться на сайте

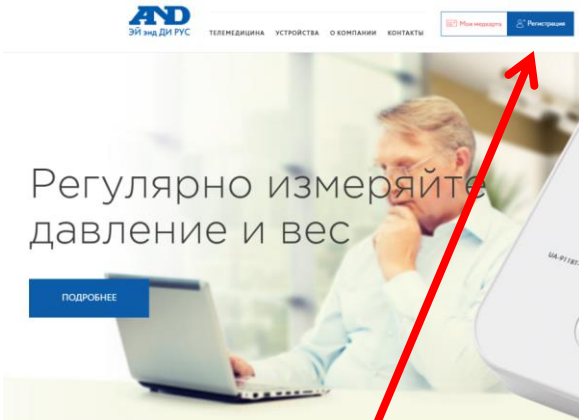


Зайдите на сайт telemedicine-and.ru и выберите пункт «Регистрация»

1

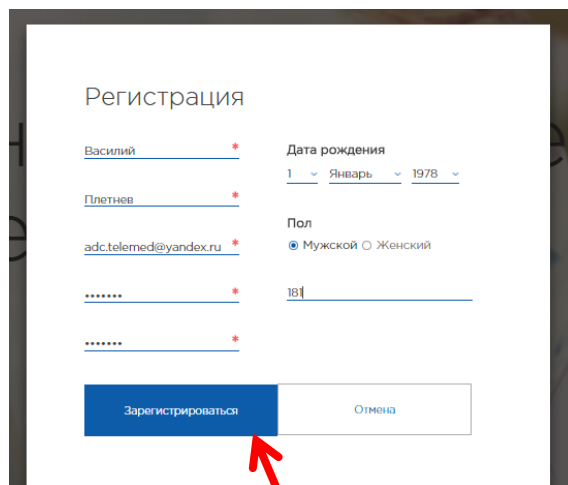


Заполните все необходимые поля и нажмите «Зарегистрироваться»

2

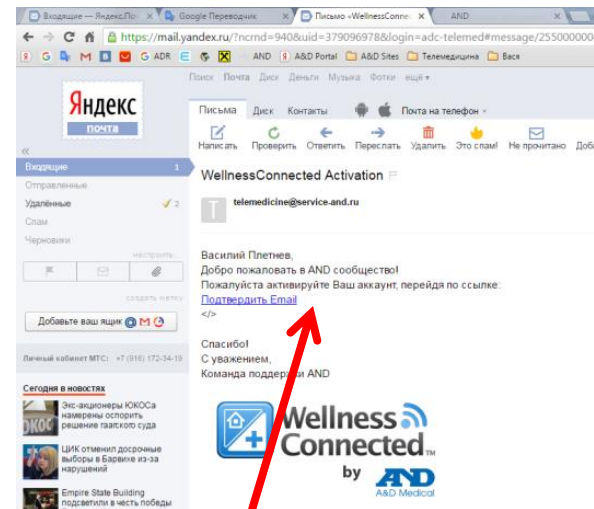

На указанную Вами почту придет уведомительное письмо об активировании Вашего аккаунта. Необходимо перейти по ссылке в письме и Ваш аккаунт будет активирован. Если письмо не пришло в Входящие, проверьте папку СПАМ

3

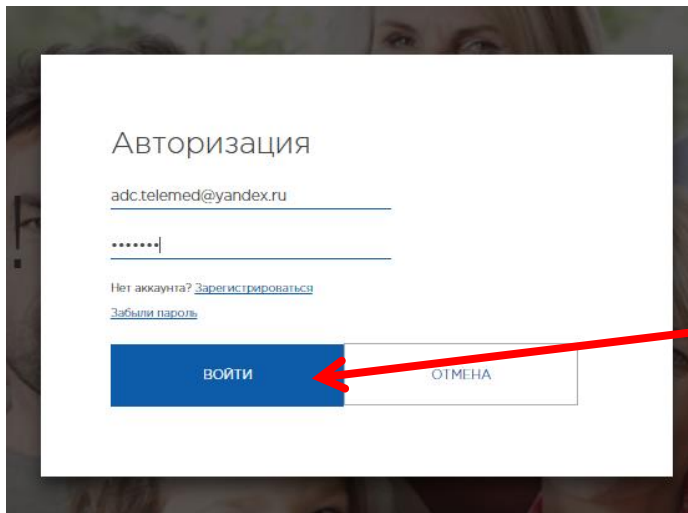


После активации аккаунта Вы сможете использовать свой логин и пароль для авторизации в мобильном приложении или на сайте

4

Добавить измерение вручную → **Анамнез – краткие сведения о Ваших последних измерениях** → **Данные об измерениях артериального давления** → **Данные о весе** → **Данные Вашего профиля** → **Статистика Ваших измерений**

Печать измерений → **Формирование PDF отчета** → **Отправка отчета на почту** → **Просмотр динамики измерений на диаграмме**

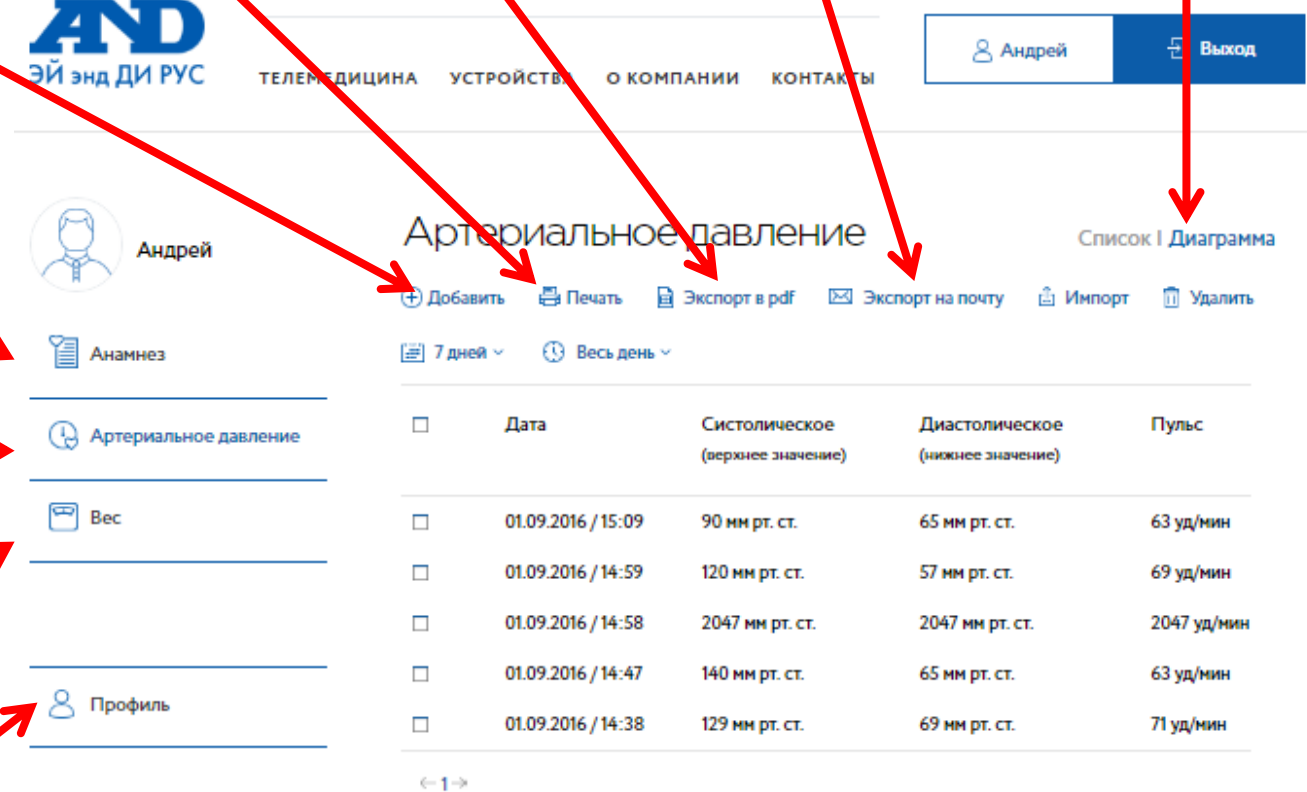

The screenshot shows the AND medical card interface for a user named Андрей. The interface includes a sidebar with navigation options: Анамнез, Артериальное давление, Вес, and Профиль. The main content area displays the 'Артериальное давление' (Arterial Pressure) section, which includes a table of measurements and a 'Статистика измерений' (Measurement Statistics) section.

Артериальное давление

Список | Диаграмма

Добавить Печать Экспорт в pdf Экспорт на почту Импорт Удалить

7 дней | Весь день

☐	Дата	Систолическое (верхнее значение)	Диастолическое (нижнее значение)	Пульс
☐	01.09.2016 / 15:09	90 мм рт. ст.	65 мм рт. ст.	63 уд/мин
☐	01.09.2016 / 14:59	120 мм рт. ст.	57 мм рт. ст.	69 уд/мин
☐	01.09.2016 / 14:58	2047 мм рт. ст.	2047 мм рт. ст.	2047 уд/мин
☐	01.09.2016 / 14:47	140 мм рт. ст.	65 мм рт. ст.	63 уд/мин
☐	01.09.2016 / 14:38	129 мм рт. ст.	69 мм рт. ст.	71 уд/мин

Статистика измерений

Количество измерений 5