




**KIT
FORT**

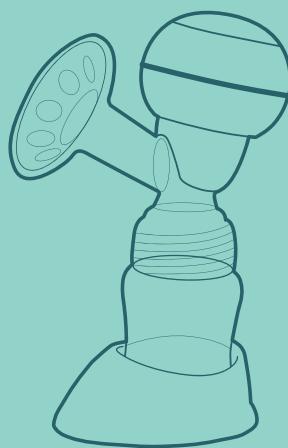

**Электрический
молокоотсос
КТ-2318**

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство молокоотсоса	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка, обслуживание и хранение молокоотсоса	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10



**KIT
FORT**

Электрический молокоотсос
КТ-2318

Общие сведения

Грудное молоко является полноценным источником питания для новорожденного. Кроме того, что материнское молоко полностью удовлетворяет потребности ребенка в витаминах и микроэлементах, оно содержит антитела, которые защищают малыша от инфекций и аллергических заболеваний.

Молокоотсос убережет вас от застойных явлений в груди (лактостаза), а также поможет собрать грудное молоко, если вы не находитесь рядом с ребенком, например, на работе. Также молокоотсос полезен для поддержания выработки грудного молока, если необходимо временно прекратить грудное вскармливание. Без индивидуальной рекомендации врача пользоваться молокоотсосом рекомендуется, когда функция грудного вскармливания полностью установится. Это бывает примерно через 4 недели после начала вскармливания.

Компактный и портативный молокоотсос КТ-2318 имеет мягкий лепестковый массажер и удобное управление. Прибор имитирует темп сосания молока ребенком и оснащен двухфазной технологией: вы можете задать два уровня интенсивности стимуляции — нежную и интенсивную. Молокоотсос поддерживает девять режимов работы.

Конструкция молокоотсоса предотвращает обратный поток молока в двигатель. Прибор удобно разбирать и мыть.

Комплектация


1. Молокоотсос в сборе — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Адаптер — 1 шт.
4. Сетевой шнур — 1 шт.
5. Соска с кольцом и крышкой — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Гарантийный талон — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство молокоотсоса



Панель управления

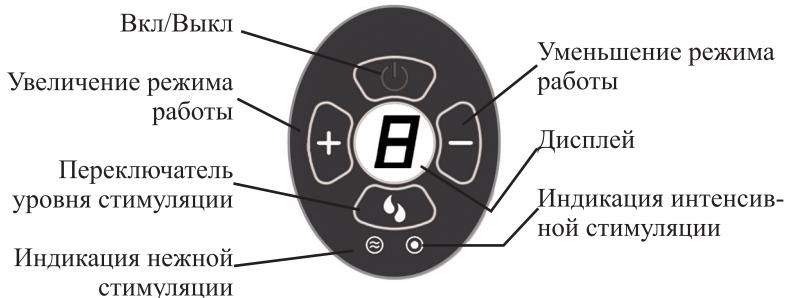

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием очистите и простерилизуйте все детали молокоотсоса, кроме блока управления и блока питания, следуя рекомендациям в главе «Чистка, обслуживание и хранение молокоотсоса». Очищайте все детали после каждого использования и стерилизуйте все детали перед использованием.



**KIT
FORT**

Электрический молокоотсос
KT-2318


Сборка

Перед сборкой молокоотсоса вымойте руки с мылом.


1. Вставьте массажную насадку (часть А) в воронку для груди и зафиксируйте ее по краю пальцами.




2. Вставьте диафрагму (часть С) в верхнюю чашку корпуса молокоотсоса (часть В) как можно плотнее. Установите блок управления и вкрутите его до упора.

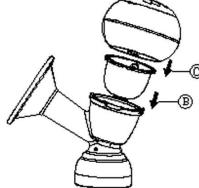


3. Установите уплотнительное кольцо (часть Е) и проточный клапан (часть D) в нижнюю часть корпуса.

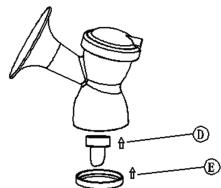

4. Вставьте бутылочку (часть F) в корпус молокоотсоса и вкрутите ее до упора.

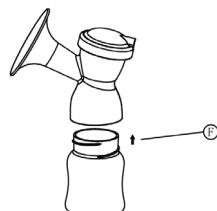


5. Установите молокоотсос на подставку.

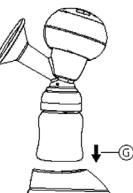


Включение

1. Подсоедините шнур адаптера питания к блоку управления.

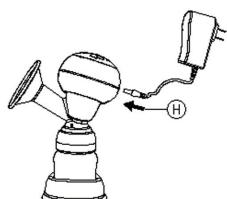

2. Подключите адаптер к сети.

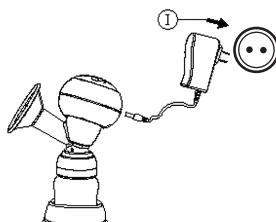

Внимание! Используйте только блок питания и шнур, поставляемые в комплекте.

Использование

Сядьте удобно и расслабьтесь. Подложите подушку для поддержки спины.

Плотно прижмите молокоотсос массажной насадкой к груди, чтобы внутрь не попадал воздух. Массажная насадка должна присосаться.

Включите молокоотсос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». По умолчанию установлен уровень нежной стимуляции, о чем будет сигнализировать соответствующий индикатор на панели управления.

Далее запустится автоматическая программа. Последовательно будут запускаться первые 5 режимов работы. Номер режима будет отображаться на дисплее.

1. Массаж длительностью 45 секунд.
2. Стимуляция длительностью 45 секунд.
3. Стимуляция длительностью 45 секунд.
4. Стимуляция длительностью 45 секунд.
5. Режим сцеживания (всасывания). Длительность режима вы определяете сами.

При достижении режима 5 автоматическая программа завершится, далее вы сможете регулировать силу всасывания кнопками «+» или «-».

Примечание. Вы можете изменить режим в любое время, нажав на кнопки «+» или «-». При этом автоматическая программа прервется.

Увеличивайте всасывание, пока не почувствуете небольшой дискомфорт. Затем слегка уменьшите всасывание. Производите сцеживание при максимально комфортном режиме.

Внимание! Сцеживание на режиме 9 создает отрицательное давление 45 кПа, что примерно равняется 0,5 атмосферы, пожалуйста, используйте этот режим с особой осторожностью.

После окончания сцеживания выключите молокоотсос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Осторожно отделите молокоотсос от груди, предварительно вставив палец под массажную насадку.

Советы

Не беспокойтесь, если молоко не появится сразу, расслабьтесь и продолжайте процесс сцеживания. Если у вас появилась боль в груди во время сцеживания, остановите процесс и обратитесь к врачу.

Не продолжайте сцеживание, если более 5 минут нет результата. Пейте больше жидкости, чтобы стимулировать производство молока.

Сначала вы должны сцедить молоко из одной груди, а затем из другой. Однако процесс сцеживания не должен превышать 7 минут для каждой груди.

Не переполняйте бутылочку.

После сцеживания ваша грудь должна быть мягкой, в ней не должно быть твердых областей. Если в груди присутствуют уплотнения, это означает, что вы не полностью сцедили молоко.



**KIT
FORT**

Электрический молокоотсос
КТ-2318

Для улучшения лактации перед использованием молокоотсоса положите на грудь на несколько минут теплую ткань или примите теплый душ.

Вы также можете сцеживать молоко во время кормления малыша, из свободной груди или использовать молокоотсос сразу после кормления ребенка.

Выработайте собственную технику сцеживания, которая наиболее удобна и эффективна для вас.

Хранение грудного молока

Температура хранения	Рекомендуемая продолжительность хранения
25 °C (комнатная температура)	До 4 часов
4 °C	До 24 часов
-18 °C (морозильная камера)	Около 3–6 месяцев

Замороженное грудное молоко следует сначала разморозить в холодильнике. Для срочного размораживания поместите бутылочку с молоком в теплую воду. После размораживания молоко можно хранить в холодильнике в течение 24 часов.

Никогда не замораживайте молоко повторно.

Для разогрева молока удобно пользоваться подогревателем детских бутылочек.

Не нагревайте молоко в микроволновой печи, так как это может разрушить ценные питательные вещества и антитела, а неравномерное нагревание может привести к «горячим зонам» внутри жидкости, которые могут обжечь горло малыша. Никогда не погружайте замороженное молоко в кипящую воду, так как бутылочка может деформироваться.

Чистка, обслуживание и хранение молокоотсоса

Протирайте блок управления сухой или влажной тканью

После использования разберите молокоотсос.

Промойте все детали, кроме блока управления и блока питания. Пластмассовые компоненты нельзя мыть в посудомоечной машине.

Осторожно промойте диафрагму и клапаны вручную. Не вставляйте что-либо в клапан во время чистки. Во время мытья не тяните и не растягивайте диафрагму и клапан.

Перед сборкой и последующим использованием полностью высушите все детали молокоотсоса на чистом полотенце или в сушилке. Накройте все детали чистым полотенцем, если планируете использовать молокоотсос снова в ближайшее время.

Храните молокоотсос в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Мойте и стерилизуйте все детали молокоотсоса перед каждым использованием. Для стерилизации рекомендуется использовать паровой стерилизатор, а не кипячение.

Устранение неполадок

Молокоотсос не всасывает

Возможная причина	Решение
Молокоотсос собран неправильно	Убедитесь, что детали молокоотсоса плотно соединены друг с другом. Проверьте, что массажная насадка плотно соединена с грудью

Молоко не поступает

Возможная причина	Решение
Установлен слишком высокая интенсивность стимуляции или слишком высокий режим сцеживания	Смените уровень стимуляции, отрегулируйте режим сцеживания. Если это не помогает, проконсультируйтесь с врачом

Технические характеристики

1. Блок питания: AC 100–210 В, 50/60 Гц / DC 5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Размер прибора: 164 × 94 × 221 мм
5. Размер упаковки: 170 × 100 × 233 мм
6. Вес нетто: 0,46 кг
7. Вес брутто: 0,51 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован.



Производитель: Производитель: Фошань Шуньдэ Лонсан Илектрикал Эплайнс Ко., Лтд. 2-1 ХуаньШань Вест Роуд, Наньпу, Джунъян Таун, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, оф. 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, оф. 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru



**KIT
FORT**

Электрический молокоотсос
KT-2318

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте молокоотсос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите молокоотсос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не используйте молокоотсос в ванной комнате.



Электрический молокоотсос
КТ-2318

11. Не оставляйте и не храните молокоотсос во влажной среде.
12. Не используйте молокоотсос во время сна или в сонном состоянии.
13. Молокоотсос – индивидуальный прибор. Использование молокоотсоса несколькими людьми представляет риск для здоровья.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенько!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

