

SUPRA



Руководство по эксплуатации
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ
MBS-112

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение массажера SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если массажер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Содержание

Меры предосторожности.....	3
Комплектация.....	4
Назначение массажера.....	4
Преимущества массажера с функцией миостимуляции.....	4
Устройством массажера.....	5
Питание массажера.....	5
Эксплуатация массажера.....	5
Чистка и уход.....	6
Устранение неисправностей.....	7
Безопасная утилизация.....	7
Технические характеристики.....	7



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием массажера полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

Массажер предназначен для массажа отдельных частей человеческого тела в домашних условиях. Запрещается использовать массажер в коммерческих целях.

Используйте прибор только по его прямому назначению таким образом, как указано в руководстве.

Запрещается разбирать и каким-либо образом изменять прибор.

Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Запрещается подвергать массажер и патчи для борьбы с жировыми отложениями воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, влажности, пыли или агрессивных веществ. Следите, чтобы внутрь корпуса массажера не попадала вода.

В случае загрязнения протрите массажер сухой мягкой тканью.

Запрещается погружать массажер в воду или использовать для его чистки агрессивные вещества.

Запрещается полностью погружать патч в воду, в противном случае им уже невозможно будет пользоваться и нужно будет приобретать новый.

Запрещается мыть патч горячей водой или применять для его очистки какие-либо чистящие средства.

Храните массажер и патчи для борьбы с жировыми отложениями в недоступном для детей месте.

Запрещается пытаться самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении каких-либо неисправностей обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра производителя.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.



ВНИМАНИЕ:

Патчи для борьбы с жировыми отложениями должны плотно прилегать к коже. Если во время процедуры массажа вы почувствовали себя плохо, ощущаете удары током или испытываете другие неприятные ощущения, немедленно прекратите использование массажера.

Запрещается использовать массажер при наличии следующих противопоказаний: использование кардиостимулятора или других электронных устройств медицинского назначения, искусственное сердце, онкологические заболевания, беременность, менструация, температура выше 38°C, кожная аллергия, кожные заболевания.

При наличии заболеваний сердца запрещается использовать массажер близко к сердцу.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Массажер
- Патчи для борьбы с жировыми отложениями
- Кабель USB
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

НАЗНАЧЕНИЕ МАССАЖЕРА

Появление данной модели, использующей микроэлектронные волны для улучшения формы тела, стало хорошей новостью для тех, кто хочет иметь красивую и стройную фигуру, но ленится или не имеет времени для физических упражнений. Используйте массажер, чтобы избавиться от жировых отложений на талии и живота. В приборе используется надежный двигатель, он обладает привлекательным дизайном, отличается простотой в использовании и хранении.

Массажер с функцией миостимуляции представляет собой устройство для пассивной тренировки тела. Использование массажера в течение 20 минут позволяет согреться и даже пропотеть без физического напряжения и без существенных затрат времени. Кроме того, массажер можно использовать в любом месте и в любое время, что очень удобно.

Массажер может работать в трех режимах миостимуляции: режим непрерывной волновой стимуляции, режим импульсной волновой стимуляции и режим периодической волновой стимуляции, при этом каждый режим имеет девять уровней. В зависимости от выбранного режима автоматическая программа генерирует безопасные биологические импульсы различной частоты и интенсивности. Эти импульсы стимулируют двигательные

нервы человеческого организма, которые в свою очередь заставляют мышцы производить колебательные движения за счет быстрых сокращений. Колебательные движения вынуждают мышцы потреблять энергию и сжигать жир. В результате постоянного использования массажера жировые отложения устраняются и формируется стройное подтянутое тело.

Воздействие микроэлектронных волн не только позволяет убрать живот и бока, но также стимулирует работу пищеварительных органов и избавляет от проблемы запоров. Используйте массажер лежа или сидя, и вы с легкостью обретете стройное и здоровое тело. Применяйте массажер на тех областях, которыми вы особенно недовольны. Сначала кожа станет более упругой и подтянутой, затем окрепнут мышцы, улучшится кровообращение и лимфоток. В результате организм также избавится от распространенных в настоящее время болей в спине, шее и плечах.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАССАЖЕРА

С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

Не требуется чья-либо помощь, которая может сделать вас зависимым от кого-либо.

Имеется три режима миостимуляции, разработанных на основе новейших технологий.

Простота и удобство в эксплуатации, эргономичные кнопки управления.


Девять уровней настройки позволяют выбрать наиболее комфортный режим.

Массажер имеет функцию автоматического отключения: через 15 минут работы, а также через 20 минут нахождения в режиме ожидания прибор выключается автоматически.

Воздействие осуществляется по всем направлениям, у прибора нет каких-либо «мертвых зон».

Без каких-либо усилий с вашей стороны, только за счет массажа, улучшается форма тела.

УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

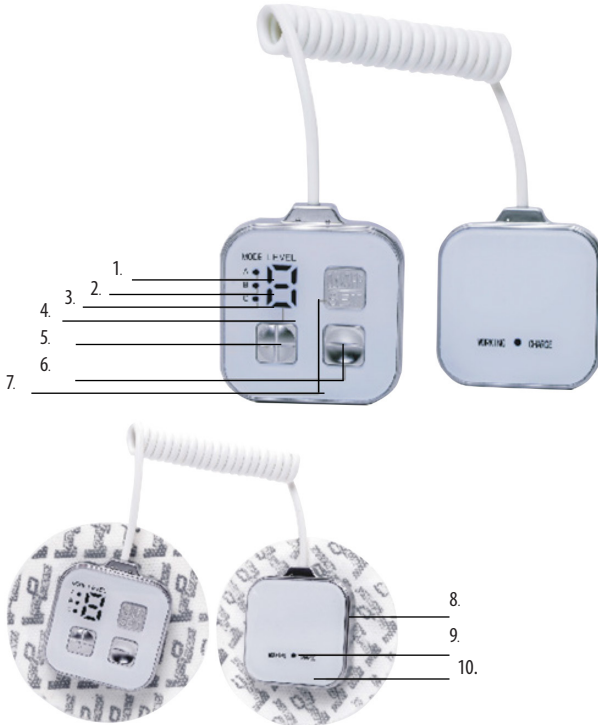

1. Индикатор А - соответствует режиму непрерывной волновой стимуляции
2. Индикатор В – соответствует режиму импульсной волновой стимуляции
3. Индикатор С – соответствует режиму периодической волновой стимуляции
4. Индикатор текущего уровня воздействия
5. +Кнопка увеличения уровня воздействия
6. - Кнопка уменьшения уровня воздействия
7. ON/OFF/SET Кнопка включения/выключения массажера / выбора режима работы
8. Патч для устранения жировых отложений (может использоваться 8-10 раз)
9. Индикатор питания/зарядки
10. Корпус массажера



ПИТАНИЕ МАССАЖЕРА

Массажер питается от встроенной аккумуляторной батареи.

В начале эксплуатации массажера вы сможете зарядить встроенную батарею только после того, как она разрядится.

Чтобы зарядить батарею, подключите один конец кабеля USB, поставляемого в комплекте, к соответствующему разъему массажера, а другой конец кабеля USB – к USB порту компьютера.

Во время зарядки батареи индикатор зарядки мигает красным светом. Когда батарея полностью зарядится, индикатор погаснет.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается избыточно заряжать встроенную батарею. Как только индикатор зарядки погаснет, отсоедините массажер от компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время зарядки встроенной батареи прибором пользоваться нельзя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖЕРА

Подготовка к эксплуатации

Очистите те части тела, на которые вы хотите воздействовать. Кожа не должна быть масляной, на ней не должно быть каких-либо загрязнений. Перед процедурой массажа рекомендуется принять душ.

На каждом корпусе массажера с обратной стороны закрепите патчи для устранения жировых отложений. Если контакт достаточно плотный, должен раздаваться характерный звук.

Снимите с каждого патча защитную пленку. Приложите обе части массажера (патчами к телу) к тем частям тела, на которые вы хотите воздействовать. Убедитесь, что контакт между патчами и кожей плотный.

Порядок работы

Нажмите кнопку ON/OFF/SET один раз, чтобы включить массажер. Загорится индикатор А, а также индикатор 1-го уровня. Массажер будет работать в режиме непрерывной волновой стимуляции на первом уровне.

Чтобы изменять режим работы массажера, последовательно нажимайте кнопку ON/OFF/SET, при этом индикаторы А, В, С будут загораться поочередно.

Чтобы изменять уровень воздействия, нажимайте кнопки +/-, соответственно будет изменяться индикация от 1 до 9. Чем выше уровень, тем большая сила тока используется во время массажа.

Через 15 минут работы массажер выключится автоматически. Если требуется выключить массажер раньше, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF/SET.

По окончании использования снимите патчи и прикрепите к ним защитную пленку. Уберите патчи и массажер в короб.

Через 30 минут после процедуры нанесите на кожу лосьон.

Части тела, на которые можно воздействовать

1. Шея и плечи.

Массаж шеи и плеч особенно показан офисным работникам для расслабления мышц шеи и плеч и для профилактики шейного спондилеза.

2. Руки

С помощью массажера можно укрепить мышцы рук, избавиться от дряблости.

3. Область живота


Массажер поможет уменьшить живот, активизировать работу пищеварения, устранить запоры, укрепить брюшной пресс. В частности подходит для мужчин, желающих избавиться от «пивного» живота.

4. Бедра

Используйте массажер для укрепления дряблых и обвисших бедер, а также для борьбы с излишними жировыми отложениями.

5. Ноги

С помощью массажера можно избавиться от лишнего жира и сделать ноги более стройными.

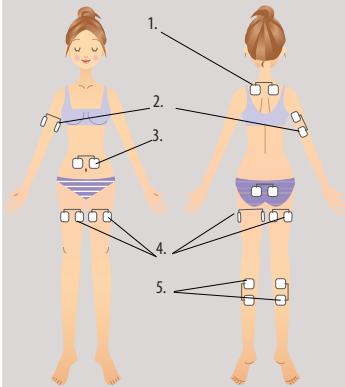

ЧИСТКА И УХОД

• Патчи для борьбы с жировыми отложениями

Запрещается подвергать патчи воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, влажности, пыли или агрессивных веществ.

Клеящаяся сторона патча должна содержаться в чистоте. Следите, чтобы на нее не попадали капли пота и, в особенности, маслянистые вещества, в противном случае они могут утратить свою эффективность или даже быть повреждены.

Если патч стал хуже приклеиваться из-за пота, промойте его небольшим количеством холодной воды. Когда патч высохнет, клеящаяся сторона восстановит свои свойства.

Запрещается полностью погружать патч в воду, в противном случае им уже невозможно будет пользоваться и нужно будет приобрести новый.

Запрещается мыть патч горячей водой или применять для его очистки какие-либо чистящие средства.

Храните патчи в местах, недоступных для детей.

• Корпус массажера

Запрещается подвергать массажер воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, влажности, пыли или агрессивных веществ. Следите, чтобы внутрь корпуса массажера не попадала вода.

В случае загрязнения протрите массажер сухой мягкой тканью.

Запрещается погружать массажер в воду или использовать для его чистки агрессивные вещества.

Храните массажер в местах, недоступных для детей.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении каких-либо неисправностей в работе прибора воспользуйтесь рекомендациями, приведенными ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно чинить массажер, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

• При нажатии кнопки ON/OFF/SET прибор не включается.

1. Если часть защитной бумаги патча оторвалась и прилипла к коже, массажер выключится автоматически.
2. Массажер не включится, если батарея разряжена. Зарядите встроенную батарею.
3. Если массажер упал в воду, то внутренние схемы могут быть повреждены в результате короткого замыкания. Если прибор падал в воду, не пытайтесь включать его, пока он полностью не высохнет.
4. Если патч использовался много раз или был поврежден, замените его новым.

• Стимуляция очень слабая.

1. Плохой контакт между патчем и кожей. Убедитесь, что патч плотно прилегает к коже.
2. Установите более высокий уровень воздействия, нажимая кнопку +.
3. Если встроенная батарея разрядилась, своевременно зарядите ее.
4. Если патч поврежден, замените его.

• Клеящаяся сторона патча слишком липкая

1. Оставьте патч в месте с повышенной влажностью, промойте патч небольшим количеством холодной воды и дайте высохнуть естественным способом.
2. При избыточном потоотделении перед использованием массажера следует вытереть пот.
3. Если патч использовался много раз и изнашился, замените его новым.

• Кожа покраснела, зуд

Эти явления могут быть вызваны слишком длительным временем воздействия. Сократите время процедуры.



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение массажера:

5 В, постоянный ток, 100 мА

Мощность: 1.15 Вт

Время зарядки встроенной батареи:

3 ч

Вес брутто: 320 г

Габаритные размеры коробки:

121x175x68 мм



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой

право вносить изменения в конструкцию, дизайн

и комплектацию товара без предварительного

уведомления.



Дата производства: 07.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Единая справочная служба:
8-800-100-3331**

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

S/N:

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____



www.supra.ru