


Алкотестер

GeoFox

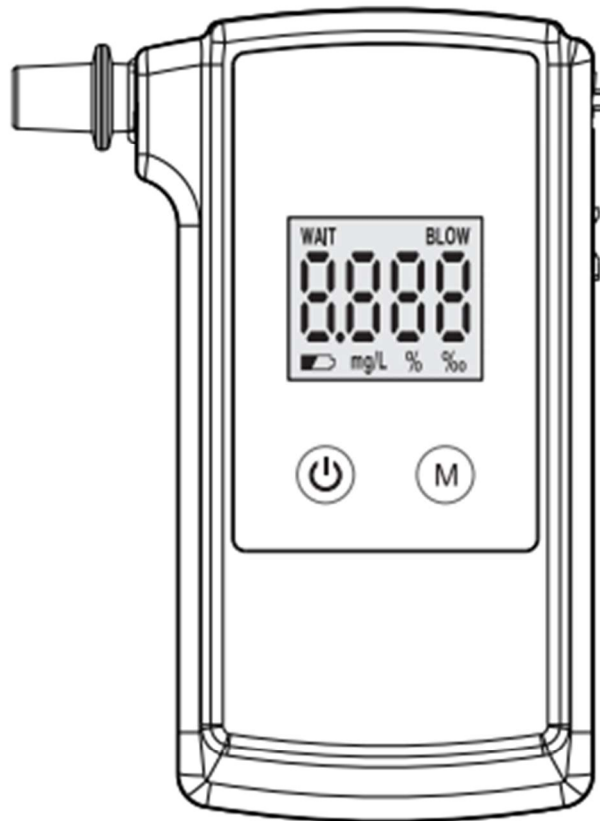

CHE 600

Содержание:

Введение	01
Правильное использование	01
Источник питания	01
Описание устройства	02
Эксплуатация	03
Аксессуары	05
Важные заметки	06
Ошибки и проблемы	07
Калибровка	08
Запись калибровки	08
Характеристики	09
Вопросы по работе сенсора	10
Меры предосторожности	11

Введение

Устройство предназначено для измерения уровня алкоголя в дыхании человека. Измерения, полученные этим устройством, используются в диагностике алкогольного опьянения.

Правильное использование


·Перед проведением тест подождите не менее 15 минут с момента последнего употребления жидкости или еды.

- ·Используйте устройство только при температуре 10°C ~ 40°C or 30°F ~ 104°F.

Источник питания

·Откройте крышку батарейного отсека на задней панели устройства.





·Вставьте 1 батарею AAA, убедившись в соблюдении полярности элемента питания «+/-».

Если мощность заряда слишком низкая, устройство отображает символ батареи  », при этом устройство может работать некорректно. Вам необходимо заменить новую батарею.

·Устройство также может работать от постоянного тока 12В в автомобиле. Не имеет функции зарядки. Питание от батареи будет прекращено при подключении к разъему постоянного тока.




Описание устройства

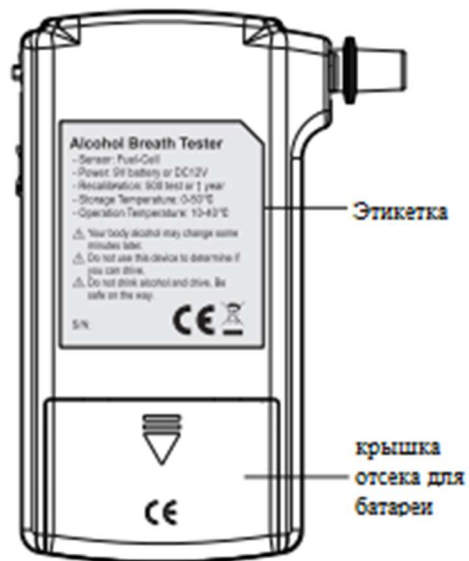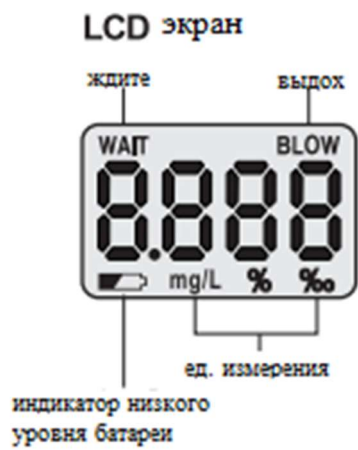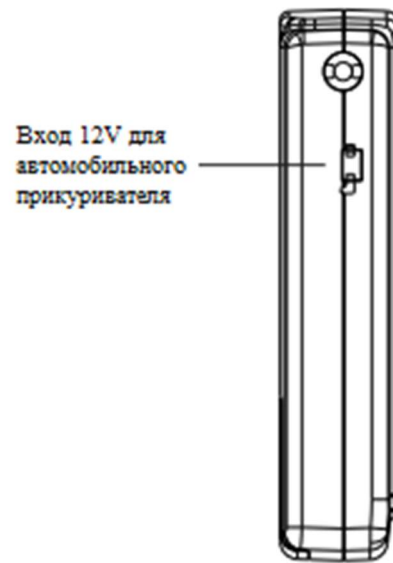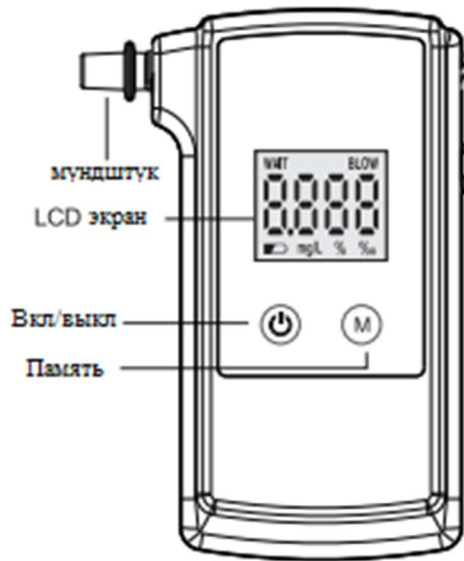


Эксплуатация

Режим тестирования


· Вставьте один из мундштуков в отверстие для выдувания.

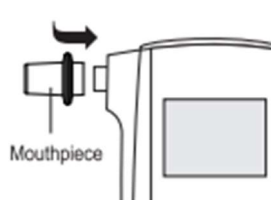

· Нажмите и удержите кнопку «Вкл» до включения устройства. После включения отпустите кнопку.

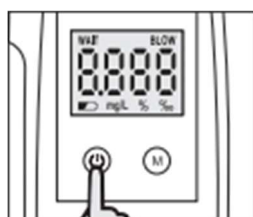


На LCD экране отобразится счетчик тестов перед началом обратного отсчета.

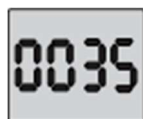

·Когда на экране отображается надпись «**WAIT**» запущен обратный отсчет 15, 14, и 13... до 0.



·Когда загорится надпись на экране «**BLOW**», и заморгает символ “С”. Сделайте глубокий равномерный выдох в мундштук пока не услышите звуковой сигнал (около 6 секунд равномерного выдоха)

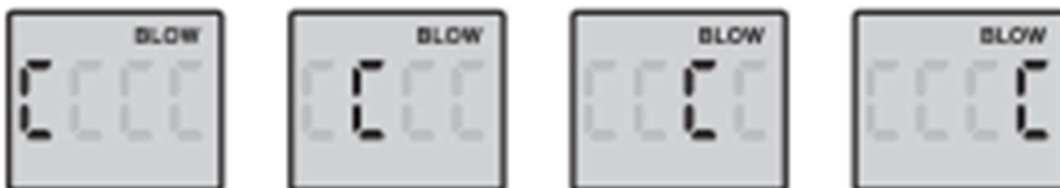

·После этого загорится на экране надпись «Wait» с мигающим 0, устройство в этот момент рассчитывает содержание алкоголя.



·Ваш результат теста будет отображаться на экране в течение 20 секунд.




· При неправильном выдохе может отображаться ошибка (Err), подробнее см. главу «ошибки и проблемы». Устройство автоматически отключится после отображения сообщения об ошибке.



Режим сохранения тестирования.

· После тестирования устройство отображает результат теста в 20 секунд, нажмите кнопку «m», чтобы проверить ваши предыдущие показатели тестов.

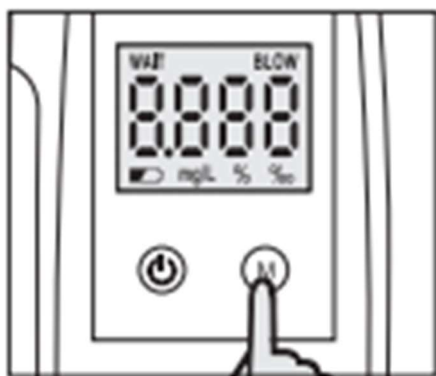

· Устройство автоматически отключится через 20 секунд.

Кнопка «m» доступна только в этом режиме.

Аксессуары

- Мундштук
- Инструкция пользователя

Важные заметки

- Перед тестированием подождите не менее 15 мин после последнего принятия еды или жидкости для правильного измерения.
- Время выдоха должно быть достаточным для тестирования и звукового сигнала окончания теста. Сделайте глубокий вдох, прежде чем начинать выдох в мундштук.
- Может показывать ошибку (ERR), если поток выдыхаемого воздуха ниже необходимого уровня, или если выдох был более короткий и был прерван. Устройство автоматически отключится после отображения ошибки.
- Перед эксплуатацией подождите несколько минут, пока температура устройства не будет соответствовать необходимой температуре эксплуатации. Если проводить тест в температурном режиме не соответствующим эксплуатационным требованиям показания могут быть некорректны, а устройство может выдавать ошибку.
- Функция вызова памяти будет доступна только после тестирования в течении 20 секунд, после чего устройство будет выключено (если не будет задействована функция памяти)
- Используйте устройство только при температуре 10°C ~ 40°C or 30°F ~ 104°F.
- Data порт используется только в заводских условиях
- Рекомендуется использовать щелочную батарею повышенной емкости.
- При подключении питания от автомобильного гнезда, питание от батареи прекращается, функция зарядки сменных батарей отсутствует.
- Интервал повторной калибровки: 12 месяцев или 500 тестов.
- Никогда не храните устройство в помещении с агрессивными газами.
- Никогда не храните устройство под прямыми лучами солнца
- Не роняйте устройство и не подвергайте его сильным ударам.
- При превышении уровня алкоголя, воздержитесь от вождения транспортного средства.

Сообщение об ошибке или проблемы	Описание	обозначения
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> - Нажмите и удерживайте кнопку ТЕСТ до включения устройства; - Проверьте батарею и используйте только щелочную батарею. - проверьте подключение к зарядке автомобильного прикуривателя. 	
Автоматическое отключение	<p>Низкий заряд батареи</p> <p>Тестирование завершено</p>	
Hi	<ul style="list-style-type: none"> - Содержание алкоголя в крови выше диапазона отображения. - Диапазон отображения: 1.00mg/L BrAC (2.00‰ BAC, 0.200‰ BAC) 	
Err	<ul style="list-style-type: none"> - Слабый поток выдуваемого воздуха - Выдох менее 6 секунд - в режиме тестирования не произведен выдох <p>При несоблюдении рекомендуемой температуры эксплуатации, или при резком изменении температуры. Предлагается подождать пока устройство достигнет рекомендуемой температуры.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> -Индикация низкого заряда батареи -Нужно заменить батарею -Используйте только щелочную батарею 	
Звуковой сигнал	<ul style="list-style-type: none"> - Сообщение об ошибке - При достижении пограничного режима допустимого уровня алкоголя 	

Электрохимический датчик (датчик топливных элементов)

·Время выдоха около 7 секунд

Выдох около 10л/мин

Обнаружение прерывание выдоха.

Экран тестера для отображения 4-значного номера с индикацией состояния и подсветкой

- Диапазон определения: 0.000-0.400%ВАС(4.00‰ или 2.00mg/L)
- Диапазон отображения: 0.000-0.100%ВАС(1.00‰ или 0.50mg/L)
- На экране отображается “НІ” если превышен диапазон отображения.
- Точность: +/-0.005% при 0.05%
- 5 мундштуков в комплекте
- Время прогрева устройства: 15 секунд
- Время тестирования: 10 секунд
- Повторный тест: около 60 секунд
- Аудиосигнал при превышении допустимого уровня алкоголя.
- Индикация 4-х строчный LCD экран с подсветкой
- Питание: 9V щелочная батарея (не поставляется в комплекте)
- Батарея для стандартного теста около 500 раз.
- Индикация низкого уровня батареи
- температура эксплуатации: 10° C ~ 40° C or 50° F ~ 104° F
- счетчик проведения тестов с звуковым предупреждением о необходимости перекалибровки.
- повторная перекалибровка: каждые 12 месяцев или 500 тестов.
- датчик давления воздуха и прерывания потока.
- Размер: 126x68x26 mm

Вам следует калибровать алкотестер каждые 12 месяцев или после 500 тестов. Невыполнение этого требования может привести к тому, что ваши показания будут неточными.

Меры предосторожности

·Содержание алкоголя в крови может измениться через несколько минут.

·Не используйте это устройство, чтобы определить, можете ли вы управлять автомобилем.

Вы не можете использовать результаты испытаний в суде.

·Вы не можете использовать результаты теста в правоохранительных органах

Гарантия

ГАРАНТИЯ для конечного потребителя 1 год, или 500 вдохов

Для дилеров гарантия 18 месяцев с момента отгрузки товара.

Мы гарантируем, что это устройство не будет иметь заводских дефектов. И материалов выходящих из строя при нормальном использовании в течении гарантийного периода ОДИН (1) год с даты розничной покупки, или 18 месяцев с момента отгрузки дилеру при хранении на складе.

Гарантийный срок не включает услуги перекалибровки. Гарантия не распространяется на устройство используемые не по назначению, и с нарушениями правил эксплуатации.

Если проявляется скрытый дефект, и мы получим заявление с описанием дефекта, гарантийный талон и чек подтверждающий покупку у нашего дилера, мы можем:

- (1) Отремонтировать устройство,
- (2) Заменить устройство, которое является новым и используется по правилам эксплуатации.

Тех. обслуживание

Ремонт / техническое обслуживание алкотестера должен выполняться только квалифицированным специалистом из нашего авторизованного Сервисного Центра. Только оригинальные запчасти могут использоваться для технического обслуживания.

Технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Имя покупателя		Дата покупки	
Модель продукта		Контактный номер	
№ продукта		E-mail	

Подпись покупателя _____

Продавец	
Адрес продажи	
Контактное лицо	Контактный номер

Наша организация уполномочила дилера подписать и поставить печать, после этого гарантия вступает в силу.

ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЯ ИМЕЕТ СИЛУ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОМ ЗАПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА