

MAMA TEST

УДОБНО! БЫСТРО! ТОЧНО!

MAMA TEST

Ультрочувствительный струйный тест для ранней диагностики беременности MAMATEST

Он обладает очень высокой чувствительностью и рекомендован для применения уже за 2-4 дня до предполагаемого начала менструации. Чувствительность от 10 мМЕ/мл ХГЧ, достоверность 99%.

Струйные тесты и тест-полоски для определения беременности MAMATEST изготовлены из высококачественных материалов и дают четкий, хорошо видимый результат.

Тест-полоски для определения беременности MAMATEST

обнаруживают присутствие в моче беременной женщины особого гормона – хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Вскоре после оплодотворения яйцеклетки развивающаяся плацента начинает вырабатывать этот специфический гормон. На 6-8 день после зачатия концентрация ХГЧ в крови достигает 25 мМЕ/мл; в моче концентрация ХГЧ достигает уровня, на котором можно его диагностировать, на день-два позже, то есть на 7-10 день беременности.

На тест-полоску нанесены реагенты, которые при взаимодействии с мочой, содержащей ХГЧ, дают окрашивание, и в тест-зоне появляется четкая цветная полоса. Данную тест-систему рекомендуется использовать утром, так как именно в утренней порции мочи концентрация ХГЧ наиболее высока. Если результат теста кажется сомнительным, рекомендуем Вам приобрести набор из двух тест-полосок для определения беременности MAMATEST и провести два тестирования с интервалом в 2 дня. На протяжении первых недель беременности концентрация ХГЧ в моче удваивается каждые 48 часов, и результат с каждым днем становится более явным и четким.



Ультрочувствительный струйный тест для ранней диагностики беременности MAMATEST

отличается более сложным устройством, при этом он более чувствителен и прост в применении. Его можно использовать в любом месте, просто подставив приемный конец тест-устройства под струю мочи, и через несколько минут получить результат. Внутри устройства находится стержень, состоящий из множества волокон. Моча поднимается по стержню от приемного конца к тест-зоне, в которой находятся реагенты, закрепленные на латексных частицах. Если в моче находится ХГЧ, то он взаимодействует с реагентами, и в тест-зоне появляется цветная полоса. Поскольку этот тест является более чувствительным, его можно использовать в течение всего дня, а не только утром.



Если тест на беременность дал положительный результат, обязательно посетите Вашего гинеколога. В случае если тест дал отрицательный результат, но месячные по-прежнему задерживаются, обратитесь к гинекологу, а также к врачу-эндокринологу для выявления причин нарушения менструального цикла. При получении неожиданных или противоречивых результатов также обратитесь к врачу.

ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

Инструкция по использованию ультрачувствительного струйного теста для ранней диагностики беременности MAMATEST®

Чувствительность теста 10 мМЕ/мл ХГЧ, достоверность 99%.

Надежная диагностика беременности **уже за 2-4 дня до предполагаемого начала менструации.**

Получение результата в течение 3-5 минут.


Содержимое упаковки: одно тест-устройство в индивидуальной упаковке, содержащей пакет с абсорбентом; инструкция по использованию.

Способ применения: тестирование производить при комнатной температуре. Вскрыть индивидуальную упаковку, достать тест-устройство. Пакет с абсорбентом выбросить.

Снять защитный колпачок с наконечника, помеченного стрелкой, подставить наконечник под струю мочи на 10 секунд, держа тест почти вертикально и следя, чтобы моча не попала на другие области теста, затем закрыть наконечник защитным колпачком. Положить тест-устройство на ровную поверхность. Через **3-5 минут** оценить результат.

Внимание! По прошествии 6 минут результат оценивать нельзя.

Оценка результата: С – контрольная зона, Т – тест-зона

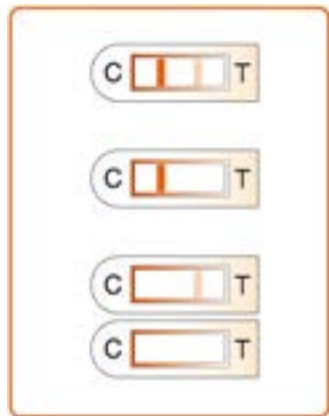

Вариант 1: Одна полоска в контрольной зоне, одна полоска в тест-зоне: результат положительный (с наибольшей вероятностью **Вы беременны**).

Вариант 2: Одна полоска в контрольной зоне, тест-зона пуста: результат отрицательный (с наибольшей вероятностью **Вы не беременны**).


Вариант 3: Контрольная зона и тест-зона пусты, либо появилась одна полоска в тест-зоне: результат неверен, тест проведен неправильно. Повторите тестирование.


Меры предосторожности

Не оценивать результаты теста по прошествии 6 минут.


Не использовать тест-устройства с истекшим сроком годности.


Не использовать тест-устройства с нарушенной индивидуальной упаковкой.

 Тест-устройство предназначено только для одноразового использования.

 Не принимать вовнутрь составные части тест-устройства и абсорбирующее вещество. Держать вне доступа детей.

Условия хранения

 Тест-устройство хранить в индивидуальной упаковке при температуре от 4 до 30°C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.

 Производитель: Беромед ГмбХ Хоспитал Продактс® (Beromed GmbH Hospital Products®), Кроненштрассе 19, 10117 Берлин, Германия (GERMANY).

Импортер 1: ООО «ВАРИАНТ», С.-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, лит. X., тел. +7 812 718 75 14

Импортер 2: ООО «ДжиЭс Медикал», С.-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, корп. 1, лит. А, тел. +7 812 332 41 47

Импортер 3: ООО «Медилюкс фарм», Минск, пр. Победителей, д. 5, оф. 1а, тел. +375 17 203 29 94

 IVD IN VITRO DIAGNOSTIC

 0537

www.mama-test.com

Пер. удостоверение № ФСЗ 2007 / 00902 от 24 декабря 2007 г.

13501-1211