

MAMA TEST

УДОБНО! БЫСТРО! ТОЧНО!

MAMA TEST

Тест для определения овуляции в домашних условиях MAMATEST®

гарантирует точность и быстроту получения результата.
Чувствительность от 25 мМЕ/мл ЛГ, достоверность **свыше 99%**.

Вы решили родить ребенка, дать жизнь Вашему малышу!

Это одно из самых важных событий в Вашей жизни, но, к сожалению, иногда забеременеть бывает непросто: для этого нужно выбрать подходящее время.

Тест для определения овуляции MAMA TEST® поможет подобрать дни, когда зачатие наиболее вероятно. В середине менструального цикла приближается время овуляции: выхода созревшей и готовой к оплодотворению яйцеклетки из яичников. В этот период в организме женщины резко возрастает количество ЛГ – лютеинизирующего гормона, или «гормона фертильности».

Тест для определения овуляции MAMA TEST® – это быстрый и простой в использовании тест для определения момента увеличения количества лютеинизирующего гормона (ЛГ) в женском организме.

Форма выпуска: набор из 5 диагностических тест-полосок.

Этот набор позволяет проводить ежедневное тестирование в течение 5 дней, что позволит лучше подобрать время для зачатия.

Если после попытки осуществления зачатия у Вас наступила задержка наступления очередной менструации, рекомендуем Вам воспользоваться **тестами для определения беременности MAMA TEST®**



Множество факторов влияет на успешность зачатия, и часто вполне здоровым парам требуется несколько месяцев для того, чтобы наступила желаемая беременность.

Если Вам не удается забеременеть, подбирая наиболее благоприятное время при помощи тестов на овуляцию, в течение 3-4 месяцев – обратитесь, пожалуйста, к врачу-гинекологу.

ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!



Условия хранения

Тест-полоски хранить в индивидуальной упаковке при температуре от 4 до 30°C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.



Производитель: Беромед ГмБХ Хоспитал Продактс® (Beromed GmbH Hospital Products), Кроненштрассе 19, 10117 Берлин, Германия (GERMANY).

Импортер 1: ООО «ВАРИАНТ», РФ, С.-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, лит. X, тел. +7 812 718 75 14

Импортер 2: ООО «ДжиЭс Медикал», РФ, С.-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, корп. 1, лит. А, тел. +7 812 332 41 47

Импортер 3: ООО «Медилюкс фарм», РБ, Минск, пр. Победителей, д. 5, оф. 1а, тел. +375 17 203 29 94

CE 0537

IVD

IN VITRO DIAGNOSTIC

www.mama-test.com

Инструкция по использованию тест-полосок для определения овуляции MAMA TEST

Содержимое упаковки:

5 диагностических тест-полосок для определения овуляции в индивидуальной упаковке, содержащей пакет с абсорбентом; инструкция по использованию.

Способ применения:

Сначала определите длину Вашего менструального цикла: это количество дней от первого дня появления менструаций до дня, предшествующего началу следующих. Более точный результат можно получить, наблюдая свой менструальный цикл в течение трех месяцев, и определив его длину как среднее арифметическое из трех значений.

Теперь определите день начала тестирования по таблице:

Длина Вашего цикла в днях	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Первый день тестирования, считая от первого дня Вашего цикла	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Пример расчета: длина цикла 28 дней, очередная менструация началась 03-го числа, в среду. Согласно таблице, при длине цикла 28 дней следует начинать тестирование на 11-й день, считая от первого дня цикла.

Таким образом, тестирование следует начать 13-го числа, в субботу:

пн	1				8					15				22						29
вт	2				9					16				23						30
ср	3 – начало цикла				10					17				24						31
чт	4				11					18				25						
пт	5				12					19				26						
сб	6				13 – начало тестирования					20				27						
вс	7				14					21				28						

Если Ваш цикл окажется короче 21 дня или длиннее 40 дней – проконсультируйтесь, пожалуйста, с врачом для определения наилучшего времени начала тестирования.

Внимание!

Рекомендуется проводить тестирование каждый день примерно в одно и то же время.

Не используйте для тестирования первую утреннюю порцию мочи!

За 2 часа до тестирования снизьте потребление жидкости: избыток питья может разбавить мочу и снизить уровень ЛГ в ней.

Производите тестирование при комнатной температуре.

Используйте тест-полоску сразу же после вскрытия индивидуальной упаковки.


Проведение тестирования:

собрать мочу в чистую сухую посуду. Вскрыть индивидуальную упаковку, достать тест-полоску, держа ее за конец, промаркированный буквами LH. Тест-полоску погрузить в емкость с мочой, держа вертикально, до уровня метки «MAX» на 3 секунды. Затем положить тест-полоску на сухую горизонтальную поверхность. В течение 1-5 минут оценить результат. Пакет с абсорбентом выбросить.

Внимание! По прошествии 5 минут результат оценивать нельзя.

Оценка результата:

C – контрольная зона, T – тест-зона; сравните интенсивность окраски контрольной полосы и тестовой полосы.

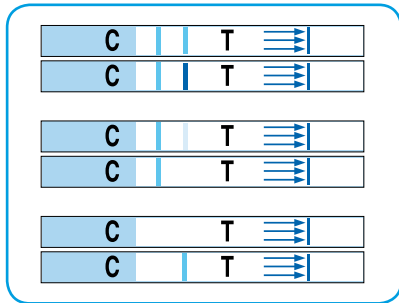

Вариант 1: Тестовая полоса такой же интенсивности окраски, как контрольная, или темнее ее: произошел выброс ЛГ, и через 24-48 часов наступит овуляция – время, наиболее благоприятное для зачатия. Результат положительный.

Вариант 2: Тестовая полоса светлее, чем контрольная, или не появилась: уровень ЛГ не поднялся. Результат отрицательный.

Вариант 3: Контрольная полоса не появилась: тест проведен неправильно, повторите тестирование. Результат недействителен.

Помните о том, что не у всех женщин овуляция происходит в середине менструального цикла: если в ожидаемое время Вы не обнаружите выброса ЛГ, продолжайте тестирование. Также необходимо знать, что иногда в течение менструального цикла овуляция не наступает, и не происходит выброс ЛГ – это изредка случается у здоровых женщин.

Как только по результатам теста будет замечен выброс ЛГ, прекратите тестирование. Оставшимися тестами можно воспользоваться в будущем.

Меры предосторожности

Не использовать первую утреннюю порцию мочи для тестирования.

Ограничить потребление жидкости за 2 часа до тестирования.

Использовать тест-полоску сразу же после вскрытия индивидуальной упаковки.

Не оценивать результаты теста по прошествии 5 минут.


Не использовать тест-полоски с истекшим сроком годности.

Не использовать тест-полоски с нарушенной индивидуальной упаковкой.

Если Вы принимаете некоторые гормональные препараты, возможно получение ложноположительных результатов. В случае приема таких препаратов перед проведением тестирования проконсультируйтесь с врачом.

Не используйте тест-полоски для определения овуляции как метод контрацепции.

 Тест-полоски предназначены только для одnorазового использования.

 Не принимать вовнутрь составные части тест-полосок и абсорбирующее вещество. Держать вне доступа детей.