

Инструкция по применению :

1. Поместите стопу с голенью во вкладыш и затяните его таким образом, чтобы он достаточно плотно прилегал к ноге.



2. Для лучшего прилегания, заполнения пустот во вкладыше или между вкладышем и ботинком-каркасом используйте прилагаемые овальные вкладыши на «липучках».



3. Приложите овальные вкладыши по обеим сторонам выше пятки (стрелки) чуть сзади обернутой во вкладыш лодыжки таким образом, чтобы они оказались внутри между боковыми сторонами ботинка-каркаса и ногой. Поместите ногу в ботинок-каркас так, чтобы она полностью прилегала к нему по вертикали и горизонтали.



4. Затяните по очереди, начиная снизу, все ремни и зафиксируйте их.

