



Инструкция по применению

Кресло туалетное модель: АТ01001

Кресло туалетное на колёсах модель: АТ01003

АТ01001



АТ01003



Кресло туалетное модель АТ01001, кресло туалетное на колёсах модель АТ01003 – это современные изделия, предназначенные для людей с ограниченными возможностями передвижения. Благодаря им можно оправить физиологические потребности без посещения туалета. Они могут использоваться в непосредственной близости от кровати или места, в котором пребывает человек с ограниченными возможностями передвижения. Благодаря применению лёгких материалов их легко передвинуть. К модели АТ01003 добавлены колёса, с помощью которых можно провезти кресло из одного места в другое (однако только в случае, если на стуле не сидит пользователь).

Подготовка к использованию


Прежде, чем начать использовать изделие, необходимо отрегулировать его высоту. Для этого необходимо вынуть клипсу, отрегулировать высоту – одинаковую для всех четырёх ног, а затем зафиксировать клипсу в соответствующее отверстие. **НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО СТАЛЬНОЙ БОЛТ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ПО ОБОИМ СТОРОНАМ СТЕНКИ.** В противном случае изделие будет нестабильным, а отверстие подвергнется деформации.



Санитарное ведро следует поместить в направляющие, предварительно сняв крышку. Если направляющие были вынуты, следует закрепить их, поместив концы в отверстия в верхней части трубок, на которых лежит крышка кресла туалетного. После оправления физиологических потребностей пользователем, рекомендуем вынуть санитарное ведро, накрыть его крышкой, опорожнить и вымыть.



Складывание с регулировкой ширины

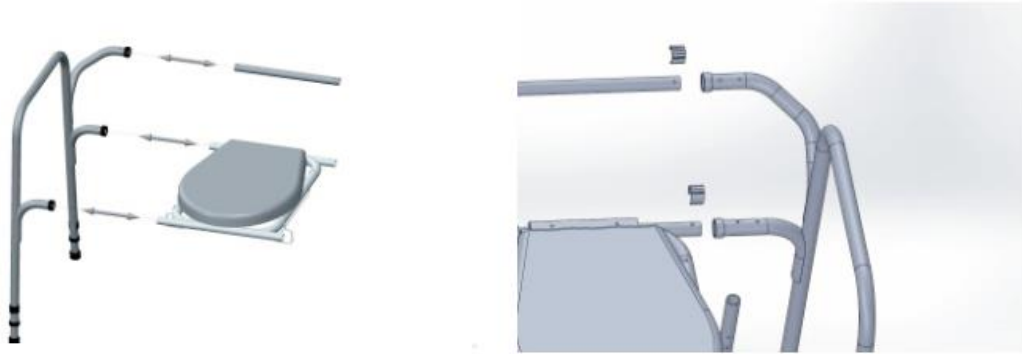

Кресло туалетное на колёсах модель АТ01003

С целью перемещения модели с колёсами отпустите тормоза, переместите кресло в требуемое место, и затем заблокируйте тормоза.

ПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ТОРМОЗА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЛОКИРОВАНЫ, КОГДА НА КРЕСЛО СЯДЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.

КРЕСЛО, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, СИДЯЩЕГО НА НЁМ ЧЕЛОВЕКА.

Технические характеристики кресло туалетное АТ01001:



Снабжено санитарным ведром с крышкой
Максимальная масса пользователя: 100 кг
Вес кресла: 6 кг
Общая ширина: 57 см
Ширина сиденья: 51 см
Минимальная высота: 38 см
Максимальная высота: 55 см

Технические характеристики кресло туалетное на колёсах АТ01003:



Кресло туалетное снабжено санитарным ведром с крышкой
Максимальная масса пользователя: 100 кг
Вес кресла: 8 кг
Общая ширина: 56 см
Ширина сиденья: 44 см
Диаметр колес: 7 см
Минимальная высота: 40 см
Максимальная высота: 50 см

Замечания и предостережения

- Не используйте, если вес пользователя свыше 100 кг.
- Не качайтесь на кресле туалетном – возможно падение и травмы.
- Перед использованием убедитесь, что санитарное ведро на месте и снята крышка.
- После использования опорожните санитарное ведро и вымойте его. В противном случае выступает риск контакта с выделениями.
- Избегайте контакта с открытым огнём. Изделие может воспламениться.

Дезинфекция и хранение изделия

Изделие следует периодически мыть с помощью воды и чистящих средств. Изделие можно подвергать воздействию дезинфицирующих средств. Неиспользуемое изделие храните в сухом помещении. Избегайте длительного нахождения под прямыми солнечными лучами.

Утилизация использованного изделия

После изъятия из эксплуатации изделие можно использовать в качестве коммунальных отходов. Для утилизации рекомендуется разделять изделие на пластик и металл.

Информация об изделии

Для получения подробной информации об изделии обратитесь к производителю или к продавцу в вашей местности.

Состав:

Кресло туалетное модель: АТ01001:

каркас - 100% алюминий; сиденье, крышка для унитаза, санитарное ведро - 100% полипропилен; конструкция, поддерживающая санитарное ведро - 100% сталь (хромированная); втулки, направляющие - 100% полипропилен; болты - 100% сталь; наконечники – синтетический каучук.

Кресло туалетное на колёсах: модель АТ01003:

каркас - 100% алюминий; сиденье, крышка для унитаза, санитарное ведро - 100% полипропилен; конструкция, поддерживающая санитарное ведро - 100% сталь (хромированная); втулки, направляющие - 100% полипропилен; болты - 100% сталь; колеса –92% синтетический каучук, 8% сталь.

Срок годности (хранения): 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Гарантия: 1 (один) год с даты покупки без потери медицинских качеств.

Импортер в Республику Беларусь – ИООО «АНМЕДПЛЮС», г. Минск, ул. Пономаренко 35/А – 318, тел.: +375 44 799 76 99.

Производитель - ANTAR Sp. J., ул. Зависьляньска, 43; 03-068, Варшава, Республика Польша, тел.: 0 22 518 36 00.

CE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

1) Фирма Antar Sp.J. (АНТАР), 03-068 Варшава, ул. Зависьляньска, 43, настоящим предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня продажи.

2) Во время гарантийного срока АНТАР обязуется провести необходимый ремонт изделия для восстановления правильного его функционирования в течение 14 рабочих дней со дня получения изделия на ремонт по вышеуказанному адресу.

3) АНТАР сохраняет за собою право заменить изделие, в случае, если признает, что издержки на ремонт превышают его стоимость. **Ремонт или замена дефектных изделий не продлевают гарантийный срок.**

4) В случае обнаружения, что изделие работает неправильно, следует незамедлительно отправить его в адрес АНТАР (см. п. 1) или связаться с пунктом продажи изделия.

5) Прежде, чем начать эксплуатацию, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и тщательно её соблюдать. Использование изделия не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией лишает изделие гарантии.

6) Гарантией не охвачены повреждения, возникшие вследствие пробоя или пореза изделия острым предметом, повреждения в результате воздействия внешней механической силы, излишнего нажима, соединения изделия с жирными или маслянистыми веществами, бензином и другими агрессивными веществами.

7) НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОКУПКИ ТОВАРА (ЧЕКОМ, СЧЁТОМ ИЛИ СЧЕТОМ-ФАКТУРОЙ). ПРОСИМ ПРИЛОЖИТЬ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОКУПКУ В СЛУЧАЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.

8) Претензии, заявленные без подтверждения покупки товара, не принимаются.



Antar Sp.J.

ul. Zawisłańska 43, 03-068 Warszawa

tel. +48 22 518 36 00

fax: +48 22 518 36 30

e-mail: antar@antar.net

Импортер в РБ – ИООО
«АНМЕДПЛЮС»,

тел.: +375 44 799 76 99.

Штамп пункта продажи, Ф.И.О.

и разборчивая подпись продавца:



www.antar.net



_____ ()