Бандаж шейный (1001)

Легкая фиксация шейного отдела позвоночника.

Описание:

- Мягко фиксирует шейный отдел позвоночника.
- Состоит из гипоаллергенной воздухопроницаемой ткани, с высоким содержанием хлопка.
- Специальная конструкция предотвращает нежелательные движения головой, что позволяет снизить нагрузку на позвоночник.

Показания к применению:

- Период реабилитации после спортивных травм.
- Нарушение осанки.
- Нарушения мышечного тонуса шеи.

Противопоказания:

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.
- Нарушение целостности кожных покровов.
- Не рекомендуется надевать изделие сразу после нанесения на кожу согревающей мази или крема.

Инструкция по применению:

- 1. Установить бандаж на передней поверхности шеи, расположив выемку под подбородком.
- 2. Охватить бандажом шею.
- **3.** Отрегулировать длину бандажа по объему шеи и зафиксировать его сзади застежкой «липучка».
- 4. Размер подбирается в зависимости от высоты шеи (см.таблицу).

Размер 1	фиксация шейного отдела позвоночника	Высота 3,6 см, обхват - универсальный
Размер 2		Высота 5,0 см, обхват - универсальный
Размер 3		Высота 6,0 см, обхват - универсальный
Размер 4		Высота 7,0 см, обхват - универсальный
Размер 5		Высота 8,0 см, обхват - универсальный
Размер 6		Высота 9,0 см, обхват - универсальный
Размер 7		Высота 10,0 см, обхват - универсальный
Размер 8		Высота 11,0 см, обхват - универсальный
Размер 9		Высота 12,0 см, обхват - универсальный

Рекомендации по уходу:

- Перед стиркой застегните все липучки.
- Рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить.
- Сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом.

Цвет: бежевый.

Не является медицинским изделием.