

# Ортез для фиксации шейного отдела позвоночника МЕК 1001 (R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9)

## **Описание:**

- изготовлен из пенополиуретана;
- снабжен контактной лентой (застежка «Велкро»);
- цвет: бежевый.

## **Функции:**

- умеренная фиксация шейного отдела позвоночника и головы;
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи;
- нормализация кровообращения головы и шеи;
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника.

## **Показания к применению:**

- остеохондроз, спондилоартроз в шейном отделе позвоночника;
- профилактика заболеваний шейного отдела позвоночника у людей, чья деятельность связана с длительным вынужденным статичным положением головы;
- вертеброгенные головные боли, головокружение;
- нестабильность шейного отдела позвоночника;
- реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника;
- миозиты различной этиологии.

## **Противопоказания:**

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания (требуют консультации врача):

- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа;
- аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья;
- нарушение целостности кожных покровов, открытые раны в области использования бандажа;
- не рекомендуется надевать изделие сразу после нанесения на кожу согревающей мази или крема;

Применять изделие под контролем и по назначению врача.

## **Инструкция по применению:**

- выбрать необходимую высоту воротника (см. таблицу), измерив длину от ветви нижней челюсти до ключицы;
- установить бандаж на передней поверхности шеи, расположив выемку под подбородком;
- охватить бандажом шею;

- отрегулировать длину бандажа по объему шеи и зафиксировать его сзади застежкой контактной лентой (застежка «Велкро»);
- режим и срок ношения определяются врачом.

Таблица размеров:

<i>Размер изделия</i>	<i>Высота шейного отдела позвоночника</i>
1 (детский)	Высота 3,5 см, обхват – универсальный (от 15 до 25 см)
2 (детский)	Высота 5,0 см, обхват – универсальный (от 20 до 30 см)
3 (подростковый)	Высота 6,5 см, обхват – универсальный (от 22 до 32 см)
4 (подростковый)	Высота 7,5 см, обхват - универсальный (от 30 до 38 см)
5 (подростковый)	Высота 8,5 см, обхват - универсальный (от 30 до 42 см)
6	Высота 9,0 см, обхват - универсальный (от 34 до 56 см)
7	Высота 10,0 см, обхват - универсальный (от 34 до 56 см)
8	Высота 11,0 см, обхват - универсальный (от 34 до 56 см)
9	Высота 12,0 см, обхват - универсальный (от 34 до 56 см)

**Рекомендации по уходу:**

- перед стиркой застегните все липучки,
- рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить,
- сушить на плоскости в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом,
- сухая чистка запрещена.

**Состав:**

- основа — пенополиуретан
- чехол: полипропилен с серебром 52%, вискоза 48%

**Хранение:**

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке изготовителя в сухих, проветриваемых помещениях в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

**Гарантийными случаями не являются:**

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.