

Фиксатор голеностопного сустава (9001)

Легкая фиксация и компрессия голеностопного сустава.

Описание:

- Фиксатор изготовлен из воздухопроницаемого гипоаллергенного материала.
- Анатомическая форма делает использование фиксатора максимально безопасным и комфортным.
- Универсальность конструкции позволяет использовать фиксатор как для левого, так и для правого голеностопного сустава.
- Рекомендуются для людей ведущих активный образ жизни. Применяется как при занятиях любительским и профессиональным спортом, так и в повседневной жизни.

Показания к применению:

- Профилактика травм голеностопного сустава при занятиях спортом.
- Разгрузка голеностопного сустава при интенсивных физических нагрузках.
- Мягкая фиксация и поддержка голеностопного сустава в посттравматическом периоде.

Противопоказания:

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.
- Наличие в области применения фиксатора трофических язв, контактных дерматитов и других воспалительных поражений кожи.

Инструкция по применению:

1. Размер определяется путем измерения окружности голеностопного сустава и подбирается по таблице размеров.

XS	окружность голеностопного сустава	18-20см
S		20-22см
M		22-24см
L		24-26см
XL		26-28см

2. Наденьте фиксирующее кольцо на основание стопы .
3. Оберните два свободных конца фиксатора вокруг голеностопного сустава.
4. Отрегулировав степень натяжения, зафиксируйте на голеностопном суставе с помощью застёжки.

Рекомендации по уходу:

- Перед стиркой застегните все застёжки.
- Рекомендуется ручная стирка при температуре не выше 30 градусов с использованием моющих средств для деликатных тканей.
- После стирки не выжимать, сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Не гладить утюгом.

Цвет: серый, бежевый.

Не является медицинским изделием.