

Бандаж абдоминальный МЕК 3002

Описание:

- высота бандажа 28 см;
- передняя панель, прилегающая к послеоперационному шву, изготовлена из плотного и нерастяжимого материала, что способствует правильному формированию послеоперационного рубца и быстрому заживлению послеоперационной раны;
- снабжен двумя разгружающими пластинами, предотвращающими скручивание бандажа
- изготовлен из воздухопроницаемых материалов;
- практичен и очень прост в применении;
- цвет: бежевый, серый.

Функции:

- фиксация брюшной стенки и поясничных областей;
- профилактика развития послеоперационных грыж;
- уменьшение боли в области послеоперационной раны, рубца или в области травмы;
- создание оптимальных условий для заживления послеоперационной раны и формирования послеоперационных рубцов;
- улучшение тонуса мышц брюшной стенки.

Показания к применению:

- после операций на брюшной полости и брюшной стенке, области почек;
- после Кесарева сечения;
- расхождения мышц живота;
- слабость брюшной стенки;
- тупые и острые травмы брюшной стенки, поясничных областей;
- профилактика перенапряжения мышц при физической нагрузке в послеоперационном периоде.

Противопоказания:

- абсолютных противопоказаний не выявлено;

Относительные противопоказания (требуют консультации врача):

- синдром портальной гипертензии;
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа;
- аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья;
- нарушение целостности кожных покровов, открытые раны, пролежни в области использования бандажа;

Применять изделие под контролем и по назначению врача.

Инструкция по применению:

- подобрать размер по таблице, предварительно измерив обхват талии:

Таблица размеров

<i>Размер изделия</i>	<i>Обхват талии, см</i>
XS	60,0-70,0
S	70,0-80,0
M	80,0-90,0
L	90,0-100,0
XL	100,0-110,0
XXL	110,0-120,0
XXXL	120,0-130,0

- бандаж надевать непосредственно на тело, либо поверх хлопкового белья;
- бандаж должен плотно прилегать к телу, при этом не стеснять движения, не причинять дискомфорт при носке;
- степень фиксации и длительность ношения определяются лечащим врачом.

Рекомендации по уходу:

- рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить;
- сушить на плоскости в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света, не гладить утюгом;
- сухая чистка запрещена.

Состав:

- полиэфир 53%,
- латекс 22%,
- полиамид 8%.
- пенополиуретан 7%,
- хлопок 10%.

Хранение:

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке изготовителя в сухих, проветриваемых помещениях в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;

- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.