

## **Бандаж абдоминальный (3011)**

*Эффективная мягкая поддержка живота.*

### **Описание:**

- Бандаж изготовлен из мягких гипоаллергенных материалов, которые обеспечивают комфорт при носке.
- Дополнительные боковые эластичные ленты позволяют регулировать степень натяжения.

### **Показания к применению:**

- Эффективная мягкая поддержка живота
- Нормализация тонуса мышц живота в восстановительном периоде.
- Активный образ жизни

### **Противопоказания:**

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.

### **Инструкция по применению:**

1. для правильного подбора бандажа необходимо измерить обхват бедер под животом
2. подобрать размер при помощи таблицы

|     |              |           |
|-----|--------------|-----------|
| S   | обхват бедер | 75-85см   |
| M   |              | 85-95см   |
| L   |              | 95-105см  |
| XL  |              | 105-115см |
| XXL |              | 115-125см |

3. Надеть бандаж лежа на спине перед подъёмом с постели.
4. Застегнуть центральную липучку впереди под животом.
5. Дополнительными боковыми эластичными лентами отрегулировать степень натяжения.
6. В восстановительном периоде бандаж перевернуть и плотно зафиксировать липучки сзади на спине.

### **Рекомендации по уходу:**

- Рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить.
- Перед стиркой застегнуть все застёжки.
- Сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом.

**Цвет:** бежевый.

*Не является медицинским изделием.*