

## **Фиксатор голеностопного сустава (9003) (шесть ребер жесткости)**

*Средняя фиксация голеностопного сустава.*

### **Описание:**

- Фиксатор выполнен из износостойчивых дышащих материалов.
- Боковые ребра жесткости фиксируют и стабилизируют голеностопный сустав и нижнюю треть голени.
- Конструкция изделия снабжена шнуровкой, что позволяет применять его при наличии отеков.
- Эластичные ленты обеспечивают дополнительную фиксацию сустава.
- Комфортный в повседневном использовании, можно носить с любой обувью.

### **Показания к применению:**

- Средняя фиксация и компрессия голеностопного сустава.
- Профилактика травм голеностопного сустава.
- Разгрузка голеностопного сустава при интенсивных физических нагрузках.
- Дополнительная фиксация голеностопного сустава в восстановительном периоде после спортивных травм.

### **Противопоказания:**

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.
- Наличие в области применения фиксатора трофических язв, контактных дерматитов и других воспалительных поражений кожи.

### **Инструкция по применению:**

1. Размер определяется путем измерения окружности голеностопного сустава и подбирается по таблице

S	о́кружность голеностопного сустава	20-23см
M		23-26см
L		26-29см
XL		29-32см

2. Наденьте фиксатор на тело или хлопчатобумажный носок.
3. Отрегулируйте степень фиксации с помощью шнуровки.
4. Поверх восьмиобразно наложите дополнительную фиксирующую ленту.

### **Рекомендации по уходу:**

- Перед стиркой застегните все застёжки.
- Рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить.
- Сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом.

**Цвет:** черный.

*Не является медицинским изделием.*