

## Корректор осанки (2001)

Применяется для тренировки хорошей осанки или при слабой мускулатуре грудной клетки. Устраняет мышечный дисбаланс и формирует стереотип «правильной осанки».

### Описание:

- Корректор изготовлен из воздухопроницаемого композитного гипоаллергенного материала, что позволяет использовать его как на одежду, так и непосредственно на тело.
- Анатомическая форма делает использование корректора максимально безопасным и комфортным.
- Универсальность конструкции позволяет осуществлять индивидуальный подбор изделия и поэтапность коррекции осанки.

### Показания к применению:

- Способствует формированию правильной осанки у детей и взрослых.
- Разгрузка грудного отдела позвоночника при статических нагрузках.
- Дополнительная поддержка в восстановительном периоде после спортивных травм.

### Инструкция по применению:

1. Для правильного подбора изделия воспользуйтесь размерной таблицей, предварительно измерив объем грудной клетки.

XS	окружность грудной клетки	41-46см
S		46-53.7см
M		53.7-63.8см
L		63.8-76.5см
XL		76.5-89.2см
XXL		89.2-102.8см

2. Подобрав необходимый размер, надеваем корректор на плечи (ремни должны быть расположены на спине буквой «X»)
3. Отрегулировав степень натяжения, фиксируем застёжку под грудью.

### Противопоказания:

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.
- Наличие в области применения корректора трофических язв, контактных дерматитов и других воспалительных поражений кожи.

### Рекомендации по уходу:

- Перед стиркой застегните все липучки.
- Рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить.
- Сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом.

**Цвет:** бежевый.

Не является медицинским изделием.