

## Фиксатор голеностопного сустава (9002)

*Легкая фиксация и компрессия голеностопного сустава.*

### **Описание:**

- Фиксатор изготовлен из воздухопроницаемого гипоаллергенного материала.
- Анатомическая форма делает использование фиксатора максимально безопасным и комфортным.
- Универсальность конструкции позволяет использовать фиксатор как для левого, так и для правого голеностопного сустава.
- Рекомендуются для людей, ведущих активный образ жизни. Применяется как при занятиях любительским и профессиональным спортом, так и в повседневной жизни.

### **Показания к применению:**

- Профилактика травм голеностопного сустава при занятиях спортом.
- Разгрузка голеностопного сустава при интенсивных физических нагрузках.
- Мягкая фиксация и поддержка голеностопного сустава в посттравматическом периоде.

### **Противопоказания:**

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.
- Наличие в области применения фиксатора трофических язв, контактных дерматитов и других воспалительных поражений кожи.

### **Инструкция по применению:**

1. Размер определяется путем измерения окружности голеностопного сустава и подбирается по таблице размеров.

|     |                                   |         |
|-----|-----------------------------------|---------|
| S   | окружность голеностопного сустава | 20-27см |
| L   |                                   | 28-35см |
| XXL |                                   | 36-39см |

2. Наденьте фиксирующее кольцо фиксатора на основание стопы.
3. Оберните свободный конец фиксатора вокруг голеностопного сустава.
4. Отрегулировав натяжение, зафиксируйте на голеностопном суставе с помощью застёжки.

### **Рекомендации по уходу:**

- Перед стиркой застегните все застёжки.
- Рекомендуется ручная стирка при температуре не выше 30 градусов с использованием моющих средств для деликатных тканей.
- После стирки не выжимать, сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Не гладить утюгом.

**Цвет:** серый, бежевый.

*Не является медицинским изделием.*