

## **Фиксатор лучезапястного сустава(6001)**

*Легкая фиксация и компрессия лучезапястного сустава.*

### **Описание:**

- Фиксатор изготовлен из современной эластичной дышащей ткани, которая обеспечивает гигроскопичность, надёжную микроциркуляцию воздуха и мягкую фиксацию при повышенных физических нагрузках.
- Универсальность конструкции позволяет регулировать охват лучезапястного сустава, подходит как для правой, так и для левой руки.
- Рекомендуются для людей ведущих активный образ жизни. Применяется как при занятиях любительским и профессиональным спортом, так и в повседневной жизни.

### **Показания к применению:**

- Профилактика травм лучезапястного сустава при занятиях спортом.
- Разгрузка лучезапястного сустава при интенсивных физических нагрузках.
- Мягкая фиксация и поддержка лучезапястного сустава в посттравматическом периоде.

### **Противопоказания:**

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.
- Наличие в области применения фиксатора трофических язв, контактных дерматитов и других воспалительных поражений кожи.

### **Инструкция по применению:**

1. Надеть петлю на первый палец кисти.
2. Обернуть фиксатор по тыльной стороне кисти.
3. Отрегулировать охват лучезапястного сустава и степень натяжения.
4. Закрепить на запястье и зафиксировать застёжкой.

### **Рекомендации по уходу:**

- Перед стиркой зафиксируйте все застёжки.
- Рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить.
- Сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом.

**Цвет:** серый, бежевый.

**Размер:** универсальный.

*Не является медицинским изделием.*