

Фиксатор лучезапястного сустава (6003) (с жесткой анатомической пластиной)

Жёсткая фиксация и компрессия лучезапястного сустава.

Описание:

- Фиксатор изготовлен из современной эластичной дышащей ткани, которая обеспечивает гигроскопичность, надёжную микроциркуляцию воздуха и мягкую фиксацию при повышенных физических нагрузках.
- Снабжён металлической шиной, которая обеспечивает жёсткую степень фиксации сустава.
- Длительно сохраняет свою форму и компрессионные свойства.

Показания к применению:

- Разгрузка лучезапястного сустава при интенсивных физических нагрузках.
- Жесткая фиксация и поддержка лучезапястного сустава в посттравматическом периоде.

Противопоказания:

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.
- Наличие в области применения фиксатора трофических язв, контактных дерматитов и других воспалительных поражений кожи.

Инструкция по применению:

1. Надеть петлю на первый палец кисти.
2. Металлическая шина должна располагаться по ладонной стороне кисти.
3. Отрегулировать охват лучезапястного сустава и степень натяжения.
4. Закрепить на запястье и зафиксировать застежками.

Рекомендации по уходу:

- Перед стиркой зафиксируйте все застежки.
- Рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить.
- Сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом.

Цвет: черный.

Размер: универсальный для правой руки,
универсальный для левой руки.

Не является медицинским изделием.