

Корректор осанки (2002) (два ребра жесткости)

Применяется для тренировки хорошей осанки или при слабой мускулатуре грудной клетки. Устраняет мышечный дисбаланс и формирует стереотип «правильной осанки».

Описание:

- Корректор изготовлен из современной эластичной дышащей ткани, которая обеспечивает надёжную микроциркуляцию воздуха и позволяет создать необходимую фиксацию и поддержку.
- Разведение верхнего плечевого пояса осуществляется при помощи плечевых лямок, степень натяжения которых самостоятельно регулируется благодаря разъёмной конструкции изделия.
- Ребра жесткости помогают выровнять спину, обеспечивают правильную осанку.

Показания к применению:

- Профилактика нарушений осанки и сутулости у детей и взрослых.
- Период реабилитации после травм на грудном отделе позвоночника.
- Слабая мускулатура грудной клетки.
- Повышенные физические нагрузки.
- Вынужденное длительное пребывание в статическом положении.
- Разгрузка позвоночника, нормализация тонуса мышц, уменьшение болевых ощущений в области грудного отдела позвоночника.

Противопоказания:

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.
- Наличие в области применения корректора трофических язв, контактных дерматитов и других воспалительных поражений кожи.

Инструкция по применению:

Корректор рекомендуется надевать на майку.

1. Наденьте корректор на плечи.
2. Зафиксируйте спереди нижнюю эластичную ленту.
3. Расположите плечевые ленты на спине буквой Х.
4. Отрегулируйте степень натяжения лент и зафиксируйте застежкой.

S	окружность грудной клетки	70-80см
M		80-90см
L		90-100см
XL		100-110см
XXL		110-120см

Рекомендации по уходу:

- Перед стиркой застегните все застежки.
- Рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить.
- Сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом.

Цвет: бежевый, серый.

Не является медицинским изделием.