

Корректор осанки МЕК 2002 (S, M, L, XL, XXL) бежевый/серый

Описание:

- корректор изготовлен из воздухопроницаемого гипоаллергенного материала;
- снабжен двумя металлическими ребрами жесткости;
- можно использовать как на одежду, так и непосредственно на тело;
- легкий, незаметный под одеждой, комфортный в использовании;
- разведение верхнего плечевого пояса осуществляется при помощи плечевых лямок, степень натяжения которых самостоятельно регулируется благодаря разъёмной конструкции изделия;
- анатомическая форма делает использование корректора максимально безопасным и комфортным;
- универсальность конструкции позволяет осуществлять индивидуальный подбор изделия;
- не сковывает движения;
- легкий, незаметный под одеждой, комфортный в использовании;
- цвет: бежевый, серый.

Функции:

- формирование правильной осанки;
- реклинация и разгрузка грудного отдела позвоночника;
- нормализация мышечного тонуса;
- активация работы мышц спины.

Показания к применению:

- различные формы нарушения осанки, сутулость;
- боли различной этиологии в области грудного отдела позвоночника;
- остеохондропатии грудного отдела позвоночника с болевым синдромом;
- в комплексном лечении болезни Шейермана-Мау.

Противопоказания:

- абсолютных противопоказаний не выявлено;

Относительные противопоказания (требуют консультации врача):

- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа;
- аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья;
- нарушение целостности кожных покровов, открытые раны в области использования бандажа;
- сколиоз III-IV степени;
- осложненные травмы позвоночника с повреждением спинного мозга;
- необходимость индивидуального ортезирования позвоночника.

Применять изделие под контролем и по назначению врача.

Инструкция по применению:

- для правильного подбора изделия воспользуйтесь размерной таблицей, предварительно измерив окружность грудной клетки;
- корректор рекомендуется надевать на нижнее белье;
- наденьте корректор на плечи;
- зафиксируйте спереди нижнюю эластичную ленту;
- расположите плечевые ленты на спине буквой Х;
- отрегулируйте степень натяжения лент и зафиксируйте застежкой.
- степень фиксации определяется врачом
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом.

Таблица размеров:

<i>Размер изделия</i>	<i>Окружность грудной клетки, см</i>
S	70,0-80,0
M	80,0-90,0
L	90,0-100,0
XL	100,0-110,0
XXL	110,0-120,0

Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегните все липучки;
- рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить;
- сушить на плоскости в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом,
- сухая чистка запрещена.

Состав:

- полиэфир 63%,
- латекс 28%,
- полиамид 9%.
- ребра: алюминиевый сплав.

Хранение:

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке изготовителя в сухих, проветриваемых помещениях в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.