

Фиксатор лучезапястного сустава (6002)

Легкая фиксация и компрессия лучезапястного сустава.

Описание:

- Фиксатор изготовлен из современной эластичной дышащей ткани, которая обеспечивает гигроскопичность, надёжную микроциркуляцию воздуха и мягкую фиксацию при повышенных физических нагрузках.
- Универсальность конструкции позволяет регулировать охват лучезапястного сустава, подходит как для правой, так и для левой руки.
- Рекомендуются для людей ведущих активный образ жизни. Применяется как при занятиях любительским и профессиональным спортом, так и в повседневной жизни.

Показания к применению:

- Профилактика травм лучезапястного сустава при занятиях спортом.
- Разгрузка лучезапястного сустава при интенсивных физических нагрузках.
- Мягкая фиксация и поддержка лучезапястного сустава в посттравматическом периоде.

Противопоказания:

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.
- Наличие в области применения фиксатора трофических язв, контактных дерматитов и других воспалительных поражений кожи.

Инструкция по применению:

1. Наложить фиксатор на запястье.
2. Отрегулировать охват лучезапястного сустава и степень натяжения.
3. Закрепить на запястье и зафиксировать застежкой.

Рекомендации по уходу:

- Перед стиркой зафиксируйте все застежки.
- Рекомендуется ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов с использованием мягких моющих средств. Не отбеливать, не кипятить.
- Сушить в расправленном состоянии вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, не гладить утюгом.

Цвет: серый, черный.

Размер: универсальный.

Не является медицинским изделием.