

Повязка ключичная (4004) (кольца Дельбе)

Разводит плечи и надежно фиксирует плечевой пояс.

Описание:

- Изделие изготовлено из современной эластичной дышащей ткани, которая обеспечивает гигроскопичность и надёжную микроциркуляцию воздуха.
- Состоит из регулируемых лямок, которые крепятся к основанию в межлопаточной области.
- Эффективно разгибает верхне-грудной отдел позвоночника.

Показания:

- Период реабилитации после травм грудного отдела позвоночника.
- Слабая мускулатура грудной клетки.
- Повышенные физические нагрузки.
- Вынужденное длительное пребывание в статическом положении.
- Разгрузка позвоночника, нормализация тонуса мышц, уменьшение болевых ощущений в области грудного отдела позвоночника.

Инструкция по применению:

1. Повязка надевается на хлопчатобумажное бельё.
2. Лямки необходимо направить вперед через плечи и провести через подмышечные впадины.
3. Отрегулировать степень натяжения и закрепить застежками.
4. Правильно надетая повязка отводит плечи назад, расправляя грудную клетку.
5. Размер определяется путем измерения окружности грудной клетки.

S	окружность грудной клетки	60-75см
M		75-90см
L		90-105см
XL		105-120см

Противопоказания:

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.
- Наличие в области применения фиксатора трофических язв, контактных дерматитов и других воспалительных поражений кожи.

Уход за изделием:

- Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше 35°C
- При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать.
- Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор)
- Не подвергать сухой химической чистке.

Цвет: серый.

Не является медицинским изделием.