

## Корсет грудно-поясничный (3009)

*Сильная степень фиксации грудно-поясничного отдела позвоночника.*

### **Описание:**

- Корсет предназначен для жёсткой фиксации пояснично-крестцового и грудного отделов позвоночника.
- Корсет изготовлен из современной эластичной дышащей ткани, которая обеспечивает надёжную микроциркуляцию воздуха и позволяет создать необходимую фиксацию и поддержку.
- Роль усиленной фиксации выполняют рёбра жесткости.
- Корсет имеет дополнительные ленты, которые усиливают фиксацию позвоночника и облегчают подгонку изделия по размеру.

### **Показания к применению:**

- Дополнительная поддержка грудно-поясничного отдела при чрезмерных физических нагрузках.
- Реабилитация после спортивных травм грудно-поясничного отдела позвоночника.

### **Противопоказания:**

- Аллергические реакции, гиперчувствительность, непереносимость сырья.

### **Инструкция по применению:**

Корсет рекомендуется надевать поверх хлопкового белья. Корсет должен плотно прилегать к телу, при этом не стеснять движения, не причинять дискомфорт при носке. Изделие рекомендуется надевать лежа на спине на ровной жесткой или полужесткой поверхности.

1. Наденьте корсет широкой частью на поясницу, длинными лентами на плечи.
2. На глубоком вдохе зафиксируйте пояс на животе с помощью застежки-липучки.
3. Отрегулируйте степень прилегания изделия при помощи дополнительных боковых эластичных ремней.
4. Расположите плечевые ленты на спине буквой Х.
5. Отрегулируйте степень натяжения лент.
6. Закрепите ленты спереди и зафиксируйте застежкой-липучкой.
7. Для правильного подбора размера используйте таблицу

S	обхват талии	70-80см
M		80-90см
L		90-100см
XL		100-110см
XXL		110-120см

### **Рекомендации по уходу:**

- Перед стиркой достать металлические пластины — рёбра жесткости
- Застегнуть все липучки.
- Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше 30°C
- При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать.
- Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор).
- Не подвергать сухой химической чистке.

**Цвет:** бежевый.

*Не является медицинским изделием.*