



ПРАВИЛА ОЧИСТКИ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ СПРЕЙ-ФЛЮИДАМИ ОТ DOCTOR KLAUS

ЭТАП 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.

При серьезных загрязнениях (*грязь, песок и т.д.*) перед очисткой очковых линз предварительно промыть изделие под струей теплой воды до тех пор, пока все видимые крупинки/пылинки не исчезнут с поверхностей, которые боятся царапин. Этап 1 нужно пропустить при отсутствии серьезных загрязнений.



ЭТАП 2: ОЧИСТКА

Распылить спрей-флюид с обеих сторон очковых линз.



ЭТАП 3: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Поступательными движениями – сверху вниз либо снизу вверх, не делая круговых, протереть очки салфеткой из микрофибры.



ЭТАП 4: ВЫ – ИДЕАЛЬНЫ!

КРАСОТА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВАШИХ
ЛЮБИМЫХ ИЗДЕЛИЙ – В ВАШИХ РУКАХ!



КАК ПРОДЛИТЬ СРОК
СЛУЖБЫ ВАШИХ ОЧКОВ?


«ЗАБОТЯСЬ О ВАС, МЫ СТАРАЕМСЯ
СДЕЛАТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ НЕМНОГО ЛУЧШЕ»

В.Кlaus, основатель компании,
Зиген, Германия

«IN VORSORGE UM SIE, BEMÜHEN
WIR UNS IHR LEBEN ETWAS BESSER ZU MACHEN»

W.Klaus, Gesellschaftsgründer,
Siegen, Deutschland

ВАМ НУЖЕН
ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД
ЗА ОЧКАМИ

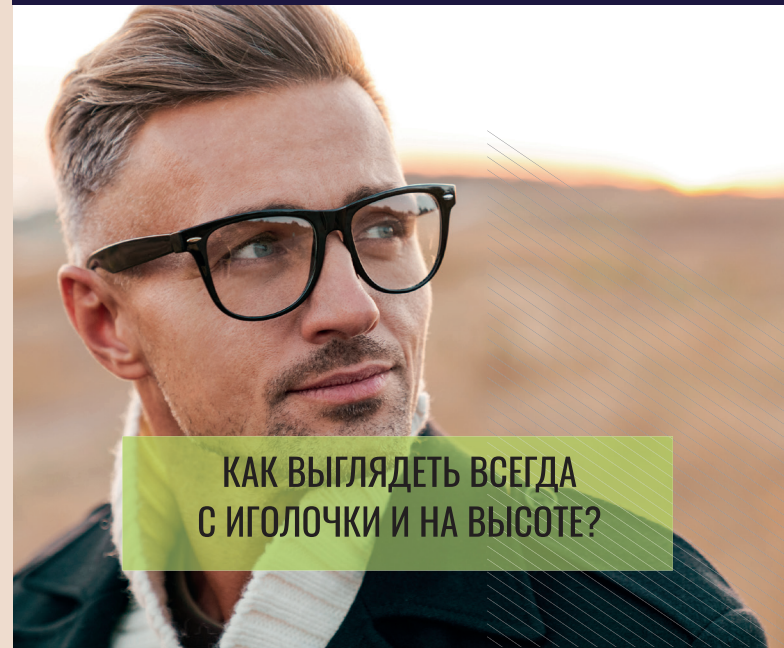

КАК ВЫГЛЯДЕТЬ ВСЕГДА
С ИГОЛОЧКИ И НА ВЫСОТЕ?



• www.doctorklaus.by •
e-mail: info@doctorklaus.by
тел./факс: +375 17 51 139 51
ООО "Доктор Клаус"
УНП 690662600

Спрей-флюиды

ДЛЯ ОЧИСТКИ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ ОТ DOCTOR KLAUS – ЭТО ДЕЛИКАТНЫЙ УХОД ЗА ВАШИМИ ОЧКАМИ!

В процессе эксплуатации на очковых линзах отлагаются разнообразные загрязнения, которые снижают их светопропускание, ухудшают внешний вид очков, а также, могут вызывать повреждение поверхности очковой линзы. Но кроме этого, грязные очковые линзы – это рассадник бактерий и микроорганизмов, которые представляют опасность для здоровья ваших глаз.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ???

ОТВЕТ ПРОСТ: нужен правильный уход за очками и очковыми линзами!

СПРЕЙ-ФЛЮИДЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ ОТ DOCTOR KLAUS В ЭТОМ ПОМОГУТ!

Спрей-флюид **AntiStatic**

- / бережная очистка
- / антистатическое действие (отталкивает пыль)
- / антибактериальная защита
- / придает эффект «новизны»



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: для всех видов очковых линз, солнцезащитных линз, спортивных очков и масок, визира мотоциклетного шлема, защитных очков и прочих поверхностей.

Спрей-флюид **AntiFog**

- / бережная очистка
- / защита от запотевания
- / антибактериальное действие
- / придает эффект «новизны»



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: для всех видов очковых линз, солнцезащитных линз, спортивных очков и масок, визира мотоциклетного шлема, защитных очков и прочих поверхностей.

Спрей-флюид **Prof**

- / деликатная очистка
- / антистатическое действие (отталкивает пыль)
- / защитный слой от микроцарапин
- / придает эффект «новизны»



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: для очковых линз с особыми видами покрытий, солнцезащитных линз, оптических приборов (микроскопов, телескопов, биноклей и т.д.), объективов фото- и видеокамер, ЖК-экранов и прочих поверхностей.



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЧИСТИТЬ ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ СПРЕЙ-ФЛЮИДОМ ОТ DOCTOR KLAUS?

ПОЛЬЗА

- 1 легко удаляет любые пятна, даже трудновыводимые – ВСЕГДА ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ
- 2 быстро убивает микробы и бактерии – БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ГЛАЗ
- 3 деликатно и бережно очищает очковые линзы – ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ ИЗДЕЛИЙ
- 4 покрывает пленкой, препятствующей образованию микроцарапин – ЗАЩИТА ВАШИХ ЛИНЗ
- 5 компактный флакон – УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ОЧКАМИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ВАШИХ ИЗДЕЛИЙ, НО И БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ГЛАЗ!

У Вас возникли дополнительные вопросы про спрей-флюиды от Doctor Klaus?

Возможно, Вы найдете ответ в дальнейшей рубрике «Часто задаваемые вопросы».

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.

МОГУТ ЛИ СПРЕИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОРТИТЬ ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ?

Могут, перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и обратить внимание для каких типов линз и видов покрытия линз рекомендуется средство для очистки. Практически все виды покрытий очковых линз (антибликовое, поляризационное, защита от ультрафиолета и т.д.) требуют деликатного ухода.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ БЕЗОПАСНЫМИ СПРЕЙ-ФЛЮИДЫ ОТ DOCTOR KLAUS ДЛЯ ГЛАЗ?

В состав спрей-флюидов от Doctor Klaus включена специальная комбинация поверхностно-активных веществ (ПАВ), позволяющая деликатно ухаживать за всеми типами очковых линз и в то же время быть безопасной для ваших глаз. В состав спрей-флюидов не входят вещества, используемые в быту и в промышленности по производству моющих средств. Спрей-флюиды не содержат щелочных добавок, аммиака, органических растворителей, так как все эти соединения могут повредить поверхность очковых линз и быть раздражителями для ваших глаз.

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКИ ОЧКОВ И ОЧКОВЫХ ЛИНЗ?

МОЖНО/ НУЖНО	НЕЛЬЗЯ
Эксплуатация: <ul style="list-style-type: none">- снимать/одевать очки двумя руками во избежание перегиба дужек очков и возможного излишнего напряжения в линзах;- проводить периодическое обслуживание очков, обращаясь при этом к специалистам.	<ul style="list-style-type: none">- бросать, ударять, гнуть очки;- носить очки как ободок.
Хранение: <ul style="list-style-type: none">- очки должны храниться в футляре при температуре от -10 до +35 градусов.	<ul style="list-style-type: none">- подвергать влиянию высоких температур (хранить очки вблизи от нагревательных приборов, на панели автомобиля);- класть очки линзами вниз на твердую поверхность.
Очистка: <ul style="list-style-type: none">- при серьезных загрязнениях (грязь, песок и т.д.) перед очисткой очковых линз предварительно промыть изделие под струей теплой воды до тех пор, пока все видимые крупинки/пылинки не исчезнут с поверхностей, которые боятся царапин;- использовать специальные растворы и салфетки для очистки;- протирать очки салфеткой из микрофибры.	<ul style="list-style-type: none">- использовать грязную или абразивную ткань;- использовать бумажные салфетки.