


## Порядок снятия мерок и определения размеров медицинских изделий Avicenum

При определении размера, пожалуйста, уделите должное **внимание снятию мерок**. От правильного определения размера зависит правильное функционирование чулка/нарукавника. Снятие мерок необходимо проводить утром, так как в течение дня конечности отекают.


Измерьте все точки, показанные в таблице размеров для данного изделия. Как изделие должно одеваться на конечность, показано на рисунках. При выборе размеров наиболее важны значения, показанные в таблице на сером фоне.

### Точки измерений – рука

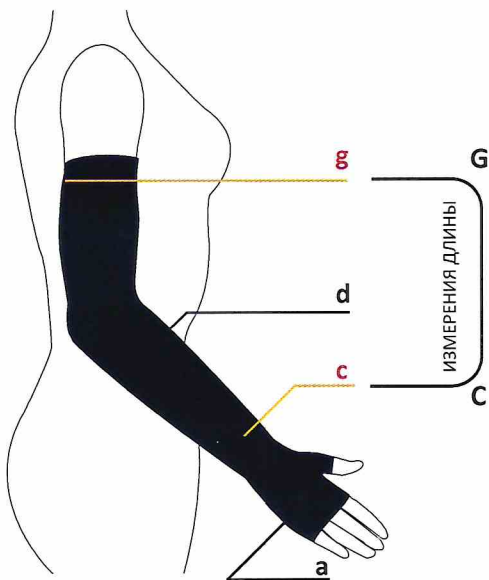

- a объем ладони
- c объем запястья
- d объем предплечья
- g объем под плечом
- C – G измерения длины

### Точки измерений – нога

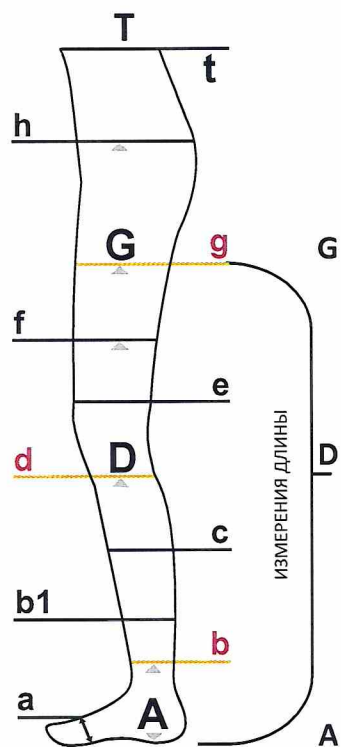

- a объем ступни
- b объем над щиколоткой
- b1 объем 10 см над щиколоткой
- c объем икры ноги
- d объем под коленом
- e объем над коленом
- f объем бедра (по середине бедра)
- g объем бедра (5 см ниже паха)
- h объем бедер
- t объем талии

#### Измерения длины

- A – D гольфы
- A – G бедренный чулок

## Avicenum 140

Размер		Объем ноги в точках измерения						Длина		
новый	старый	b	d	f	g	h	t	новый	normal	long
старый		UK ультра-коротк.		K короткая		D длинная				
S	1	20-24	34-37	46-50	50-55	110	80	Икроножные A-D	менее 37	более 37
M	2	24-27	37-40	50-54	55-60	120	90	Бедренные A-G	менее 70	более 70
L	3	27-30	40-44	54-58	60-66	130	100	Колготки		

## Avicenum 360/Avicenum 520

Размер		Объем ноги в точках измерения									
новый	старый	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S-	1-	19-25	20-23	25-30	32-38	31-37	33-39	37-45	42-52	100	70
S	1	19-25	20-23	25-30	32-38	31-37	33-39	41-49	47-57	110	80
S+	1+	19-25	20-23	25-30	32-38	31-37	33-39	49-57	57-67	110	80
M-	2-	22-28	23-26	28-33	35-41	34-40	36-42	40-48	47-57	110	80
M	2	22-28	23-26	28-33	35-41	34-40	36-42	45-53	52-62	120	90
M+	2+	22-28	23-26	28-33	35-41	34-40	36-42	53-61	62-72	120	90
L-	3-	25-31	26-29	31-36	38-44	37-43	39-45	45-53	52-62	120	90
L	3	25-31	26-29	31-36	38-44	37-43	39-45	49-57	57-67	120	90
L+	3+	25-31	26-29	31-36	38-44	37-43	39-45	57-65	67-77	130	100
XL-	4-	28-34	29-32	34-39	41-47	40-46	42-48	49-57	57-67	120	90
XL	4	28-34	29-32	34-39	41-47	40-46	42-48	53-61	62-72	130	100
XL+	4+	28-34	29-32	34-39	41-47	40-46	42-48	61-69	72-82	130	100
XXL	5	31-37	32-35	37-42	44-50	43-49	45-51	57-65	67-77	130	100

		Длина		
новый	старый	short	normal	long
старый		UK ультра-коротк.	K короткая	D длинная
Икроножные A-D			34-38	38-43
Бедренные A-G		56-62	62-71	71-82
Колготки				

## Avicenum ANTI-TROMBO

Размер	Измеряемый объем в точке		
	b	d	g
S	17-20	28-34	41-54
M	20-23	31-37	48-61
L	23-26	34-40	55-68
XL	26-29	37-43	62-75
XXL	29-32	40-46	69-82

## Avicenum 360 ARM SLEEVE (нарукавник)

Размер		Объем руки в точках измерения			
новый	старый	a	c	d	g
S	1	до 18	16-19	22-26	24-30
M	2	до 20	19-22	26-30	30-36
L	3	до 23	22-25	30-34	36-42
XL	4	до 25	25-28	34-38	42-48

		Длина	
новый	старый	normal	long
старый		K короткая	D длинная
C-G		менее 45	более 45

## Avicenum 70

		Размер AT	
новый	старый		
S		158-164/100	
S+		158-164/116-124	
M		164-170/108	
M+		164-170/116-124	
L		170-176/108-116	
L+		170-176/116-124	
XL		176-182/108-116	
XL+		176-182/116-124	

Размер AG	
новый	старый
M	25
L	27
XL	29

Этот материал носит исключительно информационный характер и не представляет собой обязывающее предложение.