

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


DAT-1 Алкотестер

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки GARIN® «Точные Промилле». GARIN® гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

Алкотестер GARIN® «Точные Промилле» DAT-1 предназначен для индивидуального использования. Данная модель отличается простотой использования и высокой скоростью измерения результатов. Благодаря небольшим размерам прибор легко помещается в бардачке, в сумке или в кармане.

ПОРЯДОК РАБОТЫ


1. ВКЛЮЧЕНИЕ

Для того чтобы включить устройство, необходимо нажать кнопку питания «» один раз. На экране появится символ «Warm up» («Прогревание»), сопровождаемый звуковой индикацией, и начнется обратный отсчет от 10 до 0.

2. ТЕСТИРОВАНИЕ

Когда отсчет от 10 до 0 будет закончен, прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись «Blow» («Дышите»), устройство готово к использованию. Поднесите прибор ко рту и дуйте в отверстие не менее 5 секунд, для получения наиболее достоверного результата рекомендуется дуть в течение 10 секунд. Результат отображается после звуковой индикации символом «Result» одновременно в двух единицах измерения: г/л и % ВАС.


Рекомендуется подождать как минимум 20 минут после принятия алкоголя перед тестированием, так как алкоголь до истечения этого времени еще остается в ротовой полости. Не ешьте и не курите 20 минут до тестирования. Рекомендуется также подождать как минимум 3 минуты перед очередным тестированием.

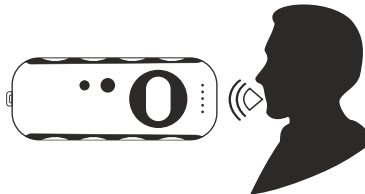

Символ «Caution» («Осторожно») появляется, когда концентрация алкоголя низкая (0.02%-0.05% ВАС).

Символ «Danger» («Опасно») появляется, когда концентрация алкоголя высокая (более 0.05% ВАС).

3. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для выключения устройства необходимо нажать на кнопку питания «» один раз или выключение произойдет автоматически через 10 секунд. На дисплее появится символ «Off» («Выключение»). Выключение сопровождается двойным звуковым сигналом.

Внимание: для достижения более точных результатов, рекомендуется повторить тест 2-3 раза!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ЖК дисплей со звуковой индикацией процесса работы
2. Тип сенсора: полупроводниковый оксидный
3. Измерение в промилле и % ВАС
4. Диапазон измерений: 0,0...1,9 г/л, 0,00...0,19 % ВАС
5. Точность измерения: 0.01% ВАС, предназначено для использования более 1000 раз
6. Алкотестер работает от 2-х батареек 1,5 В ААА
7. Быстрое прогревание (менее 10 сек.) и вывод результатов (менее 10 сек.)
8. Алкотестер оснащен встроенным фонариком
9. Автоматическое отключение: через 10 секунд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Если алкотестер используется впервые, а также, если прибор не использовался в течение длительного времени, процедуру прогрева следует повторить как минимум 2 или более раза подряд.
2. Символ «LO» обозначает низкий заряд батареи. Устройство автоматически отключится по прошествии 5 секунд. Необходимо будет произвести замену батареи.
3. Рекомендуется подождать как минимум 20 минут после принятия алкоголя перед тестированием, так как алкоголь до истечения этого времени еще остается в ротовой полости.
4. Рекомендуется подождать как минимум 3 минуты перед очередным тестированием.
5. Не ешьте и не курите 20 минут до тестирования.
6. Не вливайте жидкость в дыхательную трубку.
7. Не используйте сильно пахнущие жидкости рядом с прибором.
8. Не помещайте прибор в закрытое пространство с загрязненным воздухом.
9. Результаты теста приводятся исключительно для ознакомления, производитель не несет никакой юридической ответственности за результаты тестов.