

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Использовать ручную стирку мягкими моющими средствами при температуре не выше +30°C. Во время стирки не тереть и не выкручивать. При сушке избегать контакта с прямыми источниками тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке. Не подвергать воздействию высоких температур (выше +120°C).

Состав: хлопок 40%, нейлон 30%, поливискон 15%, эластан 15%, застежка Velcro (липучка).

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Срок хранения: 5 лет от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.


Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.



ISO 9001
ISO 13485

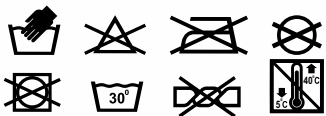

Производитель: Хегели Ортопедик Урунлер Сан. Ве Тик. Лтд. Сти. Джихангир
Мах. Сехит Пивядеёр Явуз Бахар Сок. №4 Мираббо СанаиСитези Д; Блок Кат: 3
Амбарли, Авджилар, Стамбул, Турция.

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland



Бандаж на голеностопный сустав

ARA2406

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Данный бандаж изготовлен из высококачественного материала с содержанием 40% хлопка, что делает использование изделия максимально безопасным и комфортным. Высокое качество изделия подтверждено международными и европейскими сертификатами на соответствие стандартам качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Лёгкие повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.
- Профилактика травм голеностопного сустава при занятиях спортом и интенсивных физических нагрузках.
- Реабилитация после травм и операций на голеностопном суставе.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Разъемная конструкция изделия обеспечивает удобство при надевании бандажа.
- Анатомическая форма с открытой пяткой более удобна для ежедневного использования.
- Застежка «Velcro» обеспечивает надежную фиксацию изделия и делает его удобным в эксплуатации.

- Подходит для левой и правой ноги.
- Натуральное волокно в составе изделия обеспечивает воздухопроницаемость и мягкое прилегание, повышает стойкость изделия при носке.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимый размер биндажа подбирается по обхвату голеностопного сустава по косточке согласно таблице. Индивидуальный режим и сроки ношения биндажа определяет врач.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для более эффективного действия изделия перед началом его использования проконсультируйтесь с врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Местные заболевания кожи являются противопоказанием для применения изделия. При гиперчувствительности к компонентам материала изделие необходимо надевать на нижнее белье. Не надевать изделие во время применения согревающих мазей в области голеностопного сустава.

Подбирать размер необходимо непосредственно по обхвату голеностопного сустава по косточке, согласно таблице:

Область измерения	Размеры	
	1	2
Обхват голеностопного сустава по косточке, см	20 – 27	28 – 35



При измерении обхвата голеностопного сустава сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не нужно слишком ее натягивать или ослаблять.

СХЕМА НАДЕВАНИЯ


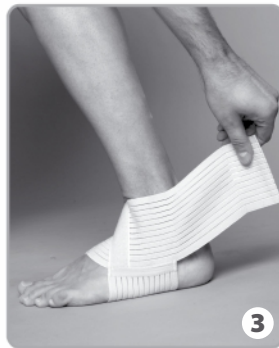


СХЕМА НАДЕВАНИЯ

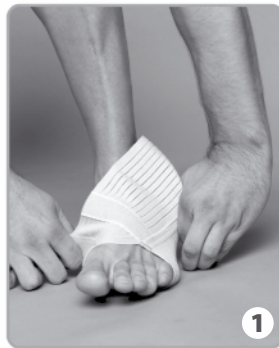