


prolife orto

Бандаж  
согревающий



Бандаж  
послеоперационный

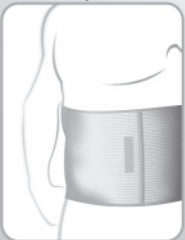

Корсет  
поясничный




Корсет  
поясничный



Дородовый  
бандаж



Бандаж  
поддерживающий для руки

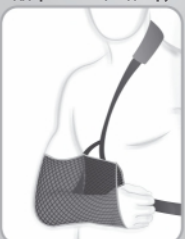


Корректор  
осанки



Корректор осанки  
детский



Корсет  
грудо-поясничный

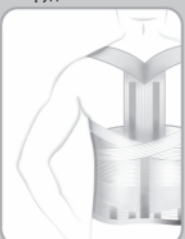

prolife orto

Бандаж  
на коленный сустав



Бандаж  
на коленный сустав



Бандаж  
на коленный сустав



Бандаж  
на коленный сустав



Бандаж  
на голеностопный сустав



Бандаж  
на голеностопный сустав



prolife orto

## Бандаж послеоперационный

ARC420

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Данный бандаж изготовлен из высококачественного материала с содержанием 40% хлопка, что делает использование изделия максимально безопасным и комфортным. Высокое качество изделия подтверждено международными и европейскими сертификатами на соответствие стандартам качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Профилактика образования послеоперационных грыж.
- Используется для подтяжки живота и улучшения силуэта в эстетических целях.
- Используется в период восстановления после нормальных родов.

#### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Плотная и нерастяжимая передняя панель бандажа обеспечивает надежную фиксацию и поддержку передней брюшной стенки и способствует заживлению послеоперационного шва.
- Застежка «Velcro» обеспечивает надежную фиксацию изделия и делает его удобным в эксплуатации.
- Бандаж изготовлен из воздухопроницаемого материала, который создает комфорт при использовании в любое время года. Прочность и эластичность материала обеспечивает необходимую фиксацию и поддержку.

[www.prolife-orto.com](http://www.prolife-orto.com)

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,  
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

- Интегрированная петля помогает зафиксировать изделие без дополнительных усилий и посторонней помощи.
- Натуральное волокно в составе изделия обеспечивает воздухопроницаемость и мягкое прилегание, повышет стойкость изделия при носке.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие рекомендуется надевать на нижнее белье. На глубоком вдохе при втянутом животе необходимо зафиксировать пояс на животе с помощью застежки-липучки. Отрегулируйте прилегание изделия, учитывая особенности фигуры.

## ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

От 2 до 12 часов в сутки в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций врача. Индивидуальный режим и сроки использования определяет врач. Необходимость применения изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не прекращать использование изделия без согласования с врачом.


## ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед началом его использования проконсультируйтесь с врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Местные заболевания кожи являются противопоказанием для применения изделия. При гиперчувствительности к компонентам материала изделие необходимо надевать на нижнее белье. Не надевать изделие при использовании согревающих мазей в области поясницы.

## СХЕМА НАДЕВАНИЯ

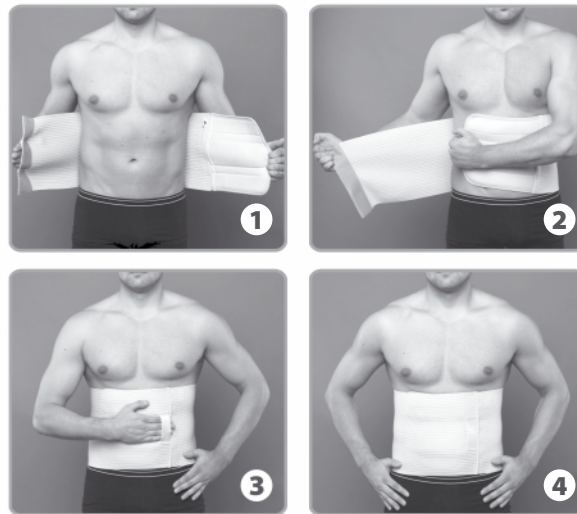

Подбирать размер необходимо непосредственно по обхвату талии согласно таблице:

Область измерения	Размеры				
	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



При измерении обхвата талии сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не нужно слишком ее натягивать или ослаблять.

## УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Использовать ручную стирку мягкими моющими средствами при температуре не выше +30°C. Во время стирки не тереть и не выкручивать. При сушке избегать контакта с прямыми солнечными лучами. Не гладить. Не отбеливать (не использовать моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке. Не подвергать воздействию высоких температур (выше +120°C).

**Состав:** хлопок 40%, нейлон 30%, поливискон 15%, эластан 15%, застежка Velcro (липучка).

**Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

**Срок хранения:** 5 лет от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

**Гарантийный срок:** 12 месяцев с даты покупки.

**Дата производства:** см. на упаковке.

**Размер:** см. на упаковке.

CE ISO 9001  
ISO 13485



**Производитель:** Хегели Ортопедик Урунлер Сан. Ве Тек Лтд. Сти, Джихангир Мах. Сехит ПиядеЕр Явуз Бахар Сок. №4 Мираббо СанаиСитези Д; Блок Кат. 3 Амбарли, Авджиляр, Стамбул, Турция.