


prolife orto

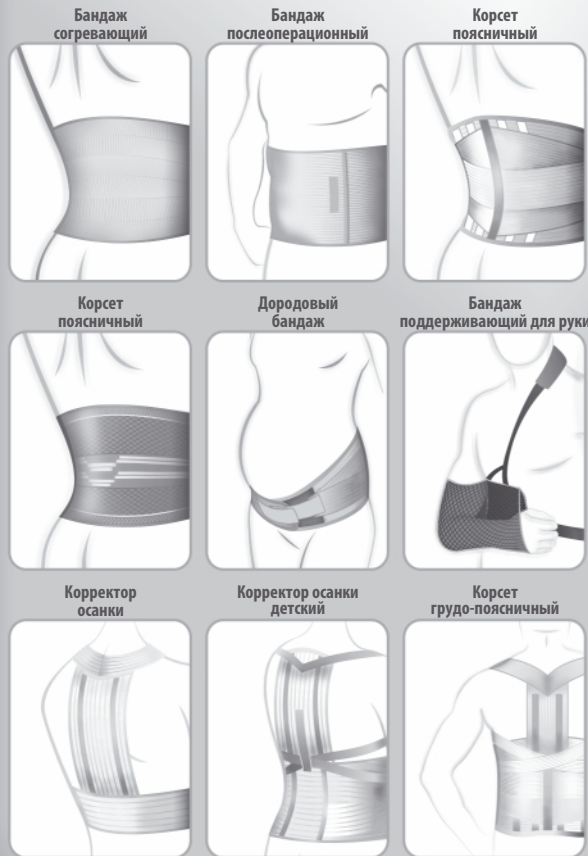

prolife orto



www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

prolife orto

Бандаж на коленный сустав

ARK2101B

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Данный бандаж изготовлен из высококачественного материала, что делает использование изделия максимально безопасным и комфортным. Высокое качество изделия подтверждено международными и европейскими сертификатами на соответствие стандартам качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Боли в коленном суставе, обусловленные артритами, синовитами и бурситами.
- Профилактика травм коленного сустава при занятиях спортом и физическим трудом.
- Реабилитация после травм и операций на коленном суставе.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Бандаж усилен силиконовым кольцом в области коленной чашечки, что позволяет дополнительно стабилизировать надколенник, защитить его и уменьшить болевой синдром.
- Эластичная вставка на задней части бандажа не оказывает избыточное давление на область подколенной ямки и предотвращает потертости при носке.
- Регулятор-застежка позволяет более точно подогнать изделие по индивидуальным формам бедра (в размерах XXL и XXXL имеется дополнительная регулятор-застежка в области голени).

- Анатомический дизайн изделия обеспечивает лучшее прилегание к телу, что способствует высокому комфорту при ношении.
- Бандаж изготовлен из трехслойного композитного материала AEROTEX — воздухопроницаемого и эластичного материала, обладающего согревающим и микромассажным действием.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие необходимо надевать на колено более широкой частью, зафиксировав прилегание с помощью застежки-липучки. Подходит для правой и левой ноги.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед началом использования изделия проконсультируйтесь с врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Местные заболевания кожи являются противопоказанием для применения изделия. При гиперчувствительности к компонентам материала изделие необходимо надевать на нижнее белье. Не надевать изделие при использовании согревающих мазей в области коленного сустава.

Подбирать размер необходимо непосредственно по обхвату колена согласно шкале:

Область измерения	Размеры					
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Обхват колена, см	34 – 36	36 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47	47 – 50



При измерении обхвата колена, сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не нужно слишком ее натягивать или ослаблять.

СХЕМА НАДЕВАНИЯ



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Использовать ручную стирку мягкими моющими средствами при температуре не выше +30°C. Во время стирки не тереть и не выкручивать. При сушке избегать контакта с прямыми источниками тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке. Не подвергать воздействию высоких температур (выше +120°C).

Состав: полиэстер 40%, поролон 60%, застежка Velcro (липучка), силиконовое кольцо.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Срок хранения: 5 лет от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

CE ISO 9001
ISO 13485



Производитель: Хегели Ортопедик Урунлер Сан. Ве Тик Лтд. Сти. Джихангир Мах. Сехит ГиядеЕр Явуз Бахар Сок. №:4 Мираббо СанаиСитези Д; Блок Кат: 3 Амбарли, Авджиляр, Стамбул, Турция.