


prolife orto

Бандаж
согревающий



Бандаж
послеоперационный

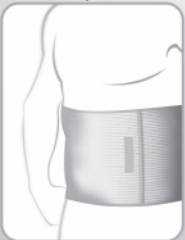

Корсет
поясничный




Корсет
поясничный



Дородовый
бандаж



Бандаж
поддерживающий для руки

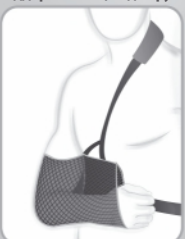


Корректор
осанки



Корректор осанки
детский



Корсет
грудо-поясничный

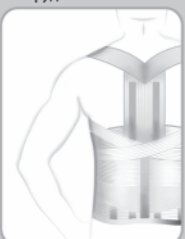

prolife orto

Бандаж
на коленный сустав



Бандаж
на коленный сустав



Бандаж
на коленный сустав



Бандаж
на коленный сустав



Бандаж
на голеностопный сустав



Бандаж
на голеностопный сустав



prolife orto

Бандаж на коленный сустав

ARK9103

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Данный бандаж изготовлен из высококачественного материала, что делает использование изделия максимально безопасным и комфортным. Высокое качество изделия подтверждено международными и европейскими сертификатами на соответствие стандартам качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Лечение ушибов, частичных повреждений связок коленного сустава.
- Профилактика травм коленного сустава при занятиях спортом и физическим трудом.
- Реабилитация после травм и операций на коленном суставе.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Бандаж усилен силиконовым кольцом в области коленной чашечки, что позволяет дополнительно стабилизировать надколенник, защитить его и уменьшить болевой синдром.
- Пружинные вставки обеспечивают дополнительную фиксацию и снижают нагрузку на сустав при движении. Также предотвращают скручивание изделия при носке.
- Специальное плетение по краям бандажа позволяет избежать скручивания краев и предупреждает сдавливание мягких тканей.

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

- Интегрированные силиконовые полоски предотвращают соскальзывание изделия и обеспечивают комфорт при носке.
- Материал бандажа изготовлен по уникальной технологии трехмерной вязки из воздухо- и влагопроницаемых материалов, оптимально облегаящих сустав и создающий компрессионный эффект.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие необходимо надевать на колено более широкой частью. Подходит для правой и левой ноги.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед началом использования изделия проконсультируйтесь с врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Местные заболевания кожи являются противопоказанием для применения изделия. При гиперчувствительности к компонентам материала изделие необходимо надевать на нижнее белье. Не надевать изделие при использовании согревающих мазей в области коленного сустава.

Подбирать размер необходимо непосредственно по обхвату колена согласно таблице:

Область измерения	Размеры				
	S	M	L	XL	XXL
Обхват колена, см	34 – 36	36 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47



При измерении обхвата колена сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не нужно слишком ее натягивать или ослаблять.

СХЕМА НАДЕВАНИЯ



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Использовать ручную стирку мягкими моющими средствами при температуре не выше +30°C. Во время стирки не тереть и не выкручивать. При сушке избегать контакта с прямыми источниками тепла. Не отбеливать (не использовать моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке. Не подвергать воздействию высоких температур (выше +120°C).

Состав: полиамид 55%, эластан 45%, силиконовое кольцо, 2 пружинные вставки.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.


Срок хранения: 5 лет от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

CE ISO 9001
ISO 13485

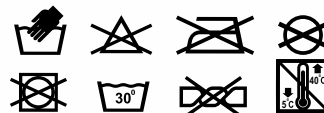

Производитель: Хегели Ортопедик Урунлер Сан. Ве Тик. Лтд. Сти. Джихангир
Мах. Сехит ГийдеР Явуз Бахар Сок. No4 Мираббо СанаиСитези Д. Блок Кат: 3
Амбарли, Авджилар, Стамбул, Турция.