



## Бандаж согревающий

ARYK01

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Бандаж изготовлен из высококачественного материала, что делает использование изделия максимально безопасным и комфортным. Высокое качество изделия подтверждено международными и европейскими сертификатами на соответствие стандартам качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Профилактика переохлаждения в поясничной области.
- Лечение миозитов в поясничной области.
- Профилактика радикулита.

#### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Анатомический дизайн изделия обеспечивает лучшее прилегание к телу, что способствует высокому комфорту при ношении.
- Застежка «Velcro» обеспечивает надежную фиксацию изделия и делает его удобным в эксплуатации.
- Бандаж изготовлен из современного материала ACRILIC WOOL, обладающий выраженным согревающим эффектом.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие рекомендуется надевать на нижнее белье. На глубоком вдохе при втянутом животе необходимо зафиксировать пояс на животе с помощью застежки-липучки. Отрегулируйте прилегание изделия, учитывая особенности фигуры.

[www.prolife-orto.com](http://www.prolife-orto.com)

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,  
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Индивидуальный режим и сроки использования определяет врач. Необходимость использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не прекращать использование изделия без согласования с врачом.

### ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед началом использования изделия проконсультируйтесь с врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Местные заболевания кожи являются противопоказанием для применения изделия. При гиперчувствительности к компонентам материала изделие необходимо надевать на нижнее белье. Не надевать изделие при использовании согревающих мазей в области поясницы.

Подбирать размер необходимо непосредственно по обхвату талии согласно таблице:

Область измерения	Размеры				
	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



При измерении обхвата талии сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не нужно слишком ее натягивать или ослаблять.

### СХЕМА НАДЕВАНИЯ



### УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Использовать ручную стирку мягкими моющими средствами при температуре не выше +30°C. Во время стирки не тереть и не выкручивать. При сушке избегать контакта с прямыми источниками тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке. Не подвергать воздействию высоких температур (выше +120°C).

**Состав:** акриловая шерсть 60%, полиэстер 20%, эластан 20%, застежка Velcro (липучка).

**Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

**Срок хранения:** 5 лет от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

**Гарантийный срок:** 12 месяцев с даты покупки.

**Дата производства:** см. на упаковке.

**Размер:** см. на упаковке.



**Производитель:** Хегели Ортопедик Урунлер Сан. Ве Тик. Лтд. Сти. Джихангир Мах. Сехит Гиядеер Явуз Бахар Сок. No4 Мираббо СанайСитези Д: Блок Кат: 3 Амбарли, Авджиляр, Стамбул, Турция.