


Rightest® GM550 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ (ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ)

Порт для тест-полоски
Вставьте сюда тест-полоску до конца пока не услышите щелчок

Дисплей
Показывает результаты измерений и дает логические подсказки


Левая кнопка (◀)
Служит для просмотра результатов измерений, средних величин и настройки режимов

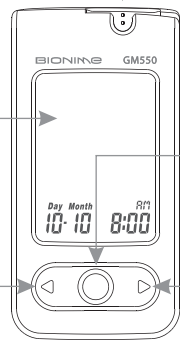

Крышка отсека для элементов питания
Для замены батареек – сдвинуть крышку вниз

Главная кнопка (⊙)
Служит для включения/выключения глюкометра и подсветки, переключения между различными режимами, входа в меню настроек


Правая кнопка (▶)
Служит для просмотра результатов измерений, средних величин и настройки режимов

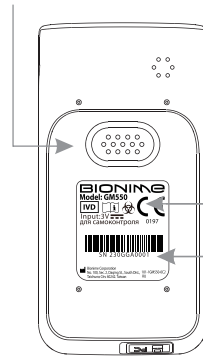

Название модели
Серийный номер глюкометра




Передняя панель глюкометра

Задняя панель глюкометра

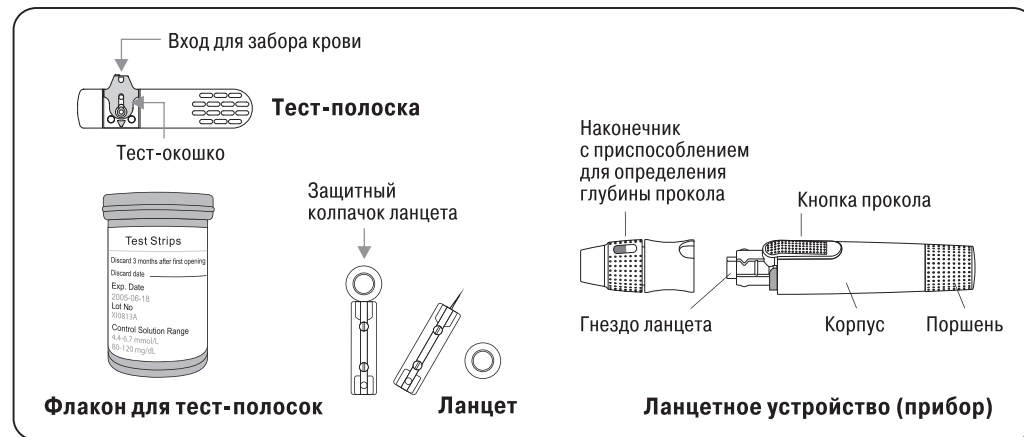

1 УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Поверните глюкометр обратной стороной к себе. Надавите и потяните вниз крышку отсека для батареек.
2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку скользящим движением пока не услышите щелчок.

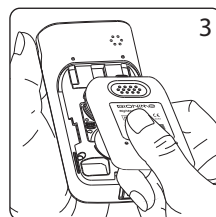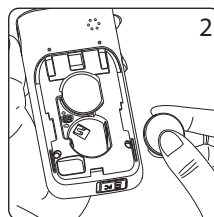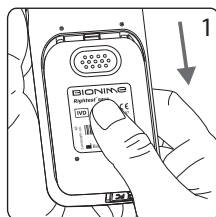

2 НАСТРОЙКА ГЛЮКОМЕТРА (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, ДАТЫ И ЗВУКА)

1. Нажмите и отпустите главную кнопку «⊙» для включения глюкометра
2. Нажмите и удерживайте главную кнопку 7 секунд до того момента пока Вы не войдете в меню настроек. До входа в меню настроек экран глюкометра погаснет, пожалуйста, продолжайте держать кнопку нажатой пока не войдете в настройки. Символ года начнет мигать.
3. Нажмите левую «◀» или правую «▶» кнопку для изменения года
4. Нажмите главную кнопку для подтверждения настройки года и перехода к настройке месяца.






5. Повторите шаги 3 и 4 для установки даты, формата времени, часа, минут, звука.
6. После выполнения всех настроек нажмите на главную кнопку и Вы выйдете из меню настроек. На экране появится время и дата. Все настройки сохранены.




ПРИМЕЧАНИЕ
- Не используйте прибор вблизи источников электромагнитного излучения, это может привести к неточным результатам.
- Защищайте прибор от попадания воды, грязи и иных жидкостей.

3 ПОДГОТОВКА ЛАНЦЕТНОГО УСТРОЙСТВА (ПРИБОРА)

1. Удерживайте насадку на ланцетном устройстве (колпачок) в одной руке и ланцетное устройство в другой. Наклоните колпачок книзу, пока между колпачком и устройством не появится зазор.
2. Снимите колпачок с ланцетного устройства, раздвинув составные части ланцетного устройства в ротовоположные стороны.
3. Плотно установите новый одноразовый ланцет в гнездо.

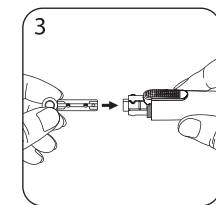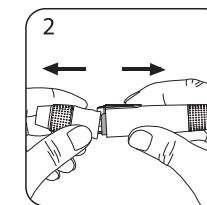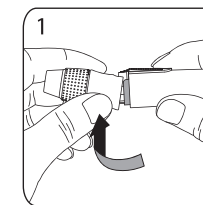


- Открутите защитный наконечник ланцета и пока отложите его. Не выбрасывайте его, он понадобится Вам по окончании измерения.
- Возвратите на место наконечник ланцетного устройства.
- Выберите необходимую глубину прокола, вращая прозрачную верхушку ланцетного устройства. Глубину прокола выбирайте по количеству красных штрихов на уровне окошка ланцетного устройства согласно типам кожи: «□□□» для мягкой и тонкой кожи;
«□□□□» для кожи средней толщины;
«□□□□□» для толстой или мозолистой кожи.
- Удерживая устройство одной рукой, другой оттяните поршень — механизм будет взведен. Отпустите поршень, он автоматически возвратится в свое первоначальное положение.

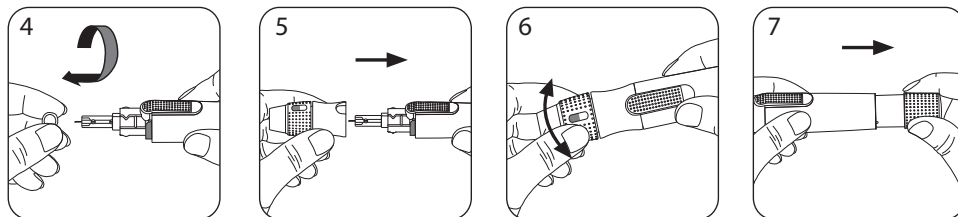


4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

- Вымойте руки теплой водой с мылом и тщательно высушите их. Достаньте новую тест-полоску из флакона и немедленно закройте крышку. Тест-полоска вставлена, если раздался звуковой сигнал, и тест-полоска не двигается. Глюкометр включается автоматически.
- Дождитесь появления на дисплее мигающего значка капли. После его появления глюкометр готов к проведению анализа. Приложите ланцетное устройство к боковой поверхности подушечки пальца и нажмите кнопку на боковой поверхности ланцетного устройства. Рекомендуется брать кровь из безымянного пальца.

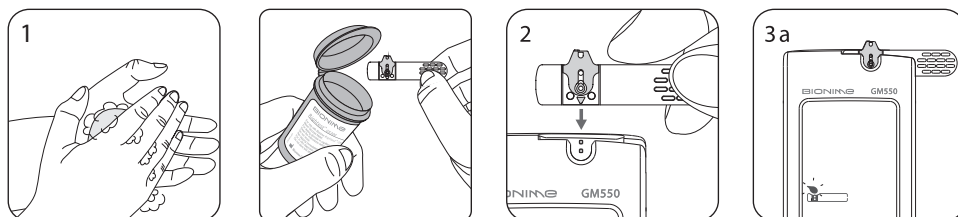


- Выдавите небольшое количество крови. Для проведения анализа достаточно 0,75 мкл крови. Если в качестве пробы крови была использована слишком большая (более 3,0 мкл) или слишком маленькая (менее 0,75 мкл) капля крови, для получения корректного результата измерение рекомендуется повторить, используя новую тест-полоску.

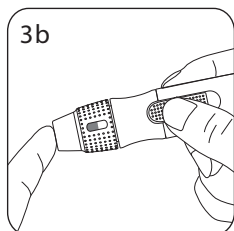

Образцы проб крови



- Каплейкой крови осторожно дотроньтесь входа для забора крови и держите палец до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал, и пока тест-окошко полностью не заполнится кровью. Если тест-окошко заполнено кровью не полностью и/или измерение не начинается, удалите тест-полоску и повторите измерение с новой.
- Как только кровь поступит в тест-полоску, на дисплее появится режим обратного отсчета. Результат измерения выводится на дисплей через 5 секунд.

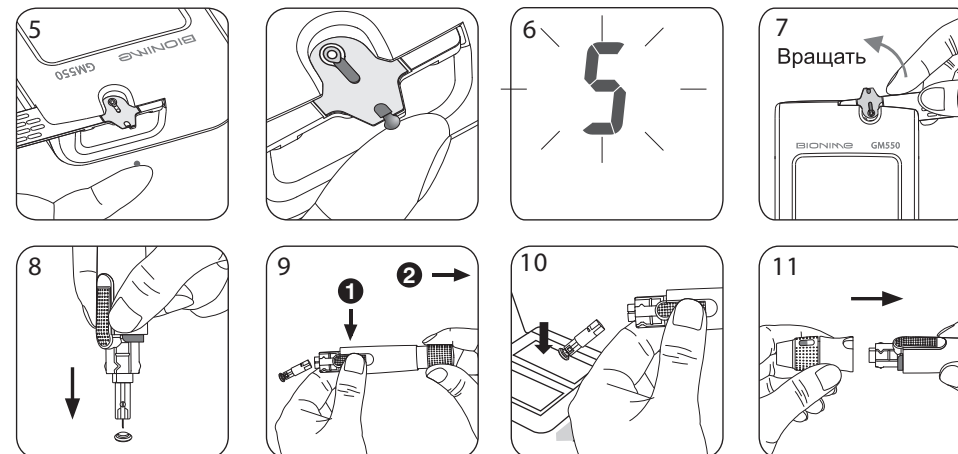

- Вращательным движением против часовой стрелки достаньте тест-полоску. Следуйте, пожалуйста, местным правилам утилизации использованных тест-полосок.
- Снимите наконечник ланцетного устройства. Возьмите ланцетное устройство как карандаш и воткните ланцет в защитный наконечник ланцета.
- Нажимая кнопку прокола одной рукой, другой оттяните поршень устройства — использованный ланцет будет автоматически удален.
- Соблюдайте правила утилизации использованных острых предметов. Утилизируйте использованные ланцеты в специальных контейнерах для острых предметов или для биологически опасных веществ.
- После завершения измерения совместите корпус ланцетного устройства и наконечник с приспособлением для определения глубины прокола.

Более подробную информацию о том, как пользоваться глюкометром и как интерпретировать результаты измерений, Вы можете прочитать в Руководстве для пользователя.

BIONIME
BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: 886-4-23692388
Fax: 886-4-22617586
E-mail: info@bionime.com
Website: www.bionime.com

EC REP
EU Representative:
BIONIME GmbH
Tramstrasse 16
9442 Berneck
Switzerland
E-mail: info@bionime.ch



0197

101-3GM550-0G3
RU
Rev. Date: 2018-05