

## ИНСТРУКЦИЯ

**Сборная** (передняя+задняя) поддержка для собак малых, средних и крупных пород.

### Описание.

Поддержка сборная для грудных и тазовых конечностей предназначена:

- для восстановления двигательной активности в реабилитационный период животных, перенёсших травму позвоночника;
- при парезах и параличах конечностей;
- при спондилезах и остеохондрозах;
- при мышечной дистрофии конечностей;
- при патологиях суставного аппарата;
- для поддержания конечностей и позвоночного столба животного в анатомически-правильном положении;
- для помощи владельцу при выполнении таких манипуляций с животным, как поддержка, прогулка, посадка в автомобиль и т.д.

Рекомендовано к использованию животным перенёсшим ампутацию конечности.

Ускоряет реабилитацию, обеспечивает возможность прогулки.

Благодаря двум ручкам и особой конструкции, нагрузка при использовании поддержки распределяется равномерно, что обеспечивает минимальную патологическую подвижность позвоночника в грудном, поясничном и крестцовом отделах.

Поддержка состоит из четырех основных частей: верхней детали грудного отдела позвоночника, верхней детали крестцового отдела позвоночника, нижней детали живота и нижней детали груди, соединяющихся между собой регулируемые застежками «фастекс». В комплект входят два вида длинных ручек, оснащённых ремнями: на две точки опоры для поддержания туловища животного в грудном и крестцовом отделах позвоночника и на четыре точки опоры для поддержания животного только в крестцовом отделе позвоночника. Верхние детали грудного и крестцового отделов поддержки снабжены короткими ручками для вспомогательных манипуляций при движении животного. На верхних и нижних деталях изделия имеется маркировка (шея/хвост) для определения правильного положения детали на животном.

### Размеры.

Определяются по весу и обхватам животного.

- Р-р 1. 10-25 кг. Обхват груди 50 — 64 см, обхват талии 44 — 56 см,
- р-р 2. 20-35 кг. Обхват груди 64 — 76 см, обхват талии 60 — 72 см,
- р-р 3. 30-45кг. Обхват груди 68 — 80 см, обхват талии 66 — 78 см,
- р-р 4. 40-55кг. Обхват груди 78 — 90 см, обхват талии 70 — 82 см,
- р-р 5. 50+ кг. Обхват груди 82 — 100 см, обхват талии 72 — 86 см,

### Подготовка к применению.

Для того, чтобы поддержка полностью выполняла свои функции, перед применением необходимо обеспечить правильную посадку изделия на теле животного.

Для этого необходимо:

- Надеть поддержку на собаку.
- Плотно затянуть регулирующие ремни.
- Симметрично распределить регулировку ремнями относительно правой и левой стороны изделия. При положении на животном расстояние между деталями спинки и живота/груди должно быть одинаковым относительно линии позвоночника.

*Поддержка должна плотно сидеть на животном, но при этом не сдавливать грудную клетку и живот.*

*Для предотвращения самопроизвольного растягивания защелки «фастекс» необходимо убедиться, что при соединении деталей фастекса произошёл щелчок.*

### Как правильно надевать и снимать поддержку.

#### Надевать:

- Соединить фастексами верхнюю деталь грудного отдела (с широкой стороны) с нижней деталью груди сзади локтевого сустава передней лапы с правой (или левой) стороны.

- Наложить изделие на животное.
- Соединить симметричные фастексы с левой (или правой) стороны.
- Соединить фастексы, находящиеся в районе шеи животного (на деталях имеется бирка с соответствующим обозначением), проведя по груди между передними лапами соответствующие части нижней детали.
- Соединить фастексами верхнюю деталь крестцового отдела (с широкой стороны) с нижней деталью живота в районе талии с правой (или левой) стороны.
- Наложить изделие на животное.
- Соединить фастексы, находящиеся в районе хвоста животного (на деталях имеется бирка с соответствующим обозначением), проведя по животу между задними лапами соответствующие части нижней детали (более длинные и узкие, образующие V).
- Соединить фастексом детали спинки грудного и крестцового отделов.
- Соединить фастексом детали грудной части и живота.
- Проверить посадку изделия на животном.
- При необходимости пристегнуть вспомогательные ремни карабинами к верхней части детали за полукольца, расположенные около фастексов и на ручке изделия.

#### **Снимать:**

- Прodelать вышеперечисленные действия в обратном порядке.

#### **В комплекте:**

1. верхняя деталь грудного отдела,
2. верхняя деталь крестцового отдела,
3. нижняя деталь живота,
4. нижняя деталь груди,
5. ремень для поддержания крестцового отдела (на четыре точки опоры),
6. ремень для поддержания животного (на две точки опоры),
7. инструкция по применению.

#### **Уход за изделием.**



#### **Материалы.**

Материал верха — оксфорд (100% пэ). Материал подкладки — неопрен.(100% пэ, синтетический каучук.)