

ИНСТРУКЦИЯ

Задняя поддержка для собак малых, средних и крупных пород.

Описание.

Поддержка задняя для тазовых конечностей предназначена:

- для восстановления двигательной активности в реабилитационный период животных, перенёсших травму позвоночника;
- при парезах и параличах конечностей;
- при спондилезах и остеохондрозах;
- при патологиях суставного аппарата;
- при возрастных проблемах;
- поддержка крестцового отдела позвоночника и задних конечностей животного в физиологически правильном положении;
- для помощи владельцу при выполнении таких манипуляций с животным, как поддержка, прогулка, посадка в автомобиль и т.д.

Рекомендовано к использованию животным перенёсшим ампутацию конечности.

Ускоряет реабилитацию, обеспечивает возможность прогулки.

Благодаря двум ручкам и особой конструкции, нагрузка при использовании поддержки распределяется равномерно, что обеспечивает минимальную патологическую подвижность в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Поддержка состоит из двух основных частей: верхней детали крестцового отдела и нижней детали живота, соединяющихся между собой регулируемыми застёжками «фастекс».

В комплект входит длинная ручка-ремень с креплением на четыре точки опоры, для поддержания животного. Верхняя деталь поддержки снабжена короткой ручкой для помощи животному при движении. На верхних и нижних деталях изделия имеется маркировка («хвост») для определения правильного положения на теле животного.

Размеры.

Определяются по весу и обхватам животного.

- Р-р **1.** 10-25 кг. Обхват талии 44 — 56 см,
- р-р **2.** 20-35 кг. Обхват талии 60 — 72 см,
- р-р **3.** 30-45 кг. Обхват талии 66 — 78 см,
- р-р **4.** 40-55 кг. Обхват талии 70 — 82 см,
- р-р **5.** 50+ кг. Обхват талии 72 — 86 см.

Подготовка к применению.

Для того, чтобы поддержка полностью выполняла свои функции, перед применением необходимо обеспечить правильную посадку изделия на теле животного.

Для этого необходимо:

- Надеть поддержку на собаку.
- Плотно затянуть регулирующие ремни.
- Симметрично распределить регулировку ремнями относительно правой и левой стороны изделия. При положении на животном расстояние между деталями спинки и живота должно быть одинаковым относительно линии позвоночника.

Поддержка должна плотно сидеть на животном, но при этом не сдавливать живот.

Для предотвращения самопроизвольного расстегивания защёлки «фастекс» необходимо убедиться, что при соединении деталей фастекса произошел щелчок.

Как правильно надевать и снимать поддержку.

Надевать:

- Соединить фастексами верхние детали крестцового отдела (с широкой стороны) с нижней деталью живота в районе талии с правой (или левой) стороны.

- Наложить изделие на животное.
- Соединить симметричные фастексы с левой (или правой) стороны.
- Соединить фастексы, находящиеся в районе хвоста животного (на деталях имеется бирка с соответствующим обозначением), проведя по животу между задними лапами соответствующие части нижней детали (более длинные и узкие, образующие V).
- **Проверить посадку изделия на животном.**
- При необходимости пристегнуть вспомогательный ремень карабинами к детали спинки за полукольца, расположенные около фастексов.

Снимать:

- Прodelать вышеперечисленные действия в обратном порядке.

В комплекте:

1. верхняя деталь крестцового отдела,
2. нижняя деталь живота,
3. ремень для поддержания крестцового отдела (на четыре точки опоры),
4. инструкция по применению.

Уход за изделием.



Материалы.

Материал верха — оксфорд (100% пэ). Материал подкладки — неопрен. (100% пэ, синтетический каучук.)