

ИНСТРУКЦИЯ
по использованию
Спринцовок с мягким наконечником ТМ «Альпина Пласт»

Предназначение: для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального использования: для ирригации и отсасывания жидкости.

Материал: поливинилхлорид

Срок годности спринцовки: 5 лет со дня изготовления

Инструкция по применению спринцовок с мягким наконечником.

1. Перед применением спринцовку следует продезинфицировать методом кипячения в дистиллированной воде в течение 10 ± 5 минут.
2. Для дезинфекции в лечебных учреждениях используют метод погружения в 3% раствор перекиси водорода или в 3% раствор хлорамина согласно МУ 287-113. По окончании дезинфекционной выдержки спринцовку промывают проточной питьевой водой.
3. Перед применением наконечник спринцовки смазать вазелином, ланолином или другим нейтральным жиром. Спринцовка не должна контактировать с лекарственным раствором более 30 минут.
4. После применения спринцовку промыть горячей водой и просушить.

Хранение.

Спринцовку следует хранить в помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C . Спринцовка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

Изготовлено в соответствии с требованиями регламента REACH

Внимание! Спринцовку для маслосодержащих средств не применять!