

**Получай  
удовольствие!**



**Массажер для ног  
КТ-2936**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство массажера для ног .....	5
Подготовка к работе и использование .....	7
Чистка и обслуживание .....	9
Уход и хранение .....	10
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности .....	12
Другие товары Kitfort .....	14

## Общие сведения

С помощью массажера КТ-2936 можно сделать массаж стоп, не прибегая к посторонней помощи. Прибор сочетает в себе воздушно-компрессионный и роликковый массаж, а также нагрев. Три функции можно использовать по отдельности или комбинируя друг с другом.

В основе воздушно-компрессионного массажа лежит прессотерапия. Принцип действия прессотерапии основан на подаче сжатого воздуха низкого и высокого давления через манжеты, которые находятся внутри корпуса прибора. Воздействие сжатым воздухом осуществляется с перерывами.

У массажера пластиковый корпус с двумя отверстиями для ступней 46 размера. Внутри массажера есть съемные тканевые чехлы на молнии, которые можно стирать. Включение прибора и выбор массажа осуществляется с помощью панели управления, которая расположена прямо на корпусе. Вам нужно подключить устройство к сети, поместить ноги в отверстия, на панели управления выбрать отдельную функцию или их сочетание, уровень нагрева и интенсивность массажа.

Всего у массажера три режима работы:

- нагрев, сжатие, массаж;
- только сжатие;
- только массаж.

Прибор сжимает стопы и лодыжки, создавая эффект компрессии, массажные ролики воздействуют на акупунктурные точки, при этом осуществляется прогрев.

После 15-минутного сеанса сработает таймер с автоотключением.

Массажер КТ-2936 подарит тепло и уют, поможет снять напряжение и отеки, активизировать кровообращение, улучшить течение обменных процессов, облегчить симптомы при суставных болях, а проработка активных точек на стопах благотворно влияет на весь организм. Данное устройство не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Если у вас есть какие-либо заболевания, то перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.


Прорезиненные ножки не дают устройству скользить по полу.

## Комплектация


1. Массажер со съемными тканевыми чехлами — 1 шт.
2. Сетевой адаптер — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство массажера для ног

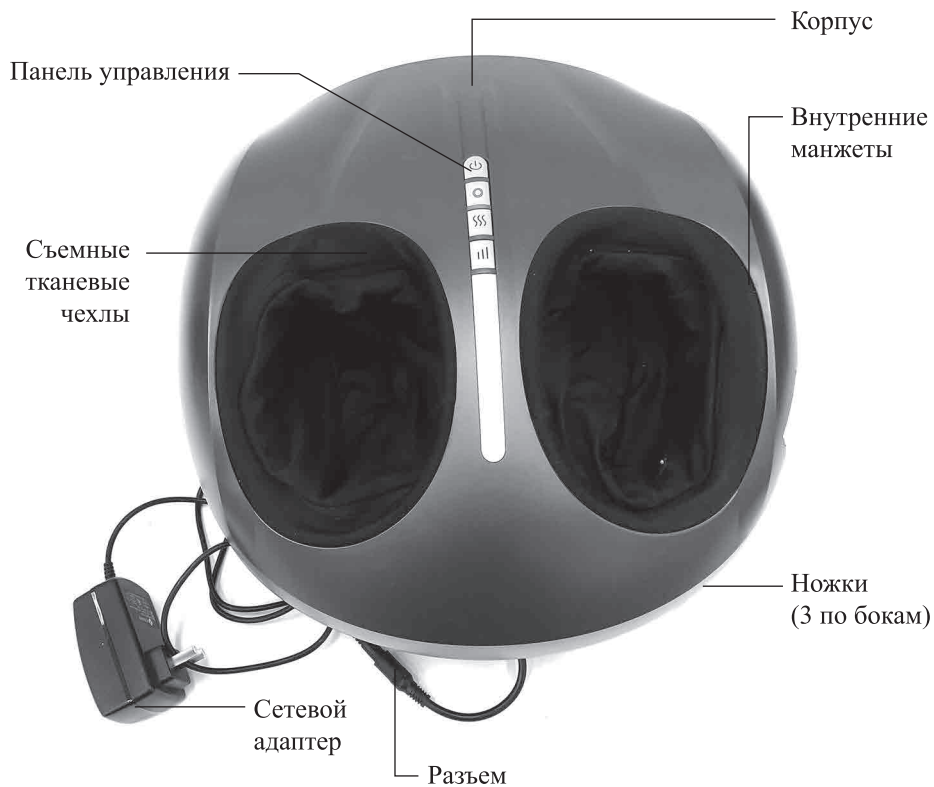

### Панель управления

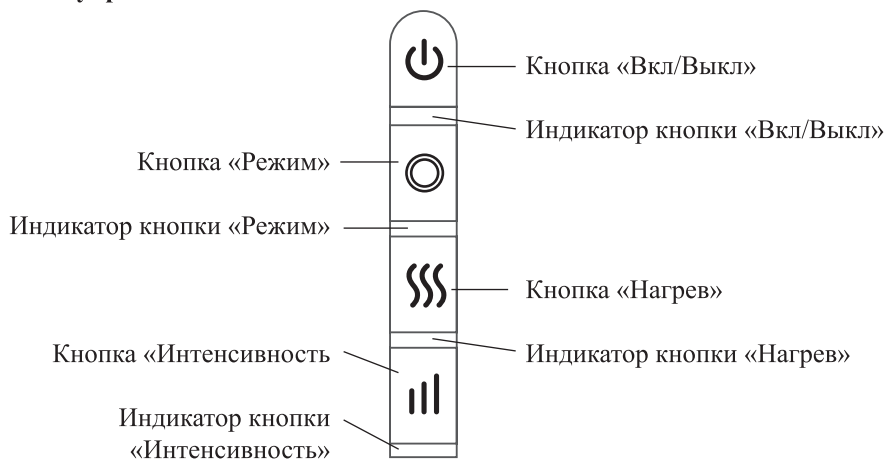

Массажер включается и выключается нажатием на **кнопку «Вкл/Выкл»**. При нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» загорится красным цветом индикатор данной кнопки. У массажера есть автоматическое отключение через 15 минут работы.

**Кнопкой «Режим»** выбираются режимы работы массажера:

- 1 режим работы: нагрев, сжатие, массаж,
- 2 режим работы: только сжатие;
- 3 режим работы: только массаж.

В первом режиме индикаторы кнопок будут гореть зеленым. Во втором режиме индикатор кнопки «Режим» будет гореть синим цветом. В третьем режиме индикатор кнопки «Режим» горит красным цветом.

**Кнопкой «Нагрев»** можно выбрать уровень нагрева — низкий и высокий, что соответствует зеленому и красному цвету индикатора кнопки «Нагрев».

**Кнопкой «Интенсивность»** выбирается сила воздушно-копресссионного и роликового массажа — низкая, средняя и высокая, что соответствует зеленому, синему и красному цвету индикатора кнопки «Интенсивность».

Таблица температуры при низком уровне нагрева:

Время (мин)	Температура (°C)
1	20±5
3	35±5
6	42±5
9	43±5
12	44±5
15	45±5

Таблица температуры при высоком уровне нагрева:

Время (мин)	Температура (°C)
1	22±5
3	38±5
6	43±5
9	46±5
12	49±5
15	50±5

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте массажер. Перед использованием проверьте изделие на наличие возможных повреждений, например, если есть повреждения шнура сетевого адаптера или внутренних манжет, то прибором пользоваться нельзя. При обнаружении повреждений массажером пользоваться нельзя.

Данное изделие предназначено для обогрева стоп и массажа ног. Не пользуйтесь массажером в обуви, т. к. из-за этого падает чувствительность к теплу, а сам массажер получает загрязнения. Используйте массажер на босую ногу или в носках.

Во избежание несчастных случаев протяните шнур питания таким образом, чтобы никто не мог споткнуться и случайно выдернуть его. Убедитесь, что шнур не контактирует с острыми и горячими предметами.

Если у вас грязные ноги, то помойте их, высушите и можете пользоваться массажером.


### Использование

1. Вставьте тканевые чехлы в отверстия массажера, зафиксируйте их липучками и молнией.
2. Подсоедините массажер к источнику питания. Для этого вставьте штекер сетевого адаптера в разъем провода, выходящего из корпуса прибора. Сетевой адаптер подключите к розетке. Прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится красным цветом.

**Внимание!** Не оставляйте работающий массажер без присмотра!

3. Сядьте на стул или в кресло, расслабьтесь. В коленях должно быть 90°, поставьте прибор, чтобы им было удобно пользоваться. Вставьте ноги в отверстия массажера.

**Внимание!** Запрещено опускать руки в отверстия массажера, прибор предназначен только для ног.

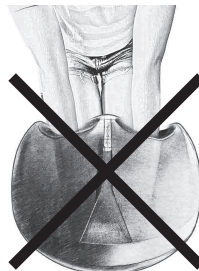

4. Включите массажер нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». Прибор начнет работать в режиме 1 — выбраны нагрев, сжатие и массаж. В режиме 1 индикаторы кнопка «Режим», «Нагрев» и «Интенсивность» будут гореть зеленым.

5. Установите режим 2 или 3, нажав на кнопку «Режим». В режиме 2 будет работать только воздушно-компрессионный массаж, в режиме 3 — только роликовый массаж. В режиме 2 индикатор кнопки «Режим» будет гореть синим цветом. В режиме 3 индикатор кнопки «Режим» будет гореть красным цветом.
6. Нажатие на кнопку «Нагрев» позволяет выбрать уровень нагрева стоп. Всего 2 уровня нагрева стоп — низкий и высокий, что соответствует зеленому и красному цвету индикаторов данной кнопки. Нагрев стоп можно выключить, при этом индикатор данной кнопки перестанет гореть каким-либо цветом.
7. Настройте силу воздушно-компрессионного и роликового массажа при помощи кнопки «Интенсивность» — низкая, средняя и высокая, что соответствует зеленому, синему и красному цвету индикатора данной кнопки.
8. Чтобы выключить прибор необходимо нажать на кнопку «Вкл/Выкл».
9. Один сеанс массажа длится 15 минут, далее прозвучит звуковой сигнал и сработает автоотключение. При этом индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет мигать красным цветом. По прошествии 15 минут индикатор кнопки погаснет. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

### **Меры предосторожности по применению**

1. Данное устройство не является медицинским прибором, если у вас есть какие-то заболевания, то перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом
2. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
  - инфекционные заболевания кожи;
  - остеопороз;
  - наличие электронных устройств, при заболевании сердца, например кардиостимулятора;
  - повышенная температура;
  - сахарный диабет.
3. Пользоваться с осторожностью при:
  - наличии открытых ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
  - нечувствительности к теплу;
  - переутомлении.
4. Массажером нельзя пользоваться:
  - во время сна или в душе;
  - детям, младше 12 лет;
  - беременным женщинам;
  - женщинам во время критических дней;
  - женщинам с миомой матки;
  - людям с повышенным давлением;
  - людям с онкологическими заболеваниями;
  - людям с различными переломами костей.



### Немного о прессотерапии

Процедура способствует улучшению внешнего вида и внутреннему состоянию организма.


За счет ритмичного сжатия стоп происходит активизация внутренних систем. В итоге, застоявшаяся снизу кровь и лимфа начинает двигаться быстрее по венам вверх.

Такое воздействие преимущественно направлено на мышечную ткань, поверхностные вены, кожные слои и жировую прослойку, лимфососуды.

Положительный эффект от прессомассажа заключается в следующем:

1. излишняя жидкость, скопившаяся в межклеточном пространстве, выводится через кожные покровы и почки;
2. организм очищается от шлаков и токсинов;
3. нормализуются обменные процессы;
4. восстанавливается водный баланс;
5. сосудистые стенки приобретают эластичность, а сами сосуды расширяются.

Через 2–3 сеанса появляется легкость в ногах, исчезает отечность, мышцы расслабляются.

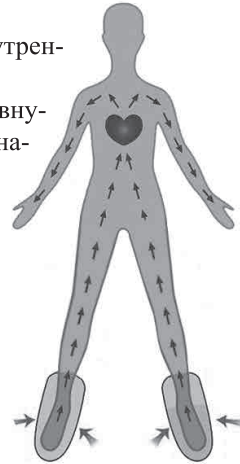

### Советы

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Данный массажер нельзя использовать людям, нечувствительным к воздействию тепла, детям от 0 до 3 лет, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, детям от 3 до 8 лет без присмотра. Не используйте массажер для обогрева животных: существует опасность прокусывания изоляции, которое может привести к травме от поражения электрическим током и возможной последующей гибели животного.

Используйте массажер не более 15 минут. Далее сработает автоотключение. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и можете снова запустить сеанс.

## Чистка и обслуживание

Необходимо регулярно поддерживать чистоту изделия, т. к. стирка массажера запрещена.

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Допускается стирать съемные тканевые чехлы при температуре не выше 30 °С.

Также их можно стирать в стиральной машине в режиме деликатной стирки при температуре не выше 30 °С. После стирки дайте чехлам высохнуть естественным путем и вставьте их обратно в отверстия массажера, закрепив липучками и молнией. Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.

## Уход и хранение

Перед хранением дайте массажеру остыть, а после этого очистите его.

Храните массажер в безопасном, прохладном и сухом месте, недоступном для детей.

Не ставьте и не храните изделие там, где оно может упасть в воду или другую жидкость.

Если не пользуетесь массажером долгое время, то убирайте его в коробку или пакет.

## Устранение неполадок

### Массажер не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вилка не вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку

### Массажер вдруг перестал работать

Возможная причина	Решение
Прошло 15 минут	Сработало автоотключение

### Массажер перегрелся

Возможная причина	Решение
Вы провели несколько сеансов подряд	Один сеанс массажа длится 15 минут, далее сработает автоотключение. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход:  $\sim 100\text{--}240\text{ В}$ , 50/60 Гц
  - выход:  $\approx 24\text{ В}$ , 1,5 А
2. Мощность: 36 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - Блока питания: II
  - Массажера: III
4. Длина шнура: 1,8 м
5. Автоотключение: через 15 минут
6. Размер устройства:  $340 \times 320 \times 390\text{ мм}$
7. Размер упаковки:  $395 \times 252 \times 450\text{ мм}$
8. Вес нетто: 3,5 кг
9. Вес брутто: 4,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение массажера, его аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа массажера, попадания жидкостей внутрь прибора или его несоответствующего использования.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование массажера будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением массажера к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте массажер, шнур питания в воду и другие жидкости.
5. Массажер не предназначен для общественного использования, применения в медицинских учреждениях.
6. Люди с кардиостимуляторами должны проконсультироваться со своими врачами или производителем кардиостимулятора перед использованием массажера, так как электронное и магнитное излучение может повлиять на функцию кардиостимулятора при определенных обстоятельствах.
7. Нельзя использовать массажер людям, нечувствительным к воздействию тепла.
8. Не используйте массажер для детей от 0 до 3 лет.
9. Не используйте массажер для людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и детей от 3 до 8 лет без присмотра.

10. Не используйте для обогрева животных.
11. Не дергайте, не скручивайте и не перегибайте шнур питания.
12. Не прокалывайте манжеты массажера булавками или другими металлическими предметами.
13. Не используйте массажер вместе с другими нагревательными приборами или водяными грелками.
14. Выключайте массажер, если не используете его.
15. Во избежание повреждений при отключении от сети потяните за вилку, никогда не тяните за шнур!
16. Вилка, шнур не должны контактировать с водой или любыми другими жидкостями.
17. Не использовать людям, склонным к недержанию мочи.
18. Никогда не прикасайтесь к изделию мокрыми руками. Ноги должны быть сухими во время процедуры массажа.
19. Не используйте массажер в ванной комнате или там, где прибор может намочить. Не используйте массажер, если тканевые чехлы влажные. Обязательно тщательно высушите тканевые чехлы перед использованием их в массажере.
20. Не используйте массажер, если шнур питания, вилка или другие части изделия повреждены. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
21. Не позволяйте детям играть с массажером.
22. Не используйте массажер во время грозы, т.к. существует риск поражения электрическим током.
23. Не оставляйте работающий массажер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете его длительное время или перед проведением обслуживания.
24. Храните массажер в недоступных детям местах.
25. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке изделия или получению травм.
26. Не кладите на массажер разные предметы.
27. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

### Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона



### Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

### Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87