


**С заботой
о твоём теле!**

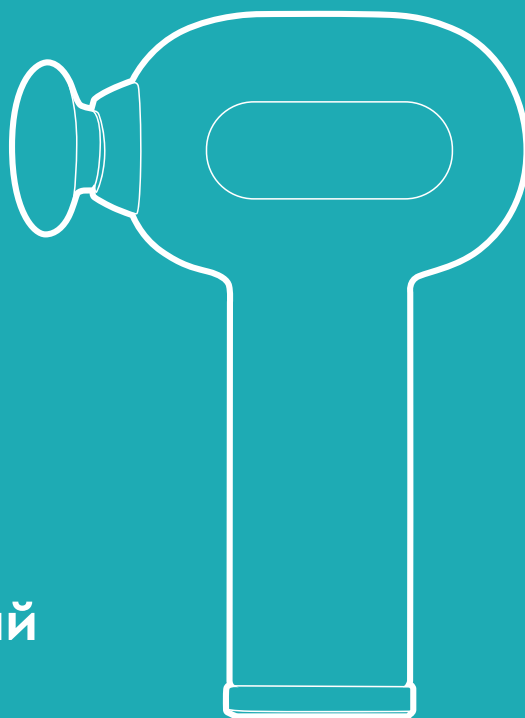

**Перкуссионный
массажер
КТ-2948**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство перкуссионного массажера.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики.....	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

Перкуссионный (ударный) массажер Kitfort КТ-2948 поможет избавиться от мышечной усталости, боли, спазмов и ограниченной подвижности.

Воздействуя на мышцы, массажер устраняет стресс и затекание мышц. Ударный массажер позволяет восстановить свободу движений, избавиться от токсических продуктов обмена веществ и улучшить кровообращение. Прибор помогает подготовить мышцы к интенсивным нагрузкам, повысить производительность тренировок, а также расслабить мышцы после тренировки. Глубокое ударное воздействие на мышечную ткань и фасции повышает мобильность и восстанавливает работу опорно-двигательного аппарата.

Использование направленной вибрации с определенной частотой и амплитудой не вызывает болезненных ощущений. Под действием ударной вибрации активизируется кровообращение и насыщение тканей кислородом, улучшается лимфодренаж и выведение токсических продуктов метаболизма. Массаж устраняет спазмы и зажимы мышц, восстанавливая естественную подвижность.

Каждая мышца имеет соединительнотканый футляр — фасцию, которая соединяет мышечные волокна и обеспечивает их движение. При сильном напряжении, травмах, больших нагрузках и с возрастом фасциальная ткань утрачивает эластичность, возникает «сцепление» фасции с мышцей. КТ-2948 восстанавливает функциональную подвижность и гибкость, благодаря чему можно расслабить группу спазмированных мышц.

Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью кнопки на задней стороне устройства. 3 уровня скорости позволяют подобрать комфортный, действенный массаж как для нетренированного человека, так и для спортсмена.

Насадки разных видов предназначены для воздействия на группы мышц и отдельные мышцы. Пулевидная насадка применяется для «разбивания» триггеров, проработки тканей и точечного массажа стоп. Чрезмерное напряжение, резкие движения, растяжение провоцируют возникновение триггерных точек — плотных болезненных узлов в мышцах. Пулевидная насадка действует на проблемные зоны, прорабатывает триггеры и помогает расправить зажатые фасциальные волокна. Y-насадка используется для массажа мышц шеи, трапеции и мышц вдоль позвоночника. Плоская насадка отлично подходит для широких типов мышц. Круглая насадка более универсальная и подходит почти для любых групп мышц.

Модель КТ-2948 очень компактная и работает от аккумулятора, поэтому массажер можно брать с собой куда угодно: в спортзал, в офис, в поездку или использовать дома. Можно делать массаж, не снимая одежду. Перкуссионный массажер позволит мышцам расслабиться, а также улучшит кровоток и избавит от боли.

Комплектация

1. Перкуссионный массажер — 1 шт.
2. Плоская насадка — 1 шт.
3. Пулевидная насадка — 1 шт.
4. Y-насадка — 1 шт.
5. Круглая насадка — 1 шт.
6. База для зарядки с установленным USB-шнуром — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство перкуссионного массажера




Нажмите и удерживайте **кнопку включения** для запуска работы устройства. Циклические нажатия на кнопку переключают скорость работы от 1 до 3 скорости. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения.

Заряжается устройство от **базы для зарядки**. Для этого подключите разъем USB от базы к источнику питания, а устройство установите на базу.

Насадки

- Плоская насадка — предназначена для широких типов мышц, таких как ягодичная мышца и др.
- Y-насадка — предназначена для шеи, трапеции и мышц вдоль позвоночника.
- Круглая насадка — универсальная, прорабатывает почти все типы мышц.
- Пулевидная насадка — для точечного массажа.

Дисплей

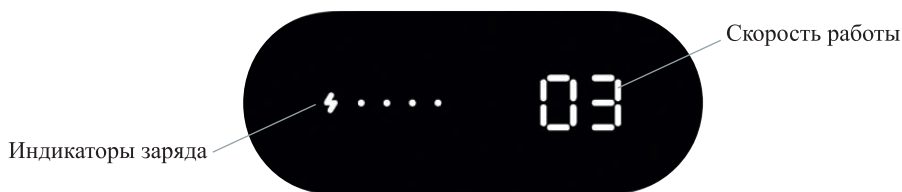

На дисплее показывается уровень заряда аккумулятора и установленная скорость работы.

Когда горит 4 индикатора заряда, значит, уровень заряда аккумулятора 75–100%. Если горят 3 индикатора, то уровень заряда аккумулятора 50–75%. При 2 горящих индикаторах уровень заряда аккумулятора составляет 25–50%. Когда горит 1 индикатор, то уровень заряда аккумулятора 5–25%. Если один индикатор мигает, то уровень заряда аккумулятора ниже 5%.

При включении устройства скорость работы по умолчанию «1». Скорости переключаются циклически кратковременными нажатиями на кнопку включения.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство и насадки влажной тканью. Зарядите устройство. Перед первым применением ознакомьтесь со всеми рекомендациями и противопоказаниями к применению массажера.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки вставьте USB-разъем шнура базы для зарядки в источник питания, затем установите массажер на базу для зарядки.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 2 А. Также вы можете заряжать устройство через компьютер или пауэрбанк.

Во время зарядки устройства индикаторы загораются поочередно. Когда устройство полностью заряжено, все индикаторы будут гореть непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 4–5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Чтобы проверить уровень заряженности, кратко нажмите 1 раз на кнопку включения.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните массажер при температуре от 0 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор наполовину каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Использование

1. Выберите необходимую насадку. Установите насадку до упора в разъем для насадки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения. На дисплее загорятся индикаторы заряда в зависимости от уровня заряда. Устройство начнет работу на первой скорости, при этом на дисплее будет гореть цифра «1».
3. Установите скорость работы краткими нажатиями на кнопку включения. У устройства 3 скорости работы.
4. Прислоните насадку к области тела, на которой собираетесь производить массаж. Плавно и медленно двигайтесь вдоль мышцы, не надавливая. Массаж каждой зоны должен длиться от 15 до 60 секунд, а общее время процедуры — не более 10 минут.

Примечание. По истечении 10 минут у массажера сработает автоотключение. Для продолжения работы повторно запустите устройство.

5. После завершения массажа нажмите и удерживайте кнопку включения. Устройство остановится, дисплей погаснет.

Внимание! Не используйте массажер в области сердца, на лице и голове, передней поверхности шеи, в точках пульсации, костных выступах, непосредственно на позвоночнике, суставах и слизистых оболочках.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышение температуры.

Советы

Рекомендации для массажа различных групп мышц:

Ягодичные мышцы

- Время воздействия: 30–60 секунд
- Количество повторов: 4 раза

Мышцы бедра

- Время воздействия: 20–45 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы голени

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы плеч и предплечий

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы спины

- Время воздействия: 30–60 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Триггерная точка

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 1–2 раза

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться гематомы и болевые ощущения в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно. Каждый сеанс длится 10 минут, далее у массажера срабатывает автоотключение.

Чистка и обслуживание

Протирайте устройство и насадки мягкой влажной, а затем сухой тканью. Не используйте моющие средства.

Чистку следует производить после каждого использования, т.к. влага, кожный жир и пот могут привести к повреждению поверхности насадок.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадание жидкостей в органы управления, разъем для установки насадок, в разъем для зарядки, на кнопку включения и базу для зарядки.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать массажер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор массажера литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 2 часа. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте массажер наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните массажер при температуре от 0 до 40 °С.

Устранение неполадок

Устройство не работает, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Вы не нажали и не удерживали кнопку включения	Для запуска устройства необходимо нажать и удерживать кнопку включения
Закончился 10 минутный сеанс массажа и прибор автоматически выключился	Не рекомендуется проводить сеанс массажа более 10 минут. После 10 минут срабатывает автоотключение. Для продолжения работы повторно запустите устройство
Разрядился аккумулятор	Зарядите устройство

Устройство не заряжается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый источник питания	Используйте источник питания, чтобы на выходе было ≈ 5 В, 2 А
Поврежден шнур базы для зарядки или база для зарядки	Обратитесь в сервисный центр
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Контакты на базе для зарядки или устройстве загрязнены	Протрите контакты на базе и устройстве спиртовой салфеткой
Шнур базы для зарядки неплотно подключен к источнику питания	Проверьте соединение шнура к источнику питания

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. База для зарядки:
 - вход: \sim 5 В, 2 А
 - выход: \sim 5 В, 2 А
2. Массажер:
 - питание: \sim 5 В, 2 А
3. Мощность: 10 Вт
4. Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 2,5 А*ч (18,5 Вт*ч)
5. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - базы для зарядки: III
 - массажера: III
6. Частота ударов:
 - на первой скорости: 2400 уд/мин
 - на второй скорости: 2800 уд/мин
 - на третьей скорости: 3200 уд/мин
7. Время работы: до 3,5 ч
8. Время зарядки: 4–5 ч
9. Длина шнура: 1,2 м
10. Размер устройства: 161 × 58 × 140 мм
11. Размер упаковки: 216 × 197 × 64 мм
12. Вес нетто: 0,50 кг
13. Вес брутто: 0,76 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Юйлэ Текнолэджи Ко., Лтд. 9Ф, Юнит 3, Билдинг 1, Няньхуа Гардэн, №3 Линбэй Роуд, Наньвань Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.
Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем для установки насадок, разъем для зарядки, кнопку включения или базу для зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на массажере, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за шнур базы для зарядки при отключении от источника питания.
6. Переносите массажер за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур базы для зарядки, база для зарядки или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без насадок. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на

- расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до движущихся частей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 15. Храните устройство в недоступных детям местах.
 16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки, органы управления, базу для зарядки и на разъем для установки насадок.
 18. При повреждении шнура базы для зарядки его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
 19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
 20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
 21. После зарядки отсоедините шнур базы для зарядки от источника питания.
 22. Не подносите включенный прибор к сердцу, лицу и голове, передней поверхности шеи, к точкам пульсации, костным выступам, непосредственно к позвоночнику, суставам и слизистым оболочкам.
 23. Не используйте устройство во время передвижения в транспортном средстве.

IM-1

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87