



ОКУЦЕЛЛ®

форте

глазные капли

Стерильный увлажняющий офтальмологический раствор, содержащий 10 мл натрия гиалуроната 0,4% во флаконе.

Состав: натрия гиалуронат 0,4%, двухосновный натрия фосфат додекагидрат, одноосновный натрия фосфат моногидрат, натрия хлорид; вода.

Изделие медицинского назначения. Не содержит консервантов.

Что собой представляет? Окуцелл® форте глазные капли - это стерильный офтальмологический раствор. Упаковка содержит один флакон объемом 10 мл (что эквивалентно более чем 250 каплям), оснащенный инновационным запатентованным офтальмологическим дозатором нажимного типа без консервантов для многократного применения. Офтальмологический дозатор нажимного типа предотвращает попадание потенциально опасных бактерий в раствор и сохраняет его стерильным до 120 дней после первого применения.

Что такое Окуцелл® форте глазные капли? Окуцелл® форте глазные капли - это 0,4% офтальмологический раствор высокомолекулярного натрия гиалуроната, полученного методом биотехнологического синтеза. Гиалуронат натрия способен имитировать свойства слизистой оболочки, обладает мукоадгезивными и вязкоэластичными свойствами, улучшающими стабильность слезной пленки и обеспечивающими комфорт поверхности глаз: смазку, увлажненность и защиту.

Когда следует использовать Окуцелл® форте глазные капли?

Увлажняющие и защитные свойства гиалуроната натрия уменьшают раздражение, сухость, жжение и ощущение инородного тела в глазах при действии таких факторов окружающей среды, как ветер, солнце, сухой воздух, соленая вода, дым, чрезмерный свет, кондиционирование воздуха, отопление, длительное пребывание за компьютером, или после выполнения операций на глазах, конъюнктивита, а также частого и длительного использования контактных линз.


Как использовать Окуцелл® форте глазные капли? Закапывать по одной капле в каждый глаз 2-3 раза в день по мере необходимости. Закапать одну каплю в глаз, слегка надавливая на корпус флакона.

Особые указания и меры предосторожности

- Не использовать в случае повреждения упаковки.
- Не использовать одновременно с препаратами, содержащими четвертичные аммониевые соли
- Не использовать при повышенной чувствительности к любому из компонентов
- Не использовать после истечения срока годности, указанного на флаконе и на внешней упаковке.
- Не касаться глаза кончиком флакона.
- В редких случаях после применения может наблюдаться временное лёгкое затуманивание зрения из-за вязкости раствора. Поэтому рекомендуется подождать несколько секунд перед любой деятельностью, которая требует четкого зрения.
- Соблюдайте не менее 10-15 минут между использованием любых других офтальмологических препаратов для наружного применения
- Выбросить флакон через 120 дней после первого вскрытия.
- Пожалуйста, после использования утилизируйте флакон надлежащим образом.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не проглатывать.
- Изделие предназначено только для местного офтальмологического применения.
- Хранить при комнатной температуре.
- Как правило, изделие предназначено для непрерывного использования не более 30 дней; при сохранении симптомов следует обратиться к врачу.
- Изделие содержит фосфаты. Имеются сообщения о редких случаях кальцификации роговицы при использовании глазных капель, содержащих фосфаты, у некоторых пациентов со значительными повреждениями роговицы. Поэтому не рекомендуется использовать препарат у пациентов с тяжелыми повреждениями поверхности роговицы (такими, как выраженная эрозия или язва роговицы).

Получить дополнительную информацию можно по адресу:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «PHARMASELECT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH» (АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1, офис 1601
тел./факс: (+37517) 268-46-84
office-by@pharmaselect.com

 Производитель:
«НТС С.р.л.» [NTC S.r.l.],
Виа Луиджи Рацца 3
(Via Luigi Razza 3)
20124 Милан, Италия

Дата ред.: July 2018
OKFBGBY101-01-1708



LFHYS10300

PIL OKZF BG/BY v01 181213	Fira Sans Regular 18 pt	■ CO M0 Y0 K90	
PIL Okuzell forte eye spray BG/BY	Fira Sans Regular 11,5 pt	■ CO M0 Y0 K80	
Маße: 130 x 180 mmm	Fira Sans Regular 8 pt	■ C90 M52 Y0 K0	Pantone 285 C
	Fira Sans Regular 7 pt		
	Fira Sans Light 7 pt		



ОКУЦЕЛЛ®

форте

капки за очи

Стерилен овлажняващ офталмологичен разтвор съдържащ 0,4% натриев хиалуронат, бутилка от 10 ml

Состав: натриев хиалуронат 0,4%, двуосновен натриев фосфат додекахидрат, моноосновен натриев фосфат монохидрат, натриев хлорид, вода. Без консерванти

Как се предлага? Окуцелл® форте капки за очи е стерилен офталмологичен разтвор. Опаковката съдържа една бутилка от 10 ml, еквивалентна на повече от 250 капки, снабдена с иновативния и патентован многодозов офталмологичен диспенсер капкомер (ОД), който не съдържа консерванти. ОД предпазва разтвора от потенциални вредни бактерии и така той остава стерилен за период до 120 дни след първата употреба

Какво представлява Окуцелл® форте капки за очи?

Окуцелл® форте капки за очи е офталмологичен разтвор, съдържащ 0,4% натриев хиалуронат с високо молекулно тегло, получен чрез биотехнологичен синтез. Натриевият хиалуронат има мукоимитични, мукоадхезивни и вискоеластични свойства, които подобряват стабилността на слъзния филм и поддържат очната повърхност в комфортно състояние: лубрикирана, хидратирана и защитена.

Кога трябва да се използва Окуцелл® форте капки за очи?

Овлажняващите и защитни свойства на натриевия хиалуронат облекчават дразненето, сухотата, паренето и усещането за чуждо тяло в очите, дължащи се на неблагоприятни въздействия от околната среда, като вятър, слънце, сух въздух, солена вода, дим, прекомерна светлина, климатици, отопление, продължителна работа с компютър или след очна операция, конюнктивит или често и продължително използване на контактни лещи.

Как да използвате Окуцелл® форте капки за очи? 1 капка в очите 2-3 пъти на ден, според необходимостта.

Капнете една капка в окото, като упражните лек натиск върху тялото на бутилката.

Предупреждения и предпазни мерки

- Не използвайте, ако бутилката е с нарушена цялост.
- Не използвайте едновременно с продукти, съдържащи кватернерни амониеви соли.
- Не използвайте, ако сте свръхчувствителни към някоя от съставките.
- Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху бутилката и външната опаковка.
- Не докосвайте окото с върха на бутилката.
- След приложение, в редки случаи може да се наблюдава леко временно замъгляване на зрението поради вискозитета на разтвора. Поради това е препоръчително да изчакате няколко секунди преди да започнете дейност, която изисква ясно виждане.
- Изчакайте поне 10 – 15 минути между прилагането на други офталмологични продукти за външна употреба.
- Изхвърлете бутилката 120 дни след първото отваряне.
- След употреба изхвърлете правилно бутилката.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Да не се поглъща.
- Продуктът е само за офталмологична (очна) употреба.
- Да се съхранява на стайна температура.
- Продуктът обичайно е предназначен за продължителна употреба за не повече от 30 дни. Ако симптомите продължат, консултирайте се с Вашия лекар.
- Продуктът съдържа фосфати. При някои пациенти със значително увредени роговици са съобщавани редки случаи на калциране на роговицата при използване на капки за очи, съдържащи фосфати. Поради това не се препоръчва употребата при пациенти с тежко увреждане на повърхността на роговицата (като изразена ерозия или язва на роговицата).

За допълнителна информация, моля, свържете се с: Pharmaselect (и локалния представител)

Дата на актуализиране: July 2018



Производител
NTC S.r.l.
Via Luigi Razza 3
20124 Milano Италия



LFHY10300