



ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

Раствор для ухода за контактными линзами RELINS® PERFECT CLEANER

Назначение: Раствор для ухода за контактными линзами RELINS® PERFECT CLEANER (далее – раствор RELINS® PERFECT CLEANER) предназначен для использования в офтальмологии в качестве универсального средства для очищения контактных линз. Раствор RELINS® PERFECT CLEANER для очищения, расщепления, удаления и предотвращения образования стойких отложений на поверхности жестких контактных линз.

Описание:

Раствор представляет собой жидкость от белого до желтоватого цвета. Допускается пенообразование при взбалтывании.

Состав раствора:

Раствор RELINS® PERFECT CLEANER в своем составе содержит воду очищенную, анионный ПАВ, коллоидный абразив диаметром не более 35 мкм, альгинат натрия, амфотерный ПАВ, титана диоксид, СТЕРИЛЬНО. Продукт стерилизован гамма-облучением.

Показания к применению:

Раствор RELINS® PERFECT CLEANER показан к применению для ухода за газопроницаемыми контактными линзами, изготовленными из силиконакрилатов и фторсиликонакрилатов, а также твердых полиметакрилатов.

⚠ Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов раствора.

Побочные действия:

Побочные эффекты не обнаружены.

Область применения:

Для применения в качестве эффективного офтальмологического средства для **механической ежедневной очистки** дневных жестких газопроницаемых и ночных ортокератологических линз (жестких контактных линз), которое расщепляет, удаляет и предотвращает образование стойких отложений на поверхности изделий. Раствор используется перед этапом дезинфекции и кондиционирования жестких контактных линз. Подходит для чувствительных глаз. Данное изделие медицинского назначения предназначено для самостоятельного применения в домашних условиях, а также для использования в лечебно-профилактических учреждениях. Для индивидуального применения.

⚠ Предостережения:

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОР ДЛЯ ОЧИСТКИ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ.

НЕ ЗАКАПЫВАЙТЕ РАСТВОР В ГЛАЗА.

Всегда тщательно промывайте и ополаскивайте линзы после использования раствора.

При попадании раствора RELINS® PERFECT CLEANER в глаза, незамедлительно промойте глаза проточной водой до удаления неприятных ощущений. Если вы были в линзах, снимите линзы и тщательно ополосните их многофункциональным раствором. Если после промывания глаз и очищения линз сохраняются дискомфорт в глазах, нарушение зрения, избыточное слезотечение или покраснение глаз, незамедлительно обратитесь к врачу-офтальмологу. Не используйте раствор при возникновении неприятных ощущений в глазах.

Не смешивайте раствор с другими жидкостями и средствами по уходу за контактными линзами.

Не используйте раствор, если целостность первичной упаковки нарушена.

Не используйте раствор повторно.

Не используйте данный раствор для хранения линз. Для этих целей используйте многофункциональный раствор для дезинфекции и хранения линз или пероксидные системы.

Не меняйте раствор без рекомендации специалиста.

Всегда встряхивайте раствор перед применением.

Используйте раствор до даты истечения срока годности, указанной на коробке и флаконе.

Не используйте раствор по истечении 120 дней после вскрытия флакона.

Всегда плотно закрывайте флакон после использования раствора.

Храните в недоступном для детей месте.

Принцип действия:

Раствор RELINS® PERFECT CLEANER:

- ▷ быстро и бережно очищает и удаляет липиды, протеины и прочие загрязнения с поверхности жестких контактных линз при механической очистке;
- ▷ образует мягкую пену при мытье линз, что обеспечивает бережную очистку;
- ▷ легко и быстро смывается с линзы;
- ▷ специально подобранная комбинация химических веществ раствора препятствует образованию стойких загрязнений и отложений;
- ▷ экономичен в использовании: белый цвет раствора помогает контролировать количество нанесенного раствора на линзу и его смываемость с линзы;
- ▷ обладает антисептическим свойством в отношении микроорганизмов;
- ▷ содержит в составе натуральный увлажняющий компонент растительного происхождения, который сохраняет физические и оптические свойства линз, обеспечивая более длительный срок службы линз.

Раствор RELINS® PEROXYDE SYSTEM обеспечивает комфортное и безопасное ношение жестких контактных линз благодаря специально разработанной комбинации химических веществ, которая уничтожает патогенные микроорганизмы, разрушает липидные, протеиновые и иные отложения, быстро и бережно очищает, удаляет биологическую пленку и налеты на контактных линзах.

Указания по применению:

Проведите описанные ниже манипуляции сначала с одной линзой, затем со второй. Рекомендовано всегда начинать с правой линзы во избежание путаницы.



1. Очистка: Тщательно вымойте с мылом и высушите руки. Встряхните флакон раствора RELINS® PERFECT CLEANER перед применением.



Поместите линзу на ладонь, нанесите 2-3 капли раствора RELINS® PERFECT CLEANER на линзу.



Протрите аккуратно радиальными движениями каждую сторону линзы 15-20 секунд между подушечками большого, указательного и среднего пальца (или безымянным пальцем, положив линзу на ладонь).



Равномерно обработайте обе поверхности линзы.

► **Линзы нужно очищать сразу после снятия. Не оставляйте грязные и неочищенные линзы сухими и необработанными до надевания.**



2. Промывание: Удалите все следы раствора RELINS® PERFECT CLEANER тщательным споласкиванием линзы не менее 30 секунд под теплой питьевой водой (не горячей, около 38°C), или как рекомендовано вашим врачом.

► **Ни в коем случае не пользуйтесь водой, не соответствующей питьевому стандарту.**

► **Вода служит только для удаления линзу водой перед надеванием.**

► **Ни в коем случае не споласкивайте линзу водой перед надеванием.**

► **Ни в коем случае не храните линзы в воде.**



3. Дезинфекция и кондиционирование: После промывания поместите очищенные линзы в специальный контейнер с многофункциональным раствором или пероксидной системой на срок, указанный производителем.



Линзы должны быть дезинфицированы перед надеванием. Механическая очистка линз не заменяет этап дезинфекции.



Для дезинфекции и кондиционирования рекомендовано использовать следующие растворы: *Раствор RELINS®, RELINS® Classic, RELINS® Style, RELINS® Travel, RELINS® Effect, либо раствор RELINS® PEROXYDE SYSTEM.*

Условия эксплуатации:

Раствор может применяться в течение 120 дней после вскрытия флакона.

Условия хранения:

Храните раствор в плотно закрытом флаконе в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +10 до +25°C, при относительной влажности воздуха не более 80% (при 25°C).

Условия транспортирования:

Изделия транспортируют всеми видами транспорта

в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта на территории перевозки в диапазоне температур, соответствующим условиям хранения.

Утилизация:

Раствор с истекшим сроком годности утилизируют путем разбавления водопроводной водой в десятикратном (1:10) размере и сливании в общую канализационную систему. Входящие в состав изделия медицинского назначения комплектующие (контейнеры, косметички) утилизируются как бытовые отходы.

Срок годности:

Срок годности раствора 3 (три) года с даты изготовления.

Условия отпуска:

Без рецепта врача.

Дезинфекция и очистка:

Раствор поставляется стерильным и не требует дополнительной дезинфекции или обработки.

Гарантии производителя:

Производитель гарантирует соответствие продукции технологическим инструкциям предприятия, а также сохранение свойств раствора 3 (три) года с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. По вопросам, связанным с применением раствора, обращайтесь к производителю.

Форма выпуска:

Раствор в полимерных флаконах номинальным объемом 10 мл, 15 мл, 30 мл, 55 мл, 115 мл, 360 мл.

Производитель:

ООО «Доктор Клаус»
223053, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27, к. 4, ком. 616;
сайт: <https://doctorklaus.by/>
e-mail: info@doctorklaus.by
тел./факс: +375 17 51 139 51

Страна производства: Республика Беларусь