




Kitfort

ВОЛШЕБНОЕ ИСКУССТВО ОТДЫХАТЬ!



Penguin Pack
Массажер
КТ-2995

kitfort.ru

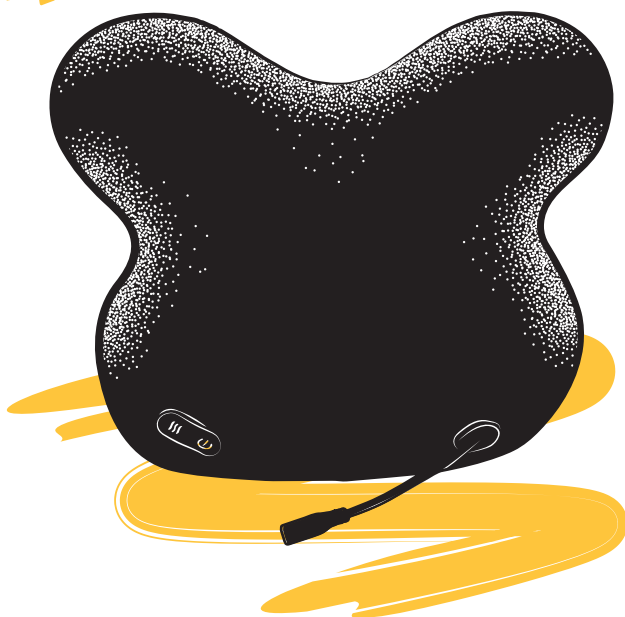



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10



Общие сведения

Массажер Kitfort КТ-2995 выполняет массаж, помогая избавиться от дискомфорта в шейно-воротниковой зоне, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или при сидячем образе жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, массажер устраняет стресс и затекание мышц. Также устройство можно использовать для массажа поясницы, лопаток, бедер и голеней.

Благодаря инфракрасному нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто долго работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи. Роликовый массаж и тепло стимулируют и повышают тонус мышц шеи, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови.

Управление прибором осуществляется с помощью двух кнопок.

Массажером можно пользоваться как дома, используя блок питания для подключения к сети питания, так и в автомобиле, подключив устройство к прикуривателю автомобиля через автомобильный адаптер.


Следует помнить, что при беременности, наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер КТ-2995 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например, ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Автомобильный адаптер (для прикуривателя) — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

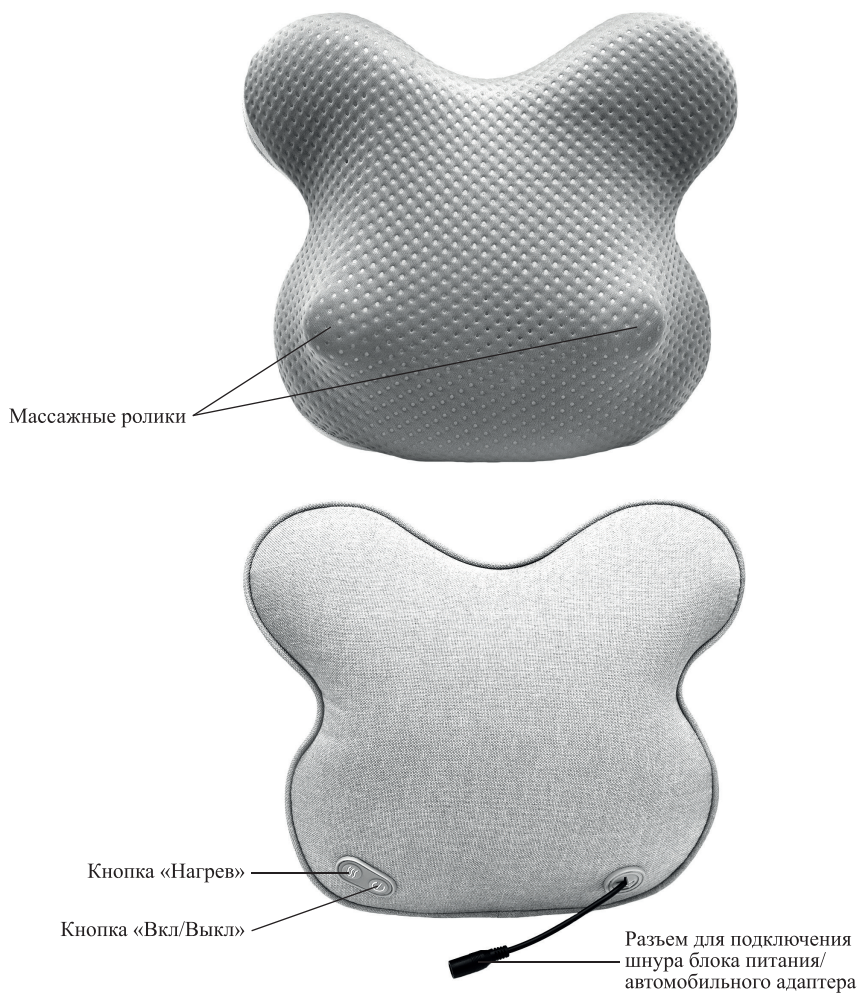

Кнопка «Вкл/Выкл» при первом нажатии включает массажер, второе нажатие меняет направление вращения массажных роликов на противоположное. Третье нажатие выключает массажер.

Примечание. Направление вращения массажных роликов меняется на противоположное автоматически каждую минуту.

Кнопка «Нагрев» при первом нажатии выключает функцию инфракрасного нагрева, при втором — включает ее.

Примечание. По умолчанию во время работы массажера включена функция инфракрасного нагрева.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Распакуйте массажер и протрите его влажной, а затем сухой мягкой тканью.
2. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.
3. Подключите штекер блока питания к разъёму на массажере, блок питания подключите к сети электропитания. Вы можете использовать массажер в автомобиле, подключив массажер к прикуривателю через автомобильный адаптер. Подключите шнур автомобильного адаптера к разъёму на массажере, затем подсоедините адаптер к автомобилю через прикуриватель.

Внимание! Не используйте массажер во время езды во избежание аварийных ситуаций на дороге. Если в дороге вы устали, припаркуйтесь и тогда используйте массажер.

4. Поместите массажер на любую из зон, приведенных ниже на рисунке.



Шея



Голени



Поясница



Лопатки



Бедра

Использование

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», устройство начнет работу.

Примечания. При возникновении неприятных ощущений прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом. Также не используйте массажер 2 раза подряд для одной и той же зоны.

По умолчанию во время работы массажера включена функция инфракрасного нагрева.

2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз для вращения массажных роликов в противоположную сторону.

3. Нажмите на кнопку «Нагрев», чтобы выключить нагрев. Если вы хотите включить нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев» еще раз.
4. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. По истечении 15 минут устройство выключится. Для того, чтобы закончить массаж раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, устройство выключится. Максимальное время работы массажера — 30 минут.

Примечание. Если вы хотите использовать массажер повторно для другой зоны, подождите минимум 30 минут, чтобы массажер не перегревался.

5. После завершения работы массажера отключите автомобильный адаптер или блок питания от источника питания, а затем от устройства.



Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, таких как:
 - наличие ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
 - нечувствительность к теплу;
 - переутомление;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора;
 - злокачественные новообразования;
 - повреждения целостности кожного покрова в зоне массажа;
 - инфекционные заболевания кожи;
 - остеопороз;
 - переломы, вывихи, разрывы мышц и прочие повреждения;
 - повышенная температура;
 - сахарный диабет;
 - беременность;
 - возраст младше 16 лет.

Советы

Не используйте массажер более 15 минут на каждой части тела. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться синяки и боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.



Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки массажера допускается использовать влажные салфетки, ткань, губку или ватный диск, смоченные водой. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на кнопки «Вкл/Выкл» и «Нагрев», блок питания, автомобильный адаптер и разъем для подключения шнура.



Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Устранение неполадок

Массажер не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер не включен	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
В автомобильном адаптере перегорел предохранитель	Замените предохранитель
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля или не подается питание на прикуриватель	Возможно, разряжен автомобильный аккумулятор. Зарядите его
Шнур блока питания или автомобильного адаптера не подключен к массажеру или к источнику питания	Вставьте штекер шнура блока питания или автомобильного адаптера в разъем массажера или в источник питания

Массажер нагрелся

Возможная причина	Решение
Вы провели несколько сеансов подряд	Отключите массажер от источника питания и дайте ему остыть минимум 30 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: $\sim 100\text{--}240\text{ В}$, 50/60 Гц, 0,7 А
 - выход: $\approx 12\text{ В}$, 2 А
- Входное напряжение массажера: $\approx 12\text{ В}$, 2 А
- Мощность: 24 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
- Длина шнура блока питания: 1,8 м
- Длина шнура автомобильного адаптера: 1,8 м
- Размер устройства: $330 \times 290 \times 70\text{ мм}$
- Размер упаковки: $330 \times 135 \times 295\text{ мм}$
- Вес нетто: 1,3 кг
- Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на кнопки «Вкл/Выкл» и «Нагрев», блок питания, автомобильный адаптер и разъем для подключения шнура не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие превышения времени использования не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания, автомобильного адаптера или шнур разъема для подключения на самом массажере. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на кнопки «Вкл/Выкл» и «Подогрев», блок питания, автомобильный адаптер и разъем для подключения шнура.
15. При повреждении блока питания или автомобильного адаптера его следует заменить специальным блоком питания/адаптером или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Не используйте устройство во время передвижения в транспортном средстве.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.

ИМ-1





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

