




Kitfort

С ЗАБОТОЙ
О ТВОЁМ
ТЕЛЕ!



Penguin Pack
Массажер
КТ-2990

kitfort.ru

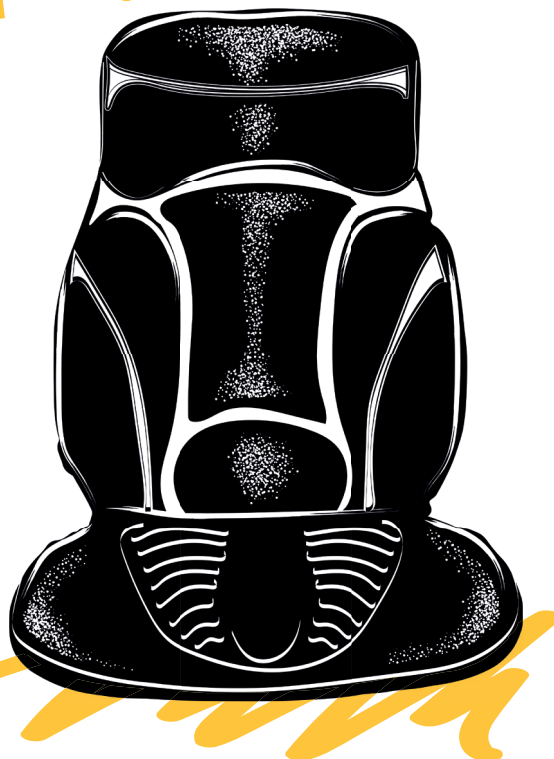



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

По разным причинам визит к массажисту может откладываться на неопределенный срок. Теперь оказать расслабляющее действие на мышцы можно и дома с помощью массажера КТ-2990. Сеанс массажа, проведенный в домашней атмосфере, даст возможность получить порцию приятных эмоций. Массаж помогает снять усталость и напряженность, поднять настроение.

Большинство работников после интенсивного рабочего дня испытывают мышечный гипертонус. Сеанс массажа быстро успокаивает и помогает избавиться от мышечных спазмов. Делать массаж рекомендуется перед сном, особенно тем, кто страдает от частых пробуждений и длительного засыпания.

Массажер прост в управлении: расправьте его на кровати, диване или кресле с высокой спинкой и управляйте с помощью пульта, который можно убрать в карман для хранения. Вы можете зафиксировать массажер резинкой, расположенной сзади массажера.

Чтобы снять мышечное и нервное напряжение, используйте один из пяти режимов: «Пульсация», «Постукивание», «Прокатка», «Массирование» и «Авто». Режимы «Пульсация», «Постукивание» и «Прокатка» направлены на усиление стимуляции циркуляции крови и лимфотока. Режим «Массирование» оказывает общее успокаивающее действие на организм, что способствует устранению проблем со сном. Режим «Авто» автоматически переключает все режимы работы массажера.

После выбора режима выберите один из трех уровней интенсивности вибрации, чтобы насладиться идеальным массажем. Чтобы сделать массаж еще приятнее, в данной модели предусмотрен нагрев в зоне нижней части спины.

Также возможно отрегулировать массажер под ваши индивидуальные потребности в данный момент. Для этого выберите одну или несколько зон массажа: верхнюю или нижнюю часть спины, поясницу, бедра.

Массажер складывается для удобного хранения, сзади есть резинка для фиксации в сложенном виде.

Массажером можно пользоваться как дома, используя блок питания для подключения к сети питания, так и в автомобиле, подключив устройство к прикуривателю автомобиля через автомобильный адаптер.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер КТ-2990 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также его можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер с пультом управления — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Автомобильный адаптер — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

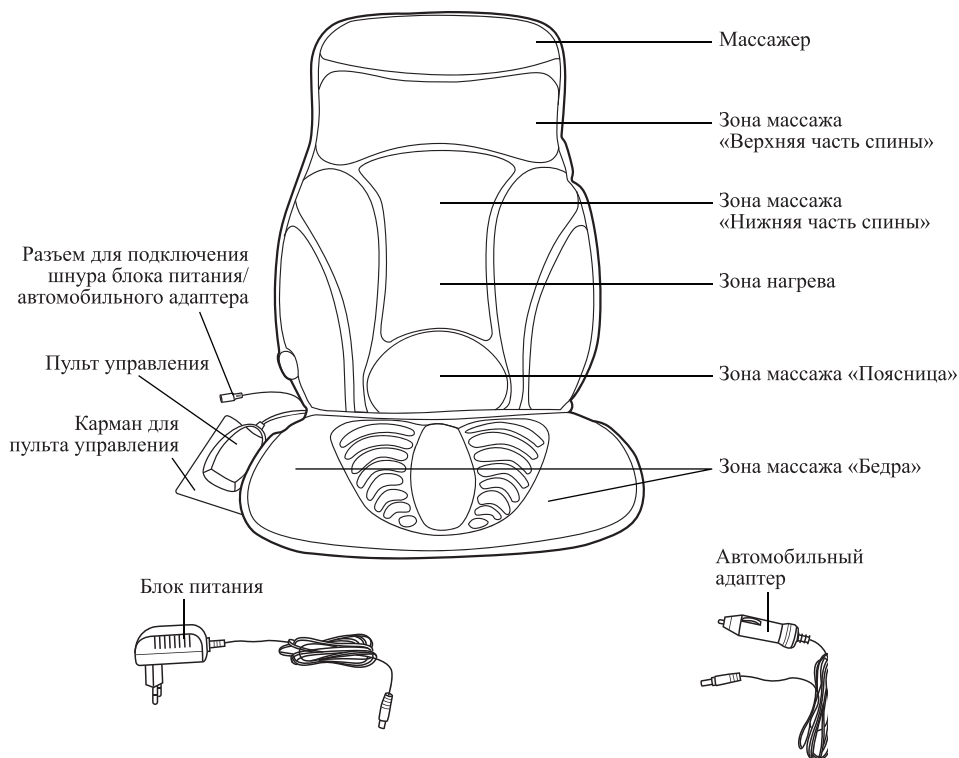

Пульт управления

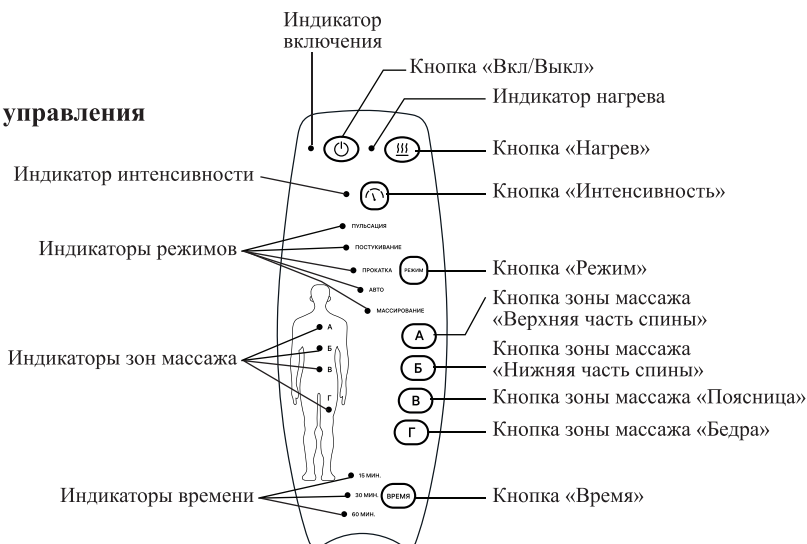

Управление массажером осуществляется с помощью пульта.

Кнопка «Вкл/Выкл» — включение и выключение массажера. Нажмите на кнопку, **индикатор включения**, **индикатор интенсивности** и индикаторы настроек по умолчанию загорятся, и массажер начнет работу в режиме «Массирование», таймер установлен на 15 минут.

Кнопка «Режим» — выбор режима работы массажера. Однократное нажатие на кнопку переключит массажер на следующий режим. Переключение происходит циклически. Нажимайте на кнопку, чтобы поочередно переключать режимы «Массирование», «Пульсация», «Постукивание», «Прокатка» и «Авто». В режиме «Авто» поочередно включаются все режимы массажа. Рядом с названием выбранного режима будет гореть **индикатор режима**, а индикаторы зоны массажа будут загораться, обозначая зону массажа в реальном времени.

Кнопки зон массажа «Верхняя часть спины», «Нижняя часть спины», «Поясница» и «Бедро» позволяют вам выбрать нужные зоны массажа. По умолчанию включены все зоны массажа. Нажатие на кнопки включает и выключает массаж соответствующей зоны. Вы можете выбрать несколько зон для массажа. Индикаторы зон массажа будут загораться, обозначая зону массажа в реальном времени.

Кнопка «Интенсивность» — выбор уровня интенсивности вибрации во время массажа. Однократное нажатие на кнопку переключит массажер на следующий уровень интенсивности. Всего массажер имеет три уровня интенсивности: минимальный, средний и максимальный.

Кнопка «Нагрев» — включение/выключение нагрева поясницы. Нажмите на нее один раз для включения нагрева, **индикатор нагрева** загорится. Нажмите повторно, чтобы отключить нагрев, индикатор погаснет.

Кнопка «Время» позволяет выбрать продолжительность массажа 15, 30 или 60 минут, по истечении которых массажер прекратит работу. По умолчанию установлен таймер на 15 минут. При установке таймера загорается соответствующий индикатор времени.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите массажер влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Поместите массажер на кровать, диван или кресло с высокой спинкой. При необходимости зафиксируйте массажер резинкой, расположенной сзади.

Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.

Подключите штекер блока питания к разъему на массажере, блок питания подключите к сети электропитания. Вы можете использовать массажер в автомобиле, подключив массажер к прикуривателю через автомобильный адаптер. Подключите шнур автомобильного адаптера к разъему на массажере, затем подсоедините адаптер к автомобилю через прикуриватель.

Перед подключением прибора к автомобильному прикуривателю заведите машину, чтобы избежать скачков напряжения и разрядки аккумулятора.

Отключайте устройство от прикуривателя, если автомобиль заглушен, чтобы не разрядить аккумулятор автомобиля ниже минимального порога.

Внимание! Не используйте массажер во время езды во избежание аварийных ситуаций на дороге. Если в дороге вы устали, припаркуйтесь и после этого используйте массажер.

Использование

1. Расположитесь на массажере, расслабьтесь.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», индикатор включения и индикатор интенсивности загорятся. По умолчанию устройство начнет работу в режиме «Массирование», таймер будет установлен на 15 минут.
3. Нажимайте на кнопку «Режим», чтобы выбрать один из пяти режимов: «Массирование», «Пульсация», «Постукивание», «Прокатка» и «Авто». При выборе режима загорится соответствующий индикатор.
4. Вы можете настроить индивидуальный режим массажа. По умолчанию включены все зоны массажа. Нажатие на кнопки включает и выключает массаж соответствующей зоны. Вы можете выбрать несколько зон для массажа. Индикаторы зон массажа будут загораться, обозначая зону массажа в реальном времени.
5. Нажмите на кнопку «Интенсивность», чтобы выбрать один из трех уровней интенсивности вибрации массажа.
6. Вы можете включить подогрев поясницы во время массажа с помощью кнопки «Нагрев», после включения загорится индикатор нагрева.
7. После включения массажера по умолчанию таймер включен на 15 минут, по истечении этого времени массажер выключится. Настройка таймера переключается циклически нажатием на кнопку «Время». При установке таймера загорится соответствующий индикатор времени. Чтобы отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикация погаснет.
8. После автоотключения вы можете нажать на кнопку «Вкл/Выкл» для включения массажера, если хотите продолжить использование.

Примечание. Не рекомендуется использовать массажер более 2 часов подряд. Не превышайте время использования массажера, чтобы не навредить своему здоровью. Во избежание срабатывания защиты от перегрева необходимо подождать минимум 1 час перед следующим циклом работы массажера.

9. После завершения работы массажера отключите его от сети питания или прикуривателя.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Массажер не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях.

3. Существует ряд противопоказаний к применению:
- беременность;
 - тромбофлебит, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
4. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.



Советы

Не превышайте время использования массажера, чтобы не навредить своему здоровью. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторы сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться синяки и начаться боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки массажера допускается использовать влажные салфетки, ткань, губку или ватный диск, смоченные водой. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на пульт управления, блок питания, автомобильный адаптер и разъем для подключения шнура.



Уход и хранение

Перед тем как убрать на хранение, очистите массажер, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Массажер складывается для удобного хранения, сзади есть резинка для фиксации в сложенном виде. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в помещении с высокой температурой.

Устранение неполадок

Массажер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер не подключен к блоку питания или автомобильному адаптеру	Подключите массажер к блоку питания или автомобильному адаптеру
Массажер не включен	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,5 А
 - выход: $\approx$ 12 В, 0,8 А
- Входное напряжение массажера: $\approx$ 12 В, 0,8 А
- Мощность: 9,6 Вт
- Тип массажера: вибрационный
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
- Таймер: 15, 30 и 60 мин
- Размер пульта управления: 60 × 145 мм
- Длина шнура блока питания: 1,8 м
- Длина шнура автомобильного адаптера: 1,8 м
- Размер устройства: 490 × 30 × 1080 мм
- Размер упаковки: 470 × 110 × 370 мм
- Вес нетто: 0,9 кг
- Вес брутто: 1,3 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера, его аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей в массажер, на пульт управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания или автомобильного адаптера. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на пульт управления, блок питания, автомобильный адаптер и разъем для подключения шнура.
15. При повреждении блока питания или автомобильного адаптера его следует заменить специальным блоком питания/адаптером или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Не используйте устройство во время передвижения в транспортном средстве.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.

IM-2





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

