


Время для себя!

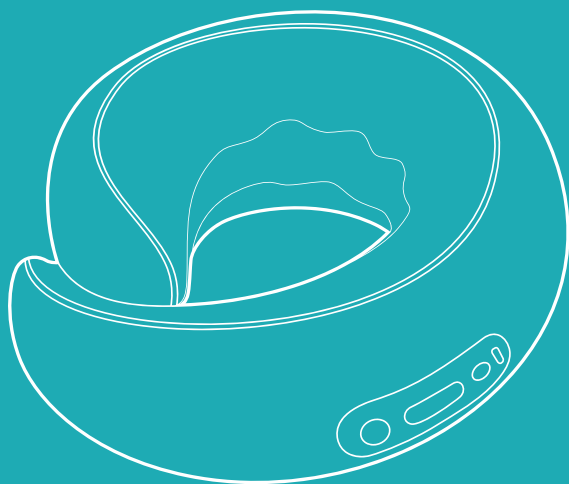

**Массажер для шеи
КТ-5901**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера для шеи	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Массажер для шеи КТ-5901 разминает зажатые мышцы, снимает напряжение, усталость и болевые ощущения в шее, особенно во время длительных поездок. Массажер устраняет стресс и затекание мышц, воздействуя на шею массажными роликами.

Благодаря нагреву эффективность массажа повышается, и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Расслабление мышц шеи и улучшение кровотока также помогают избавиться от головных болей и проблем со сном. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто много работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи. Роликовый массаж и тепло стимулируют и повышают тонус мышц шеи, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови.

Массажер оснащен голосовым помощником, который при желании можно отключить.

Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа составляет 15 минут. Через 15 минут массажер автоматически отключается. Не проводите более двух сеансов массажа в день. Также между сеансами должно пройти время.

Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для шеи КТ-5901 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи в области шеи, например, ран, царапин или аллергических высыпаний.


Массажер работает от аккумулятора, что позволяет брать его с собой на работу, в поездки или путешествия.

Комплектация

1. Массажер со съёмным тканевым чехлом и заглушкой разъёма для шнура Micro-USB — 1 шт.
2. Шнур Micro-USB — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для шеи

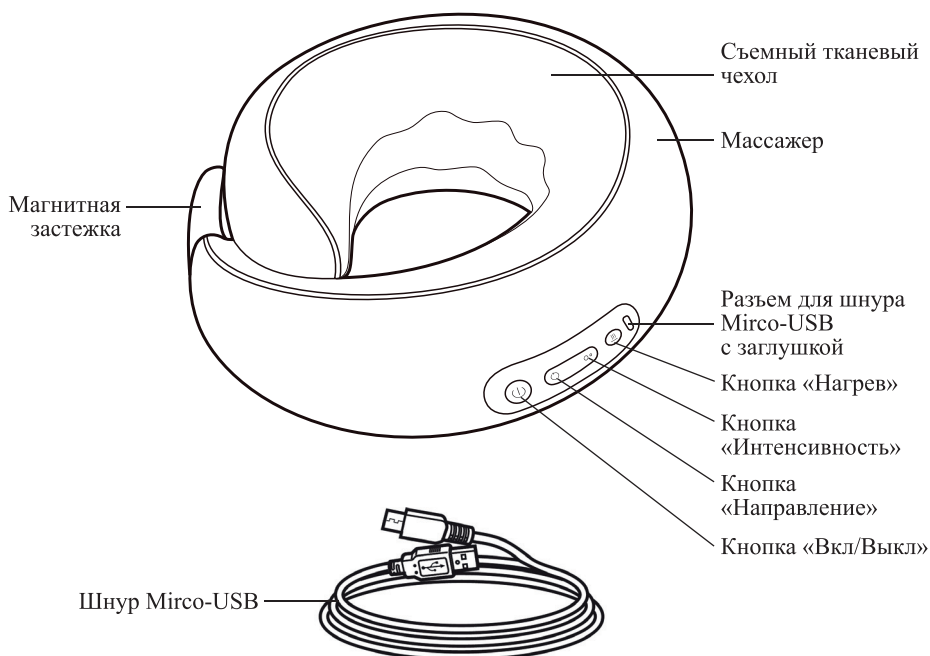

Чтобы включить или выключить массажер, нажмите и удерживайте **кнопку «Вкл/Выкл»** три секунды, прибор начнет работу: будет установлена максимальная интенсивность, индикатор кнопки «Выкл/Выкл» загорится синим. Чтобы поставить прибор на паузу, нажмите один раз на кнопку «Вкл/Выкл». Чтобы продолжить работу прибора, нажмите еще раз на кнопку «Вкл/Выкл».

Кнопка «Направление» циклически переключает направление движения массажных роликов. Направление движения массажных роликов автоматически меняется каждую минуту.

Кнопка «Интенсивность» циклически переключает интенсивность массажа. У массажера 2 интенсивности массажа: минимальная и максимальная. После включения массажер начинает работу с максимальной интенсивностью. Чем больше интенсивность, тем быстрее крутятся массажные ролики.

Кнопка «Нагрев» включает и отключает нагрев. Если вы хотите отключить голосовой помощник, нажмите на кнопку «Нагрев» и удерживайте ее в течение 2–3 секунд. Чтобы включить голосовой помощник, снова нажмите на кнопку «Нагрев» и удерживайте ее в течение 2–3 секунд.

Магнитная застежка позволяет зафиксировать массажер на шее.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите упаковочные материалы. Перед первым использованием зарядите прибор, как это описано в разделе «Зарядка массажера».

Зарядка массажера

Перед первым включением зарядите массажер. Для этого откройте заглушку и подключите шнур Micro-USB к разъему для зарядки, который располагается на корпусе прибора. Другой конец шнура подсоедините к источнику питания.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ± 5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит красным. При полном заряде индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не горит. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки вы не сможете пользоваться массажером.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Устройство начнет выполнять массаж с максимальной интенсивностью, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится синим.

Примечания. При возникновении неприятных ощущений прекратите массаж, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», и проконсультируйтесь с врачом.

2. Чтобы изменить направление вращения роликов, нажмите на кнопку «Направление».

Примечание. Направление движения массажных роликов автоматически меняется каждую минуту.

3. Для настройки интенсивности массажа нажмите на кнопку «Интенсивность».
4. При желании вы можете включить нагрев. Для этого нажмите на кнопку «Нагрев». Чтобы выключить нагрев, снова нажмите на кнопку «Нагрев».
5. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. По истечении 15 минут устройство выключится. Для того чтобы закончить массаж раньше, нажмите и удерживайте три секунды кнопку «Вкл/Выкл», устройство выключится. Максимальное время работы массажера — 15 минут.

Примечание. Если вы хотите использовать массажер повторно, подождите минимум 20–30 минут, чтобы массажер не перегревался.

Советы

Если вы чувствуете дискомфорт на любой интенсивности воздействия, немедленно прекратите массаж и обратитесь к врачу.

Длительность сеанса массажа не должна превышать 15 минут. По истечении 15 минут массажер автоматически отключается, даже если вы меняли интенсивность воздействия или включали нагрев. Не проводите более двух сеансов массажа в день. Также между сеансами должно пройти время.

Если вы хотите включить массажер еще раз, например, для проведения сеанса массажа другому человеку, то подождите 20–30 минут, чтобы избежать перегрева устройства.

Меры предосторожности по применению

Перед применением желательно проконсультироваться с врачом. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Существует ряд противопоказаний к применению:

- инфекционные заболевания кожи;
- остеопороз;
- наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора;
- злокачественные новообразования;
- повышенная температура;
- повреждения целостности кожного покрова в зоне массажа;
- переломы, вывихи, разрывы мышц и прочие повреждения;
- сахарный диабет;
- беременность;
- менструация;
- заболевания сердца;
- наличие ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
- нечувствительность к теплу;
- переутомление;
- возраст младше 16 лет.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда выключайте массажер и отключайте его от сети.

Не погружайте прибор в воду или под струю воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на массажные ролики, в область органов управления, на разъем шнура Micro-USB и шнур Micro-USB.

Допускается стирать съемный тканевый чехол вручную при температуре не выше 40 °С. После стирки дайте чехлу высохнуть естественным путем и наденьте его обратно на массажер, закрепив молнией.

Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, затем заряжайте в течение 1,5 часов.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите массажер в соответствии с разделом «Зарядка массажера»

Массажер не работает, звуковые команды подаются

Возможная причина	Решение
Массажер отключен	Чтобы массажер начал работать, необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл» в течение трех секунд

Устройство работает, но голосовые команды не подаются

Возможная причина	Решение
Вы отключили голосовые команды	Чтобы включить голосовые команды, нажмите на кнопку «Нагрев» и удерживайте ее в течение 2–3 секунд

Массажер не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки массажера от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Поврежден шнур Micro-USB	Используйте другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 2 А

Покраснение на коже

Возможная причина	Решение
Слишком высокая интенсивность воздействия или длительность массажа	Это не является неисправностью массажера. Чувствительная кожа может покраснеть, если установлена максимальная интенсивность, или массаж длится слишком долго. Дождитесь, когда покраснение пройдет. В будущем используйте массажер на минимальной интенсивности и не превышайте рекомендуемое время массажа

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB = 5 В, 2 А
2. Мощность: 6 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2,5 А*ч (9,25 Вт*ч)
5. Тип массажера: роликовый
6. Время зарядки: 3 ч
7. Время работы: 1,5–2 ч
8. Длина шнура Micro-USB: 1 м
9. Размер устройства: 230 × 230 × 120 мм
10. Размер упаковки: 210 × 210 × 122 мм
11. Вес нетто: 0,5 кг
12. Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера для шеи вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на ролики, в область органов управления, на разъем шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB не является гарантийным случаем.

Повреждение чехла массажера вследствие стирки агрессивными моющими средствами или в стиральной машине не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур Micro-USB. Не тяните за шнур Micro-USB при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не касайтесь металлических пластин и электродных накладок руками, когда массажер включен. Следите, чтобы дети не могли случайно дотронуться до металлических пластин или электродных накладок, когда массажер включен.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При полной или частичной потере чувствительности не рекомендуется пользоваться прибором.
15. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на ролики, в область органов управления, на разъем шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB.
16. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром Micro-USB или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
19. Запрещено пользоваться прибором во время сна.
20. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.
21. После зарядки отсоедините шнур Micro-USB сначала от источника питания, затем от устройства.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru