


**Удовольствие
в заботе!**

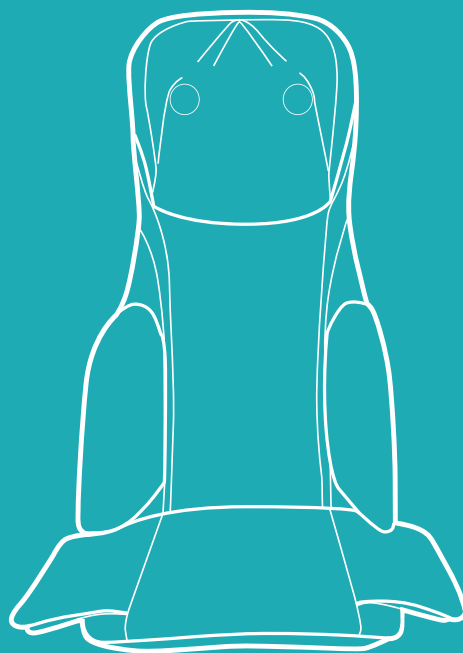

**Массажер
КТ-5905**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Массажер КТ-5905 поможет снять усталость и расслабить мышцы спины и шеи с помощью роликового (массаж Шиatsu) или воздушно-компрессионного массажа, также можно совместить оба вида массажа. Вы можете выбрать зону роликового массажа и скорость вращения массажных роликов зоны спины, включить вибрацию или нагрев.

Массажер подойдет как людям, ведущим сидячий образ жизни, так и тем, кто испытывает физические нагрузки, например, спортсменам после тренировки.

Массажные ролики воздействуют на мышцы, усиливая циркуляцию крови, в результате чего ткани получают больше кислорода и питательных веществ. Сеансы массажа положительно влияют на состояние костно-мышечной системы и повышают эластичность мышечных волокон. Массаж помогает восстановить нормальную работу лимфотока, что оказывает общее детоксикационное действие и улучшает доступ питательных веществ к межпозвоночным дискам.

Встроенные воздушные подушки на спинке и сидении массажера позволяют провести воздушно-компрессионный массаж. Этот вид массажа является щадящим и мягким, применять его можно каждый день. Сеанс воздушно-компрессионного массажа может быть как самостоятельным видом расслабляющих процедур, так и предварительным или завершающим этапом роликового массажа.

Массажер имеет 4 зоны роликового массажа: вся спина, плечевой пояс, поясница и шея. Высоту роликов зоны шеи можно отрегулировать под ваш рост.

Для повышения эффективности массажа КТ-5905 обладает функциями вибрации и нагрева. Нагрев улучшает микроциркуляцию крови, а три уровня вибрации способствуют лучшему расслаблению мышц.

Чтобы снять мышечное и нервное напряжение, используйте дополнительные режимы: «Расслабляющий» и «Интенсивный». Режим «Интенсив» направлен на усиление стимуляции циркуляции крови и лимфотока. Режим «Расслабляющий» оказывает общее успокаивающее действие на организм, что способствует устранению проблем со сном.

Массажер прост в управлении: расположите его на диване или кресле с высокой спинкой и управляйте с помощью пульта. Массажер можно использовать только сидя. Управление массажером осуществляется пультом управления, который можно убрать в карман для хранения на массажере.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер КТ-5905 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также его можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например, ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер с пультом управления — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

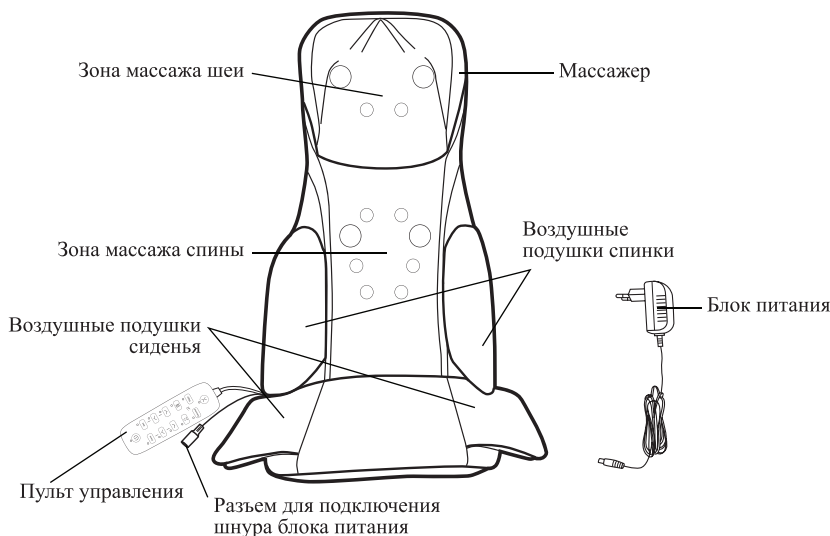

Пульт управления

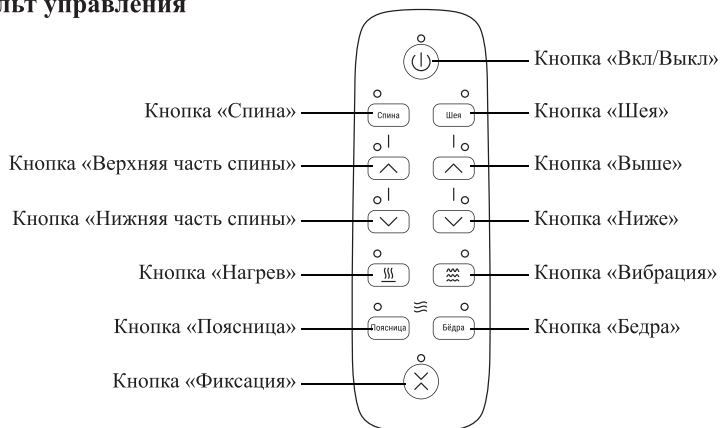

Управление массажером осуществляется кнопками на пульте управления. Рядом с кнопками расположен индикатор, который загорается при нажатии на кнопку.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает, останавливает массаж, а также выключает массажер.

Кнопка «Шея» включает, выбирает направление вращения массажных роликов и выключает роликовый массаж зоны шеи. После нажатия на кнопку «Шея» начнется массаж шеи, при повторном нажатии на кнопку ролики будут вращаться в противоположную сторону. Третье нажатие на кнопку «Шея» выключает массаж шеи. Ролики для массажа шейной зоны находятся в подголовнике, который можно поднять или опустить, если нажать и удерживать **кнопку «Выше»** или **кнопку «Ниже»**.



Кнопка «Спина» включает и выключает массаж всей спины.

Кнопка «Верхняя часть спины» включает массаж спины от плеч до середины спины.

Кнопка «Нижняя часть спины» включает массаж области ниже середины спины.

Нажатие на **кнопку «Фиксация»** останавливает перемещение массажных роликов зоны спины в текущем положении для проработки выбранной области.

Кнопка «Вибрация» включает и выключает вибрацию. Нажмите на данную кнопку один раз для включения вибрации. Нажмите повторно, чтобы отключить вибрацию.

Кнопка «Нагрев» включает и выключает нагрев спины. Нажмите на данную кнопку один раз для включения нагрева. Нажмите повторно, чтобы отключить нагрев.

Кнопка «Поясница» включает и выключает функцию воздушно-компрессионного массажа поясницы. Нажмите на кнопку «Поясница» один раз, чтобы включить данную функцию. Нажмите на данную кнопку еще раз, функция выключится.

Кнопка «Бедра» включает и выключает функцию воздушно-компрессионного массажа бедер. Нажмите на кнопку «Бедра» один раз, чтобы включить данную функцию. Нажмите на данную кнопку еще раз, функция выключится.

Примечание. Автоотключение массажера происходит после 15 минут работы массажера.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите массажер влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Поместите массажер на стул и зафиксируйте.

Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.

Подключите штекер блока питания к разъему на массажере, блок питания подключите к сети электропитания.

Использование

1. Сядьте на массажер ровно, расслабьтесь.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», загорится индикатор кнопки «Вкл/Выкл» и индикаторы соответствующих настроек по умолчанию («Нагрев» и «Вибрация»).
3. Нажмите на кнопку «Шея», чтобы включить роликовый массаж шеи. Загорится индикатор кнопки «Шея». Кнопками «Выше» и «Ниже» настройте удобное положение подголовника. Над кнопкой, соответствующей выбранной зоне, загорится индикатор.

4. Нажмите на кнопку «Спина», чтобы включить роликовый массаж спины. Загорится индикатор кнопки «Спина». Измените зону роликового массажа спины кнопками «Верхняя часть спины» или «Нижняя часть спины». Над кнопкой, соответствующей выбранной зоне, загорится индикатор.
5. Если вы хотите проработать определенную зону спины, нажмите на кнопку «Фиксация», когда ролики будут массировать необходимую вам область, загорится индикатор кнопки «Фиксация». Ролики остановятся и будут крутиться только в фиксированной зоне.
6. Нажмите на кнопку «Поясница» или «Бедра», чтобы включить воздушно-компрессионный массаж, в зависимости от зоны, которую вы хотите массировать. Над кнопкой, соответствующей выбранной зоне, загорится индикатор.
7. Нажмите на кнопку «Вибрация», чтобы включить вибрацию, индикатор кнопки «Вибрация» загорится.
8. Нажмите на кнопку «Нагрев», чтобы включить функцию нагрева, индикатор кнопки «Нагрев» загорится.
9. После включения массажера по умолчанию таймер включен на 15 минут, по истечении этого времени массажер выключится. Вы можете выключить массажер раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
10. После автоотключения вы можете нажать на кнопку «Вкл/Выкл» для включения массажера, если хотите продолжить использование.

Примечание. Не рекомендуется использовать массажер более 30 минут подряд. Не превышайте время использования массажера, чтобы не навредить своему здоровью. Во избежание срабатывания защиты от перегрева необходимо подождать минимум 20 минут перед следующим циклом работы массажера.

11. После завершения работы массажера отключите его от сети питания.

Внимание! Если во время массажа вы чувствуете дискомфорт или боль, а также если наблюдаете покраснение кожи, то немедленно прекратите массаж. Если симптомы не исчезли в течение 15 минут, обратитесь к врачу.

Примечание. Запрещено класть массажер на пол, ложиться на него, класть на него голову. Массажер предназначен только для использования сидя.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - тромбофлебит, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;



- наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
4. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Советы

Не превышайте время использования массажера, чтобы не навредить своему здоровью. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторы сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться синяки и начаться боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки массажера допускается использовать влажные салфетки, ткань, губку или ватный диск, смоченные водой. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер в воде.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на пульт управления, блок питания и разъем для подключения шнура.

Уход и хранение

Перед тем как убрать на хранение, очистите массажер, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в помещении с высокой температурой.

Не кладите тяжелые предметы на устройство во время хранения. Не перегибайте шнуры блока питания, пульта управления, не обматывайте их вокруг массажера.

Устранение неполадок

Массажер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер не подключен к блоку питания	Подключите массажер к блоку питания
Массажер не включен	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А
 - выход: =12 В, 4 А
- Мощность: 48 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
- Тип массажера: роликовый + воздушно-компрессионный
- Автоотключение: через 15 мин
- Длина шнура блока питания: 1,8 м
- Размер устройства: 440 × 380 × 820 мм
- Размер упаковки: 850 × 255 × 490 мм
- Вес нетто: 8,9 кг
- Вес брутто: 11,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на пульт управления, блок питания и разъем для подключения шнура не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие превышения времени использования не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на пульт управления, блок питания и разъем для подключения шнура.
15. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87