



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Ортез голеностопный жесткий из пластмассы**

**Модели: АТ53026 (высокий: 43 см.), АТ53027 (низкий: 28 см.)**



## Назначение.

Обеспечение поддержки и стабилизации голеностопного сустава, фиксация стопы при ходьбе.

## Показания.

Растяжение и повреждение связок средней или сильной степеней, подвывихи, переломы и нестабильность в голеностопном суставе. Стабилизация переломов ступни или лодыжки. Послеоперационная реабилитация. Вялые параличи стопы.


Возможность регулировки угла сгибания/разгибания голеностопного сустава.

## Инструкция по применению:

1. Поместите ступню с голенью во вкладыш и затяните его таким образом, чтобы он достаточно плотно прилегал к ноге.



2. Для лучшего прилегания, заполнения пустот во вкладыше или между вкладышем и ботинком-каркасом используйте прилагаемые овальные вкладки на «липучках».

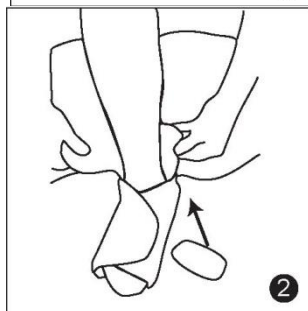


3. Поместите перевернутую в стельку стопу в ботинок и выровняйте ее по боковой оси с обеих сторон.

4. Установите переднюю панель и убедитесь, что пенопласт хорошо закрыт.




5. Затяните все ремни один за другим и закрепите их.

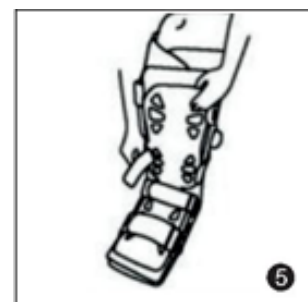

### Работа воздушной камеры:

1. Чтобы заполнить камеру воздухом, используйте кнопки надувания, расположенную на противоположной стороне ортеза.

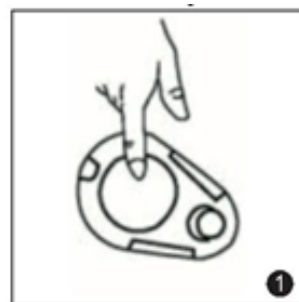

2. Чтобы сдуть воздушную камеру, одновременно нажмите кнопки стравливания воздуха (как показано на рисунке).



Таблица размеров к моделям AT53026 и AT53027

Размер ботинка	S	M	L	XL
Размер обуви	36-39	40-44	45-46.5	46.5 +

### Рекомендации по уходу за изделием

- Перед стиркой снимите металлические детали и каркас.
- Стирать вкладыш в прохладной или холодной воде с использованием мягкого жидкого мыла вручную, или в стиральной машине, выбрав программу для деликатных тканей.
- Не подвергать изделие химической чистке. Сушить при комнатной температуре, избегая прямых солнечных лучей, машинной сушки, вблизи с сильных источников тепла.
- Не применять отбеливающие средства и агрессивные чистящие средства (щелочь, бензин, кислоты и т.п.)
- Не подвергать воздействию источников тепла свыше 40 С.



### Состав изделия:

Ботинок: 85% полипропилен + 15% стекловолокно

Вкладыш: 52 % нейлон, 30 % пенаполиуретан, 18 % полиэстер

Подошва: 100% ЭВА

### **Внимание!**

1. Перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Длительность ежедневного использования изделия в соответствии с рекомендациями Вашего лечащего врача. Использовать изделие исключительно по назначению. При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему лечащему врачу.
3. **Противопоказания.** Индивидуальная непереносимость материалов. Ортопедическими изделиями не следует пользоваться, если нагрев или тепло вызывают аллергическую реакцию организма. В этом случае необходимо обратиться к врачу.
4. Не рекомендуется надевать бандаж после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

**Срок годности (хранения):** 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

**Гарантия:** 1 год с даты покупки.

**Производитель - ANTAR Sp. J., ул. Зависьляньска, 43; 03-068, Варшава, Республика Польша,**

**тел.: 0 22 518 36 00.**



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:.....

Серийный номер: .....

Дата продажи:.....

- 1) Фирма Antar Sp.J. (АНТАР), 03-068 Варшава, ул. Зависьляньска, 43, настоящим предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня продажи.
- 2) Во время гарантийного срока АНТАР обязуется провести необходимый ремонт изделия для восстановления правильного его функционирования в течение 14 рабочих дней со дня получения изделия на ремонт по вышеуказанному адресу.
- 3) АНТАР сохраняет за собою право заменить изделие, в случае, если признает, что издержки на ремонт превышают его стоимость.
- 4) В случае обнаружения, что изделие работает неправильно, следует незамедлительно отправить его в адрес АНТАР (см. п. 1) или связаться с пунктом продажи изделия.
- 5) Прежде, чем начать эксплуатацию, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и тщательно её соблюдать. Использование изделия не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией лишает изделие гарантии.
- 6) Гарантией не охвачены повреждения, возникшие вследствие пробоя или пореза изделия острым предметом, повреждения в результате воздействия внешней механической силы, излишнего нажима, соединения изделия с жирными или маслянистыми веществами, бензином и другими агрессивными веществами.
- 7) НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОКУПКИ ТОВАРА (ЧЕКОМ, СЧЁТОМ ИЛИ СЧЕТОМ-ФАКТУРОЙ). ПРОСИМ ПРИЛОЖИТЬ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОКУПКУ В СЛУЧАЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.
- 8) Претензии, заявленные без подтверждения покупки товара, не принимаются.



Antar Sp.J.  
ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa  
tel. +48 22 518 36 00  
fax: +48 22 518 36 30  
e-mail: antar@antar.net

Импортер в РБ – ИООО «АНМЕДПЛЮС»,  
тел.: +375 44 799 76 99.

Штамп пункта продажи, Ф.И.О.  
и разборчивая подпись продавца:



[www.antar.net](http://www.antar.net)



\_\_\_\_\_ ( )

V 1.29.02.2016