

**Удовольствие
в заботе!**



**Массажер для глаз
КТ-5906**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера для глаз	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12

Общие сведения

Массажер для глаз КТ-5906 помогает избавиться от неприятных ощущений после повышенной зрительной нагрузки, снять усталость и способствует расслаблению мышц вокруг глаз. Также массажер способствует снятию отеков и тонизированию кожи вокруг глаз. Массажер придает зоне вокруг глаз свежий и отдохнувший вид.

Прибор воздействует двумя способами: вибрацией и нагревом. Вибрационный массаж способствует расслаблению глазных мышц и снятию спазмов и зажимов в мышечной ткани. Нагрев усиливает эффект от массажа, а также способствует восстановлению кровообращения и обменных процессов.

Массажер оказывает стимулирующее воздействие на кровоток и лимфоток, ускоряя тем самым доставку питательных веществ и кислорода к глазным мышцам, окологлазным тканям и нервам, в результате чего нормализуется тонус мышц.

Массажер выполнен в форме очков, которые нужно надеть на глаза и зафиксировать ремешком на голове. Включение прибора и управление массажером осуществляется с помощью всего одной кнопки, которая расположена на корпусе. Всего у массажера два режима работы: режим «Вибрация + нагрев», подходящий для полноценного массажа, и режим «Нагрев», который подойдет для мягкого расслабления, в случае, если вы не хотите делать массаж.

В комплекте с прибором идет гелевая маска, которую можно охладить в морозильной камере и использовать как холодный компресс для снятия отеков. Гелевая маска используется отдельно от массажера.

Прибор работает от аккумулятора, поэтому его можно использовать в любом удобном для вас месте и брать с собой в поездки.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для глаз КТ-5906 не является медицинским прибором и используется только в профилактических и косметологических целях.

Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Аккумулятор — 1 шт.
3. Гелевая маска — 1 шт.
4. Шнур USB Type-C — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для глаз

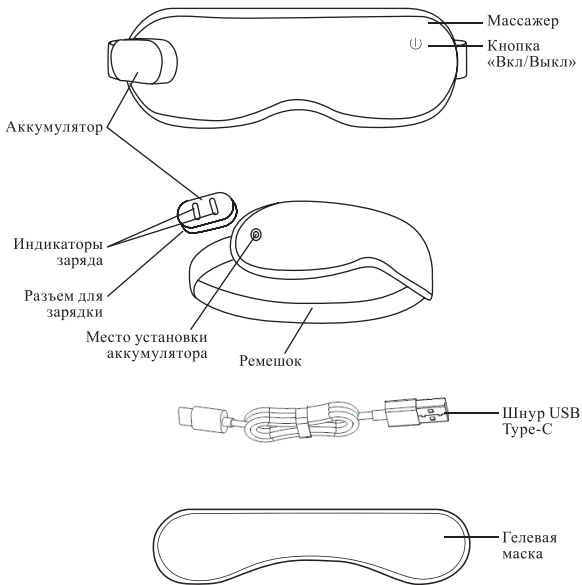

Аккумулятор прибора сделан съемным для удобства использования и зарядки.

Примечание. Без установленного аккумулятора прибор работать не будет.

На аккумуляторе есть два **индикатора заряда**. При установке аккумулятора на массажер индикаторы заряда загорятся, затем погаснут. Если индикаторы не загорелись, значит, аккумулятор установлен неправильно. Индикаторы заряда также загораются при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» и затем гаснут. Уровень заряда массажера можно определить по индикаторам заряда. Каждый индикатор заряда делится на два сегмента. В зависимости от уровня заряда горит от одного до четырех сегментов. Когда прибор полностью заряжен, все четыре сегмента горят непрерывно.



Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте **кнопку «Вкл/Выкл»** в течение 2 секунд. Прибор начнет работать в режиме «Вибрация + нагрев». Если вы хотите использовать прибор для мягкого расслабления без массажа, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», включится режим «Нагрев». Чтобы вернуть режим «Вибрация + нагрев», снова нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Температура нагрева равняется 42 °С.

Для выключения массажера нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Прибор выключается автоматически после 18 минут работы.

Гелевая маска используется для снятия отеков. Гелевую маску сначала необходимо поместить на 10–15 минут в морозильную камеру. Маска используется без массажера.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью. Протрите массажер (без аккумулятора): его можно протереть ватным диском, слегка смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Не допускайте попадания жидкости в корпус массажера, на аккумулятор, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 2 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А.

Для зарядки всегда снимайте аккумулятор с массажера. Для этого потяните аккумулятор от прибора.

Вставьте шнур USB Type-C в разъем для зарядки на аккумуляторе и затем подключите его к источнику питания.

Когда прибор полностью разряжен, индикаторы заряда будут мигать.

Уровень заряда массажера можно определить по индикаторам заряда. Каждый индикатор заряда делится на два сегмента. В зависимости от уровня заряда горит от одного до четырех сегментов. Когда прибор полностью заряжен, все четыре сегмента горят непрерывно.

При установке аккумулятора на массажер индикаторы заряда загораются, затем гаснут. Индикаторы заряда также загораются при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» и затем гаснут.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 30 минут. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки не устанавливайте аккумулятор на массажер!

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от аккумулятора.

После полной зарядки прибор может работать 30–60 минут в зависимости от выбранного режима.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если аппарат не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте примерно 15 минут. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности и при наличии глазных заболеваний. Не используйте прибор при наличии воспалений глаз или кожи вокруг глаз. Если вы делали инъекции в зоне вокруг глаз или вводили филлеры, прибором пользоваться нельзя. Если у вас хрупкие сосуды, перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
2. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Проводите массаж только сидя или лежа.
3. Перед началом процедуры обязательно очистите кожу и удалите макияж. Если вы носите контактные линзы или очки, снимите их.
4. Установите аккумулятор на массажер. Убедитесь, что аккумулятор надежно зафиксирован. Индикаторы заряда загорятся и погаснут. Если индикаторы не загорелись, значит аккумулятор установлен неправильно.

Примечание. Если индикаторы заряда мигают, аккумулятор необходимо зарядить.

5. Наденьте массажер на голову, закрепив ремешком. Массажер должен плотно сидеть на лице и не сползать, но при этом не должно быть сильного давления на глаза или переносицу.
6. Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Прибор начнет работать в режиме «Ви-

брация + нагрев». Если вы хотите использовать прибор для мягкого расслабления без массажа, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», включится режим «Нагрев». Чтобы вернуть режим «Вибрация + нагрев», снова нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

7. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Снимите массажер.

Примечание. Массажер автоматически отключается через 18 минут работы.

8. Если вы хотите использовать гелевую маску, предварительно охладите ее в морозильной камере в течение 10–15 минут. Примите горизонтальное положение и положите маску на глаза. Маска используется отдельно от массажера. Держите гелевую маску на глазах не более 10 минут. Гелевая маска помогает снять отеки.
9. После каждого использования очищайте и дезинфицируйте внутреннюю сторону массажера и гелевую маску, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Рекомендуется использовать прибор не более 4–5 раз в неделю по 10–15 минут на сеанс. Не используйте массажер дольше 18 минут. При выборе времени и частоты использования массажера руководствуйтесь своими ощущениями. Массаж не должен доставлять дискомфорт.

Если во время использования массажера вы почувствовали боль или какой-либо дискомфорт, сразу прекратите процедуру и снимите массажер. Если неприятные ощущения не прошли через 15 минут после прекращения массажа, появилась и не сошла краснота, обратитесь к врачу.

В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора и времени проведения процедур. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, как часто можно использовать массажер в вашем случае.

Не засыпайте с надетым массажером.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским устройством и используется только в профилактических целях.
3. Детям младше 14 лет прибором пользоваться запрещено. подросткам старше 14 лет можно пользоваться прибором только после разрешения врача и под присмотром взрослых.
4. Существует ряд противопоказаний к применению, таких как:
 - беременность;
 - онкология;
 - наличие глазных заболеваний;

- перенесенная операция на глаза;
- сильно развитая дальнозоркость или близорукость;
- воспаление глаз или кожи вокруг глаз;
- конъюнктивит и другие глазные инфекции;
- инфекционные заболевания кожи;
- недавний ввод инъекций и филлеров;
- кожа, склонная к аллергическим реакциям;
- наличие имплантов;
- нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
- тяжелая форма акне;
- хрупкие сосуды;
- воспаления на коже лица;
- купероз 3–4 степени;
- парез лицевого нерва;
- невралгия тройничного нерва;
- варикозное расширение вен, тромбофлебит;
- нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
- остеопороз;
- наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
- хроническая мигрень;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- почечная недостаточность;
- повышенная температура, грипп, ОРВИ;
- сахарный диабет;
- наличие каких-либо заболеваний в острой форме;
- нечувствительность к теплу;
- гипогликемия;
- гипертония;
- слабость, нервозность и страх боли;
- переутомление.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки выключайте массажер и снимайте аккумулятор с массажера. Протирайте устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Дезинфицируйте внутреннюю сторону массажера до и после использования: ее можно протереть ватным диском, слегка смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине.

Гелевую маску мойте в теплой воде с использованием жидкого мыла и мягкой губки.



Не допускайте попадания жидкости в массажер, на аккумулятор, кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C. Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки.

Периодически протирайте контакты на массажере и аккумуляторе мягкой сухой тканью.

Уход и хранение

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать прибор на хранение, очистите его, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните массажер, сняв с него аккумулятор. На длительное хранение уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 15 минут.

При длительном хранении заряжайте аппарат наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните прибор при температуре от 0 до 40 °C.

Устранение неполадок

Прибор не включается, не горят индикаторы заряда

Возможная причина	Решение
Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите аккумулятор
Индикаторы заряда загораются и гаснут при установке аккумулятора или при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл»	Это нормальная работа прибора
Вы неправильно установили аккумулятор и индикаторы заряда не загорелись	Снимите аккумулятор и установите его еще раз

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Не до конца подключен шнур USB Type-C к разъему для зарядки или источнику питания	Плотно подсоедините шнур к аккумулятору и источнику питания

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Используйте источник питания с параметрами: ≈ 5 В, 2 А
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А

Массажер перестал работать

Возможная причина	Решение
По истечении 18 минут использования сработало автоотключение устройства	Включите массажер, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд
Сработала защита от перегрева	Выключите прибор и отключите от источника питания, дайте массажеру остыть в течение часа, затем снова включите

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ≈ 5 В, 2 А
2. Мощность: 6 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,4 А*ч (1,48 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 30 мин
6. Время работы от аккумулятора: до 60 мин
7. Количество режимов работы: 2
8. Автоотключение: через 18 мин
9. Тип массажера: вибрационный
10. Длина шнура USB Type-C: 0,5 м
11. Уровень шума: ≤ 50 дБ
12. Размер устройства: $260 \times 20 \times 83$ мм
13. Размер упаковки: $290 \times 106 \times 57$ мм
14. Вес нетто: 0,1 кг
15. Вес брутто: 0,3 кг



Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на аккумулятор, кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки или на шнур USB Type-C не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте массажер для глаз только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор или шнур USB Type-C повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Держите прибор только сухими руками.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на аккумулятор, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки или на шнур USB Type-C.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности и при наличии глазных, неврологических заболеваний, а также филлеров и инъекций в зоне вокруг глаз, прибором пользоваться запрещено.

17. В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, как часто можно проводить процедуры в вашем случае.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг аккумулятора.
20. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от аккумулятора.
21. Перед зарядкой всегда снимайте аккумулятор с устройства.
22. Не используйте прибор при ходьбе. Используйте массажер только сидя или лежа. Не засыпайте с надетым прибором.
23. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
24. Гелевую маску используйте отдельно от массажера.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87