

**Удовольствие
в заботе!**



**Массажер для шеи
КТ-2998**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера для шеи	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11

Общие сведения

Массажер для шеи КТ-2998 выполняет массаж, помогая избавиться от дискомфорта в шейно-воротниковой зоне, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или при сидячем образе жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, массажер устраняет стресс и затекание мышц.

Также массажер можно использовать для массажа других зон: поясницы, живота, бедер и стоп.

Благодаря нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто долго работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи. Роликовый массаж и тепло стимулируют и повышают тонус мышц шеи, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови. Также массажер имеет два уровня интенсивности массажа: низкий и высокий.

Управление массажером осуществляется с помощью четырех кнопок.

Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа составляет 10 минут. Через 10 минут массажер автоматически отключается. Не используйте массажер на одной зоне более одного раза подряд и более двух раз в день.


При беременности, наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер КТ-2998 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например, ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер с тканевым чехлом для массажных роликов — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для шеи

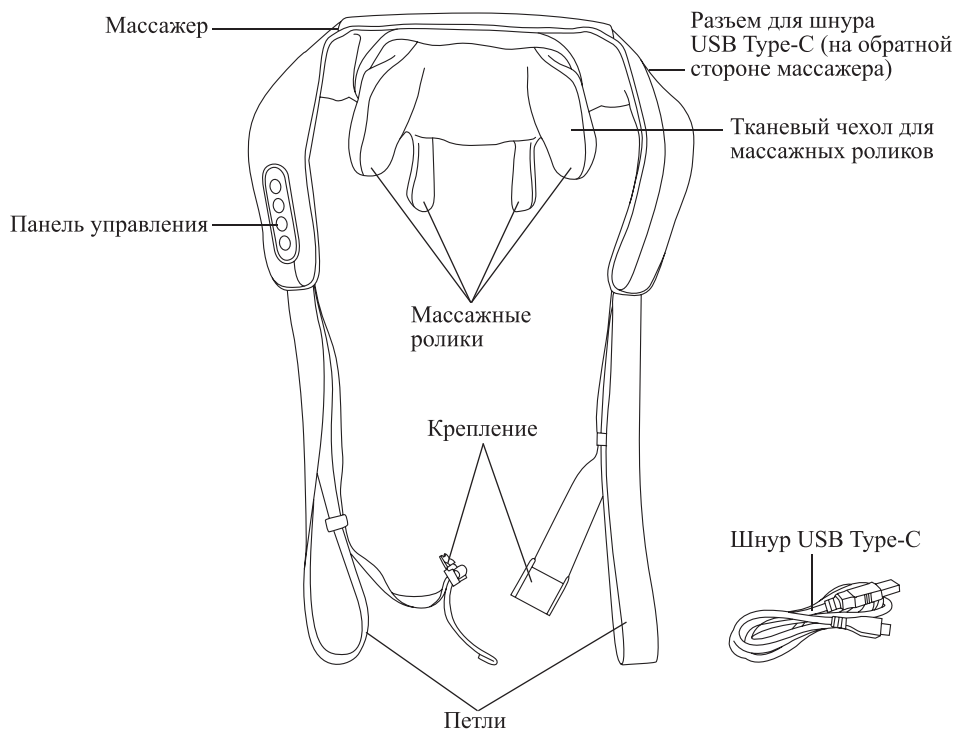

Панель управления

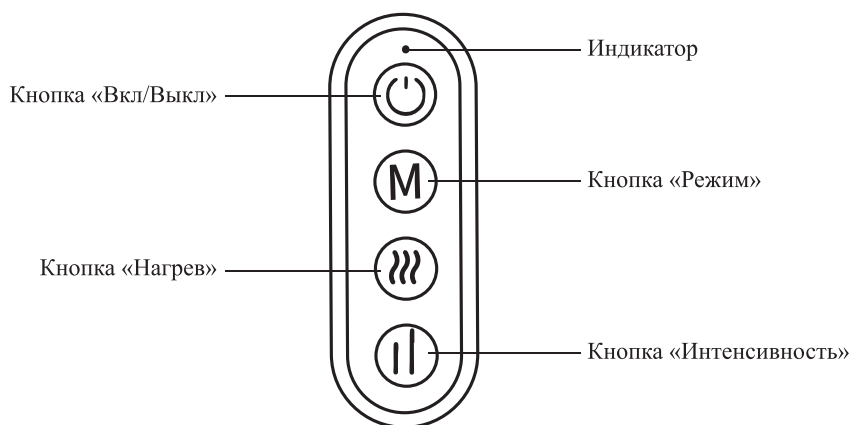



Индикатор отображает уровень заряда массажера. Если индикатор мигает красным, массажер разряжен, и устройство скоро отключится. Также данный индикатор показывает, включена или отключена функция «Нагрев». Когда нагрев включен, индикатор горит красным, когда отключен — зеленым.

Нажатие и удерживание **кнопки «Вкл/Выкл»** в течение 2 секунд включает и отключает массажер.

Кнопка «Режим» переключает два режима массажа: режим бодрящего массажа и режим расслабляющего массажа, при котором массажные ролики движутся более медленно и с маленькими остановками.

Примечание. По умолчанию включен режим бодрящего массажа.

Кнопка «Нагрев» включает и выключает функцию нагрева.

Кнопка «Интенсивность» позволяет циклически переключать два уровня интенсивности массажа от низкого до высокого.

Примечание. По умолчанию включены нагрев и низкий уровень интенсивности.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите массажер мягкой слегка влажной тканью.

Зарядите устройство. Перед первым применением ознакомьтесь со всеми рекомендациями и противопоказаниями к применению массажера из раздела «Меры предосторожности по применению».

Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.

Зарядка аккумулятора

Если индикатор мигает красным, массажер необходимо зарядить. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой комплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами =5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор мигает красным. Когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор будет гореть зеленым. Время зарядки аккумулятора составляет 3 часа. Рекомендуется заряжать устройство при полной разрядке аккумулятора. Во время зарядки нельзя пользоваться устройством.


Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого разрядите массажер, затем заряжайте его в течение 1,5 часов.

Использование

1. Наденьте массажер на шейно-воротниковую зону так, чтобы панель управления оказалась справа. Зафиксируйте массажер на спине с помощью крепления. Примите удобное положение, шея не должна быть напряжена. Руки просуньте в петли массажера.

Внимание! Использовать массажер на шее в положении лежа запрещено.

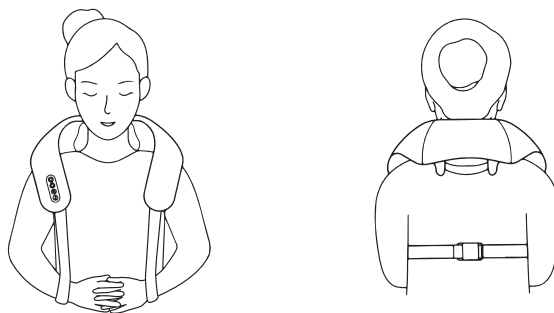

Примечание. Вы можете использовать массажер для выполнения массажа передней и задней поверхности бедра, поясницы, стоп, живота.

2. Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Массажер начнет работу. По умолчанию включен режим бодрящего массажа: включен нагрев, интенсивность массажа низкая.
3. Чтобы отключить нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев». Индикатор будет гореть зеленым.
4. Если вы хотите включить режим расслабляющего массажа, нажмите на кнопку «Режим».
5. Нажмите на кнопку «Интенсивность», чтобы изменить уровень интенсивности массажа на высокий.
6. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 10 минут. По истечении 10 минут массажер автоматически отключается. Если вы хотите отключить массажер раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» 2 секунды, пока массажер не отключится.
7. По окончании массажа нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, массажер выключится. Протрите массажер мягкой слегка влажной тканью.

Примечание. При возникновении неприятных ощущений, прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом. Также не используйте массажер 2 раза подряд для одной и той же зоны.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Массажер не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - наличие ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
 - нечувствительность к теплу;
 - инфекционные заболевания кожи;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора;
 - злокачественные новообразования;
 - повреждение целостности кожного покрова в зоне массажа;
 - переломы, вывихи, разрывы мышц и прочие повреждения;
 - недавняя операция, ввод инъекций;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - сахарный диабет;
 - беременность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажер слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Не используйте моющие средства. Для дезинфекции массажера допускается протереть его ватным диском, смоченным в 75%-ом растворе спирта. Также вы можете снять тканевый чехол массажера и постирать его.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, индикатор заряда будет мигать красным, затем заряжайте около 1,5 часов.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор, индикатор мигает красным	Зарядите массажер, как указано в главе «Зарядка аккумулятора»
Вы нажимаете на кнопку «Вкл/Выкл», а не удерживаете ее в течение 2 секунд	Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд

Устройство выключилось во время работы

Возможная причина	Решение
Сработало автоматическое отключение после 10 минут массажа	Если вы хотите воспользоваться массажером снова, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, чтобы включить его
Сработала защита от перегрева	Подождите около 30 минут, затем попробуйте включить устройство снова
Разряжен аккумулятор, индикатор мигает красным	Зарядите массажер, как указано в главе «Зарядка аккумулятора»

Интенсивность массажа очень слабая

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор, индикатор мигает красным	Зарядите массажер, как указано в главе «Зарядка аккумулятора»

Устройство не заряжается, индикатор не мигает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный
Ноутбук или компьютер или пауэрбанк не включены	Для зарядки устройства от USB-порта компьютера, пауэрбанка или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен	Зарядите пауэрбанк

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 2 А*ч (14,8 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Тип массажера: роликовый
6. Время зарядки: 3 ч
7. Время работы: 90–120 мин
8. Длина шнура USB Type-C: 0,6 м
9. Размер устройства: 650 × 168 × 140 мм
10. Размер упаковки: 250 × 170 × 170 мм
11. Вес нетто: 1,3 кг
12. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C или разъем для шнура питания. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.
14. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром USB Type-C или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Держите устройство вдали от источников тепла и огня.
16. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87