

**Удовольствие
в заботе!**



**Перкуссионный
массажер
КТ-2997**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство перкуссионного массажера.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

Перкуссионный массажер КТ-2997 поможет избавиться от мышечной усталости, боли и спазмов.

Воздействуя на мышцы, массажер устраняет их напряжение и затекание. Ударный массажер позволяет восстановить свободу движений, избавиться от токсинов, а также улучшает кровообращение и лимфодренаж, насыщает ткани кислородом. Прибор помогает подготовить мышцы к интенсивным нагрузкам, повысить производительность тренировок, а также расслабить мышцы после тренировки. Глубокое ударное воздействие на мышечную ткань и фасции повышает мобильность и восстанавливает работу опорно-двигательного аппарата.

Использование направленной вибрации с определенной частотой и амплитудой не вызывает болезненных ощущений.

Каждая мышца имеет соединительнотканную оболочку — фасцию, которая соединяет мышечные волокна и обеспечивает их движение. При травмах, сильном напряжении, больших нагрузках и в процессе старения организма фасциальная ткань утрачивает эластичность, в результате чего возникает «сцепление» фасции с мышцей. Массажер КТ-2997 способствует восстановлению функциональной подвижности и гибкости, благодаря чему можно расслабить группу спазмированных мышц.

Насадки разных видов предназначены для воздействия на группы мышц и на отдельные мышцы. Пулевидная насадка применяется для точечного массажа. Она действует на проблемные зоны, прорабатывает триггеры и помогает расправить зажатые фасциальные волокна. Чрезмерное напряжение, резкие движения и растяжения провоцируют возникновение триггерных точек — плотных болезненных узлов в мышцах. Плоская насадка отлично подходит для проработки широких и крупных мышц. Круглая насадка более универсальная и подходит почти для любых групп мышц. U-насадка используется для массажа шеи, трапециевидной мышцы и мышц вдоль позвоночника.

В комплект входит съемная ручка для более удобного использования и компактного хранения массажера.

Модель КТ-2997 работает от аккумулятора, поэтому массажер можно брать с собой куда угодно: в спортзал, в офис, в поездку или использовать дома. Можно делать массаж, не снимая одежду. Перкуссионный массажер позволит мышцам расслабиться, а также улучшит кровоток и избавит от боли.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер КТ-2997 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например, ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация

1. Перкуссионный массажер — 1 шт.
2. Съёмная ручка — 1 шт.
3. Плоская насадка — 1 шт.
4. Пулевидная насадка — 1 шт.
5. Круглая насадка — 1 шт.
6. U-насадка — 1 шт.
7. Шнур USB Type-C — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство перкуссионного массажера

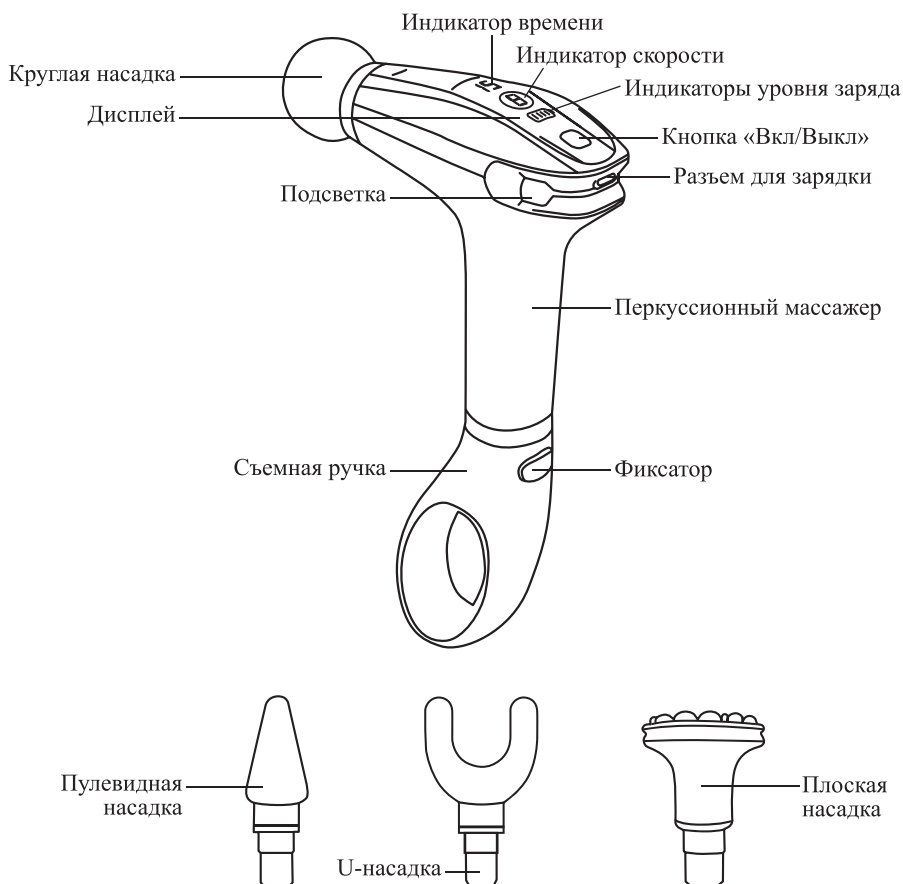

Нажмите и удерживайте **кнопку «Вкл/Выкл»** 2 секунды, чтобы включить или выключить массажер.

Однократные нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» переключают скорость работы, которую отображает **индикатор скорости**, от «1» до «Н».

Примечание. Для быстрого переключения на скорость «Н» (максимальную скорость) надавите на массажер немного сильнее. После того как вы перестанете давить на массажер, устройство продолжит работу на выбранной ранее скорости.

Индикатор времени отображает оставшееся время массажа. По истечении 15 минут сработает автоотключение.

Индикаторы уровня заряда отображают уровень заряда аккумулятора. Во время зарядки индикаторы уровня заряда мигают. Чем больше индикаторов горит непрерывно, тем выше уровень заряда. Когда устройство полностью заряжено, все индикаторы заряда горят непрерывно.

Подсветка включена, когда устройство работает.

Для зарядки устройства в комплекте предусмотрен **шнур USB Type-C**.

Насадки

- У-насадка предназначена для массажа шеи, трапециевидной мышцы и мышц вдоль позвоночника.
- Круглая насадка — универсальная насадка, прорабатывает почти все типы мышц, подходит для более глубокой проработки крупных мышц.
- Пулевидная насадка используется для проведения точечного массажа. Подходит для ладоней, стоп, триггерных точек.
- Плоская насадка предназначена для широких и крупных мышц, таких как ягодичная мышца, мышцы бедер, область живота.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство и насадки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Протрите насадки: их можно протереть ватным диском, смоченным в 75% растворе спирта или в хлоргексидине.

Перед первым применением ознакомьтесь со всеми рекомендациями и противопоказаниями к применению массажера из раздела «Меры предосторожности по применению».

Зарядите устройство.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 2 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Вставьте шнур USB Type-C в разъем для зарядки на массажере, а затем подключите шнур к источнику питания.

Во время зарядки индикаторы заряда мигают. Чем больше индикаторов горит непрерывно, тем выше уровень заряда.

Время зарядки аккумулятора составляет 30 минут. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки прибором пользоваться нельзя. Чтобы включить массажер, сначала отключите его от источника питания.

По окончании зарядки сначала отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от массажера.

При полном заряде прибор работает до 1,5 часов в зависимости от установленной скорости и давления на массажер.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, затем заряжайте примерно 15 минут (два индикатора заряда должны гореть непрерывно). В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности, при наличии имплантов, пластин и электронных устройств (например, кардиостимуляторов).
2. Выберите необходимую насадку. Установите насадку до упора в место установки насадки. Чтобы снять насадку, осторожно потяните ее в противоположную сторону от массажера.

Внимание! Устанавливайте и снимайте насадки, только когда прибор выключен. При работающем приборе не подносите руки к месту установки насадки.

3. Чтобы установить съемную ручку, нажмите и удерживайте на ней фиксатор и вставьте выступающую часть ручки в нижнюю часть массажера до щелчка, затем отпустите фиксатор.
4. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Устройство начнет работу.
5. Установите желаемую скорость работы от «1» до «Н», нажимая на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Для быстрого переключения на скорость «Н» (максимальную скорость) надавите на массажер немного сильнее. После того как вы перестанете давить на массажер, устройство продолжит работу на выбранной ранее скорости.

Внимание! Если вы только начинаете пользоваться массажером, не устанавливайте высокую скорость. Проследите за реакцией организма на массаж. После

нескольких процедур массажа на небольшой скорости, вы можете попробовать увеличить скорость.

6. Прислоните насадку к области тела, на которой собираетесь производить массаж. Плавно и медленно двигайтесь вдоль мышцы. Массаж каждой зоны должен длиться от 15 до 60 секунд, а общее время процедуры — не более 15 минут. Примечание. По истечении 15 минут у массажера сработает автоотключение. Для продолжения работы сделайте перерыв 15 минут, а затем повторно запустите устройство.
7. Чтобы завершить массаж раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Устройство отключится, индикация погаснет.

Внимание! Не используйте массажер в области сердца, на лице и голове, передней поверхности шеи, в точках пульсации, костных выступях, непосредственно на позвоночнике, суставах и слизистых оболочках.

Не давите слишком сильно на кожу во время массажа. При дискомфорте во время массажа прекратите процедуру и обратитесь к врачу. Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут, обратитесь к врачу. Если у вас хрупкие сосуды, будьте осторожны при пользовании массажером и перед полноценным массажем проследите за реакцией кожи и сосудов.

Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью: ванной комнате, бане и сауне. Берите массажер только сухими руками.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, таких как:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - наличие имплантов, пластин;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - наличие кожных заболеваний;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышение температуры;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;

- гипогликемия;
- слабость, нервозность;
- переутомление;
- возраст меньше 18 лет.

Советы

Рекомендации для массажа различных групп мышц:

Ягодичные мышцы

- Время воздействия: 30–60 секунд
- Количество повторов: 4 раза

Мышцы бедра

- Время воздействия: 20–45 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы голени

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы плеч и предплечий

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Мышцы спины

- Время воздействия: 30–60 секунд
- Количество повторов: 2–3 раза

Триггерная точка

- Время воздействия: 15–30 секунд
- Количество повторов: 1–2 раза

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Время проведения массажа зависит от ощущений человека. В среднем продолжительность массажа составляет от 3 до 15 минут.

Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться гематомы и болевые ощущения в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно. Каждый сеанс должен длиться не более 15 минут.

Чистка и обслуживание

Протирайте устройство с ручкой и насадки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте моющие средства.

Дезинфицируйте насадки: их можно протереть ватным диском, смоченным в 75% растворе спирта или хлоргексидине.

Чистку следует производить после каждого использования, т.к. влага, кожный жир и пот могут привести к повреждению поверхности насадок.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадание жидкостей внутрь корпуса, на кнопку «Вкл/Выкл», фиксатор, дисплей, в место установки насадки, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не допускайте попадание на устройство прямых солнечных лучей. При длительном хранении для более компактного хранения снимите ручку массажера, нажав на фиксатор на ручке, а затем потяните ручку от массажера. Уберите массажер, ручку и насадки в пакет или коробу для защиты от пыли.

Аккумулятор массажера литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 15 минут (два индикатора заряда будут гореть непрерывно). Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте массажер наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните массажер при температуре от 5 до 40 °C.

Устранение неполадок

Устройство не работает, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Вы нажали, но не удерживали кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд	Для запуска устройства необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд
Закончился 15 минутный сеанс массажа и прибор автоматически выключился	После 15 минут срабатывает автоотключение. Для продолжения работы сделайте перерыв 15 минут, а затем повторно включите устройство
Разрядился аккумулятор	Зарядите устройство
Сработала защита от перегрева	Дайте устройству остыть не менее 15 минут, а затем попробуйте включить его снова

Устройство не заряжается, индикаторы заряда не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый источник питания	Используйте источник питания с выходом $\approx 5\text{ В}$, 2 А

Возможная причина	Решение
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите и включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Не до конца подключили шнур USB Type-C в разъем	Вставьте шнур USB Type-C до конца
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C = 5 В, 2 А
2. Мощность: 30 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 1,8 А*ч (13,32 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость ударов:
 - на первой скорости: 1600 уд/мин
 - на второй скорости: 1670 уд/мин
 - на третьей скорости: 1740 уд/мин
 - на четвертой скорости: 1815 уд/мин
 - на пятой скорости: 1895 уд/мин
 - на шестой скорости: 1970 уд/мин
 - на седьмой скорости: 2045 уд/мин
 - на восьмой скорости: 2125 уд/мин
 - на скорости «Н»: 3160 уд/мин
6. Время работы: до 1,5 ч
7. Время зарядки: 30 мин
8. Уровень шума: ≤45 дБ
9. Длина шнура USB Type-C: 0,4 м
10. Размер устройства: 42 × 141 × 333 мм
11. Размер упаковки: 270 × 230 × 58 мм
12. Вес нетто: 0,6 кг
13. Вес брутто: 0,9 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тянь-ху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, на кнопку «Вкл/Выкл», фиксатор, дисплей, в место установки насадки, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на массажере, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до движущихся частей прибора.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных для детей местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на кнопку «Вкл/Выкл», фиксатор, дисплей, в место установки насадки, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
19. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем от массажера.
20. Не подносите включенный прибор к области сердца, лицу и голове, передней поверхности шеи, к точкам пульсации, костным выступам, непосредственно к позвоночнику, суставам и слизистым оболочкам.
21. Не используйте устройство во время передвижения в транспортном средстве и в помещениях с повышенной влажностью.
22. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности, при наличии имплантов, пластин и электронных устройств (например, кардиостимуляторов).

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87